


# オスカー 日常のケアで使う機能（アシストモード）

アシスト  
モード

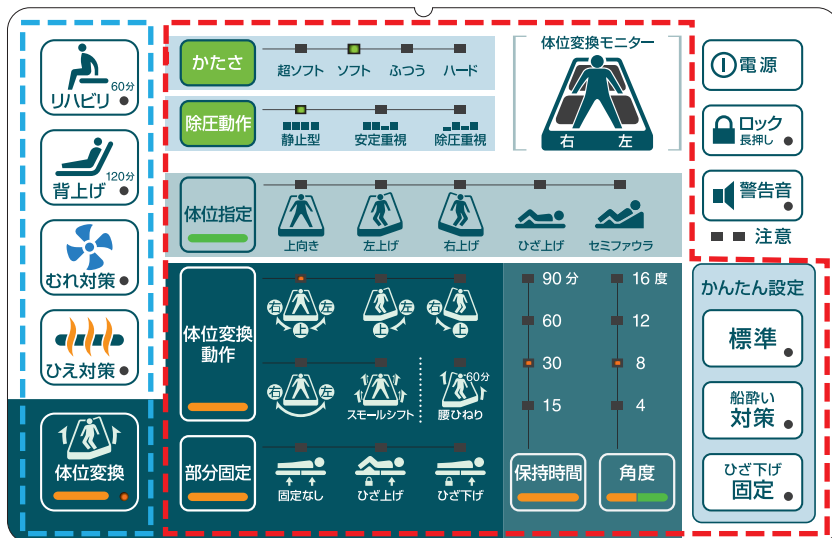

【赤枠内のボタン】は、初めて使用するときに設定するボタンです。  
日常では操作しません。

日常のケアで使う機能は【青枠内のボタン】で操作します。

ボタン	このようなときに使用します	このようなことができます
①	リハビリやおむつ交換をするときに	マットレスのふわふわ感がなくなり、かたくなります。
②	ベッドの背上げをするときに	背中やおしりの圧迫感が軽減されます。
③	汗をよくかくときに	“むれ”が軽減されます。
④	マットレスが冷たいときに	“ひえ”が軽減されます。
⑤	自動体位変換したいときに	利用者様の睡眠を妨げず、介護負担も軽減されます。

ボタンを押すとランプが点灯 します。点灯中が”入”の状態です。

取扱店

開発・製造元



※健康用品事業本部にて取得しています。

株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部  
[www.molten.co.jp/health](http://www.molten.co.jp/health)

東京：03-3625-8510 名古屋：052-252-0931  
札幌：011-261-7227 大阪：06-6773-0425  
仙台：022-390-5131 広島：082-842-6094  
埼玉：048-550-5052 福岡：092-441-0216