


オスカー



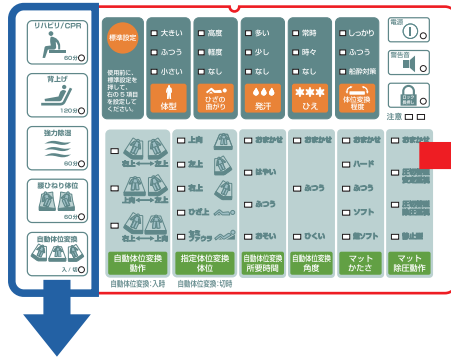


日常のケアで使う機能（アシストモード）

アシスト
モード



【赤枠内のボタン】は、初めて使用するときに設定するボタンです。
日常では操作しません。

日常のケアで使う機能は【青枠内のボタン】で操作します。

ボタン	このようなときに使用します	このようなことができます
① リハビリ/CPR 	リハビリやおむつ交換をするときに	マットレスのふわふわ感がなくなり、かたくなります。
② 背上げ 	ベッドの背上げをするときに	背中やおしりの圧迫感が軽減されます。
③ 強力除湿 	入浴や清拭のあとに	“むれ”が軽減されます。
④ 腰ひねり体位 	体をひねりたいときに	腰痛対策や内臓機能の維持・改善の一環として。
⑤ 自動体位変換 	自動体位変換したいときに	利用者様の睡眠を妨げず、介護負担も軽減されます。

ボタンを押すとランプが点灯  します。点灯中が”入”の状態です。

こちらからオスカーの設定方法の動画が見れます。



取扱店

開発・製造元

株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部
www.molten.co.jp/health



※ 健康用品事業本部にて取得しています。

東 京：03-3625-8510 名 古 屋：052-252-0931
札 幌：011-261-7227 大 阪：06-6773-0425
仙 台：022-390-5131 広 島：082-292-1391
富 山：076-420-6061 福 岡：092-441-0216