

置くだけで生活動作を広げる床置き型手すり

# Roots

## ルーツ



PAT.

介護保険福祉用具貸与品：手すり

障がい者総合支援・日常生活用具

**対象者** 「立つ・座る」「歩行」「立位保持」に不安のある人

寝室 リビング 廊下 洗面所 脱衣所 トイレ 玄関

### 1. 安定性による安心感

### 3. 安全・安心設計

### 2. 握りやすく、温かみのあるグリップ

### 4. 簡単組み立て・高さ調整（工具不要）



#### サイドタイプ

離床、立つ・座るなどの様々な生活動作をサポート

どのようなベッドにも使用可能



MNTPLBR

67,518 円 (税抜価格 61,380 円)



ベッドや布団での離床



玄関での立つ・座るの動作

#### センタータイプ

立つ・座るなどの様々な生活動作をサポート



MNTPSBR

58,322 円 (税抜価格 53,020 円)



ソファでの立つ・座るの動作

#### コーナータイプ

ベッドや布団での離床、ポータブルトイレなどへの移乗をサポート

体を支えやすい  
手すり形状



MNTPCRBR

79,134 円 (税抜価格 71,940 円)



ベッドや布団での離床



ポータブルトイレへの移乗

#### ロングタイプ

短い距離の歩行をサポート

手すり部はベースプレートの中央と端のどちらにでも取り付け可能



MNTPLGBR

68,002 円 (税抜価格 61,820 円)



手すり部を端に取り付け



手すり部を中央に取り付け

#### スモールタイプ

狭いスペースでの立つ・座るの動作をサポート  
簡単に清掃でき常に衛生的

両手すり  
仕様



MNTPT2  
84,942 円  
(税抜価格 77,220 円)

片手すり  
仕様



MNTPT1  
58,322 円  
(税抜価格 53,020 円)



立ち上がりやすい手すり位置



トイレでの立つ・座るの動作

#### あがりかまちタイプ

玄関での立つ・座る、段差を昇る・降りるの動作をサポート

両手すり  
仕様



片手すり  
仕様



あがりかまちを昇る・降りる

[H型]あがりかまち高さ:18~36cm  
[L型]あがりかまち高さ: 4~18cm

両手すり・片手すり・仕様によって品番・価格が異なります  
詳しくは仕様・オプションパンフレットをご覧ください



タイプ	サイドタイプ	センタータイプ	コーナータイプ	ロングタイプ	スモールタイプ	
					両手すり仕様	片手すり仕様
形状						
品番	MNTPLBR	MNTPSBR	MNTPCBR	MNTPLGBR	MNTPT2	MNTPT1
TAISコード	00054-000116	00054-000117	00054-000132	00054-000133	00054-000217	00054-000216
サイズ (cm)	ベースプレート	幅50×長さ105	幅50×長さ60	幅50×長さ105	幅50×長さ105	幅46×長さ66
	手すり部	幅33×高さ70/75/80 (3段階の高さ調整)	幅33×高さ70/75/80 (3段階の高さ調整)	幅34×奥行31×高さ70/75/80 (3段階の高さ調整)	幅81×高さ70/75/80 (3段階の高さ調整)	幅35×高さ60/65/70 (3段階の高さ調整)
	手すり部直径	トップグリップ(楕円)：4.0×3.1、ミドルグリップ(楕円)：3.1×2.8				トップグリップ(平ら)：5.0×3.1 ミドルグリップ(楕円)：3.1×2.8
重量(kg)	21.6	12.9	20.4	17.1	14.0	12.0
素材	ベースプレート：スチール、外周プロテクター：特殊エラストマー 手すり部：スチール+樹脂				ベースプレート：スチール ベースプロテクター：特殊エラストマー 手すり部：スチール+樹脂	
価格	67,518円 (税抜価格61,380円)	58,322円 (税抜価格53,020円)	79,134円 (税抜価格71,940円)	68,002円 (税抜価格61,820円)	84,942円 (税抜価格77,220円)	58,322円 (税抜価格53,020円)

タイプ	あがりかまちタイプ					
	高さH型		高さL型		高さH型(ステップ台付き)	
	両手すり仕様	片手すり仕様	両手すり仕様	片手すり仕様	両手すり仕様	片手すり仕様
形状						
品番	MNTPKH2BR	MNTPKH1BR	MNTPKL2BR	MNTPKL1BR	MNTPKH2SBR	MNTPKH1SBR
TAISコード	00054-000142	00054-000143	00054-000144	00054-000145	00054-000146	00054-000147
サイズ (cm)	幅70×長さ60					
	幅80×高さ78~85(1cm毎8段階の高さ調整)					
	トップグリップ(楕円)：4.0×3.1、ミドルグリップ(楕円)：3.1×2.8					
重量(kg)	42.2	32.8	40.4	31.9	51.7	42.3
素材	ベースプレート：スチール、外周プロテクター：特殊エラストマー、手すり部：スチール+樹脂					
価格	131,285円 (税抜価格119,350円)	95,227円 (税抜価格86,570円)	126,445円 (税抜価格114,950円)	92,807円 (税抜価格84,370円)	154,759円 (税抜価格140,690円)	118,701円 (税抜価格107,910円)

ルーツ専用オプション

タイプ	ルーツ専用保護マット B (5枚入り)			ルーツ専用保護マット (5枚入り)		
	サイドタイプ用	センタータイプ用	コーナー・ロングタイプ用	サイドタイプ用	センタータイプ用	コーナー・ロングタイプ用
品番	MNTPLBR026	MNTPSBR016	MNTPCBR016	MNTPLBR025	MNTPSBR015	MNTPCBR015
TAISコード	00054-000446	00054-000447	00054-000448	00054-000371	00054-000372	00054-000373
素材	表面：ポリエステル繊維、裏面：アクリル樹脂			表面：ポリエステル繊維、裏面：アクリル樹脂		
価格	13,189円 (税抜価格11,990円)	9,438円 (税抜価格8,580円)	13,189円 (税抜価格11,990円)	13,189円 (税抜価格11,990円)	9,438円 (税抜価格8,580円)	13,189円 (税抜価格11,990円)

あがりかまちタイプ専用ステップ台

品番	MNTPKSBR	サイズ(cm)	幅50×奥行30× 高さ12/14/16/18 (4段階の高さ調整)	重量(kg)	9.5	価格	23,474円 (税抜価格21,340円)
TAISコード	00054-000369			素材	スチール		

開発・製造 販売元	医療・福祉機器 総合メーカー	健康用品事業本部	www.molten.co.jp/health		ISO9001 認証取得
	株式会社 <b>モルテン</b>	東京/札幌/仙台/さいたま/名古屋/大阪/広島/福岡			ISO13485 認証取得
					※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、製造および付帯サービスにて取得