



# 取り扱い上の注意喚起



## 1. マニュアルモードでこのような使い方はしないでください

超ソフト

体位変換やベッドの背上げができない方、絶対安静の方などはこちらを選択してください。

除圧重視

絶対安静時など体位変換が行えない場合で、せめて圧切替だけでもしっかりと行いたい方はこちらを選択してください。



**「超ソフト」や「除圧重視」を使うときはベッドの背上げをしないでください  
お尻の圧が高くなる原因となります**


※「超ソフト」や「除圧重視」以外でベッドの背上げをする時は、必ず「背上げボタン」を押してください

## 2. 上記の使い方をした場合の事故事例

通常は接触することがない部分（セル結合部）にお尻が接触し、床ずれ発生の原因となった事例があります



ベッドの背上げ

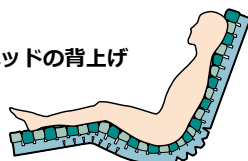

背上げボタン不使用

## 3. アンケートへのご協力をお願いします

※ URLもしくはQRコードよりご回答ください

質問  
内容

Q1：「超ソフト」や「除圧重視」の設定でベッドの背上げをしたことがありますか？

Q2：「ある」場合、背上げ角度はどの程度でしたか？ 記号でお答えください

a) 20度程度の 背上げ と ひざ上げ

b) 20度程度の 背上げのみ

c) 50度程度の 背上げ と ひざ上げ

d) 50度程度の 背上げのみ

Q3：「ある」場合、何か問題となることはありましたか？

【回答用URL】 <https://forms.office.com/r/bXm1yew57n>

