

各位

molten®  
From the Inside Out株式会社モルテン  
健康用品事業本部

## オスカーに関するお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、昨年11月より弊社ホームページにてお知らせしました、オスカー（ハイブリッドタイプ）の「取扱い上の注意喚起とアンケート」に関して、モルテンにて実施したアンケートと直接ヒアリングを含む調査結果、および一般社団法人日本褥瘡学会に協力いただいた情報収集の結果を連絡します。

製品起因による褥瘡発生と特定される事例はありませんでした

また本調査において、取扱説明書の一部が誤解を招く表現となっていることが分かりましたので、4月発行分より、下記の通り修正することをあわせて連絡します。

－ 記 －

### ■ オスカー（ハイブリッドタイプ）取扱説明書の一部修正内容

#### 1. 警告欄の変更

『マニュアルモードで「超ソフト」や「除圧重視」を使うときは、ベッドの背上げをしないでください。』を追記します

#### 2. アシストモード説明欄の変更

使用する際の状況を追記します

##### 背上げ



ベッドを背上げするときに使用します。

マニュアルモードで「超ソフト」や「除圧重視」を使うときはベッドの背上げをしないでください。

マットレスの安定性を高め、背上げ姿勢をサポートします。

体位変換実施時はマットレスが上向きになります。

※動作中はLEDランプが点灯します。

※約120分で【背上げ】が自動で解除されます。（LEDランプは消灯します）

【入】後、背抜き動作が作動します。【切】後、圧抜き動作が作動します。

自動で解除後は安全のため、必ず【上向き】になります。体位変換が必要な場合は、再度選択してください。

※手動で【切】後は、もとのマットレス状態に戻ります。

※マットレスが背上げする機能ではありません。

※120分以上継続してベッド背上げを行う場合は、120分以内に背上げモードボタンを押し直すと、都度ボタン操作を行えない場合は、マットレスかたさを1段かたい設定にしてください。

#### 3. マニュアルモード説明欄の変更

説明内容を一部修正します

##### ソフト

オスカーの標準的な(おすすめの)設定です。

ふつうよりも低圧で体を保持します。

絶対安静時など体位変換が行えない場合で、せめて圧切替だけでもしっかりと行いたい方はこちらを選択してください。

##### 除圧重視

ベッド背上げ時は使用しないでください。

身体の50%をマイクロエアセルで支え、残りの50%で除圧を行います。

※約5分間隔で2つの動作を繰り返します。

オスカーの標準的な(おすすめの)設定です。

##### 安定重視

安定感を重視したい、なるべく圧切替の動きを抑えたいという方はこちらを選択してください。

身体の75%をマイクロエアセルで支え、残りの25%で除圧を行います。

また、3D除圧で身体を優しく傾けます。

※約5分間隔で4つの動作を繰り返します。

以上

