

ナッキー取扱説明書

注意事項



警告

- ①最初に製品を使用する前に必ずマットレスを平らな場所に置いてインナーフィルムの所定箇所を裂き、マットレスを復元してください。
マットレスが復元していない状態で使用すると、マットレスが硬く適正な体圧分散性能が発揮されません。
- ②長期間(2週間以上)圧縮したまま保管しないでください。
マットレスが復元しにくくなる可能性があります。
- ③インナーフィルムは取り外さず、そのままの状態で使用してください。
- ④必ず医師や看護師、福祉用具専門相談員などの専門の方に相談してください。
- ⑤使用中、体に異常を感じたり不安を感じた場合には、直ちに使用をやめ、医師や看護師、福祉用具専門相談員などの専門の方に相談してください。
- ⑥使用後、改善が見られない場合や身体状況に合わない場合は、医師や看護師、福祉用具専門相談員などの専門の方に相談してください。
- ⑦転落・転倒のおそれがある方は、安全のためサイドレールを使用してください。
転落・転倒のおそれがある場合は、必ずサイドレールや手すりを使用してください。
また、サイドレールや手すり、マットレスの間に体がはさまれないようにしてください。
- ⑧マットレスは必ず表と裏、頭側と足元側を確認して設置してください。
寝心地を損ねたり、本来の性能が発揮されず、症状悪化などの原因になります。
- ⑨本製品はリプレイメントタイプです。必ずベッドの上へ直接設置してください。
- ⑩マットレスの上で立ち上がりたり、歩行したりしないでください。
足元が不安定になり、転落・転倒してケガをするおそれがあります。




注意

- ①マットレスの上に人や物が乗った状態で移動させないでください。
マットレスは、人や重いものが乗っていない状態で移動してください。人が転落してケガをしたり、マットレスが破損するおそれがあります。
- ②マットレスの取手は、手足を引っ掛けないように必ずシーツで巻き込んでください。
- ③熱い物の近くに置かないでください。
火災・変形・破損の原因となります。
- ④長期間マットレスの上に重量物を置かないでください。
マット表面には柔らかい素材を使用していますので、ウレタンフォームの変形やマットカバーに跡が残るおそれがあります。
- ⑤マットレスを折りたたんで保管しないでください。
マットレスの変形・破損の原因となります。
- ⑥マットカバーを開いたまま使用しないでください。
マット内部に水分などが入り込み、マットレスの汚染や破損する原因となります。
- ⑦直射日光の当たる場所では保管しないでください。
直射日光に当てると材質・色などが変化することがあります。
- ⑧本来の目的以外に使用しないでください。
本来の目的以外に使用すると、思わぬ事故やケガにつながるおそれがあります。
- ⑨マットレスの修理・改造はしないでください。
思わぬ事故やケガ・破損の原因となります。
- ⑩インナーマットは洗淨しないでください。

各部名称および設置方法

- ① マットカバー
- ② インナーフィルム

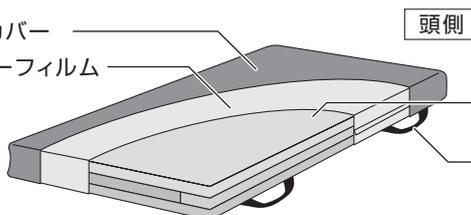

頭側

足元側

マットレスを平らな場所に置いてインナーフィルムの黄枠部分を裂き、マットレスを復元してください。

(マットレスは数十秒で復元されます)

※インナーフィルムは取り外さず、そのままの状態で使用してください。



⑤ 裂き口

※ベッドの上に直接敷いて使用してください。

※サイドレールを必ず使用し、シーツを掛けて使用してください。

