


## 静止型マットレス Nussaw(ナッソー)取扱説明書


- 83cm幅レギュラーサイズ/品番: MNUS1383
- 91cm幅レギュラーサイズ/品番: MNUS1391

### 各部名称および設置方法

#### 各部名称

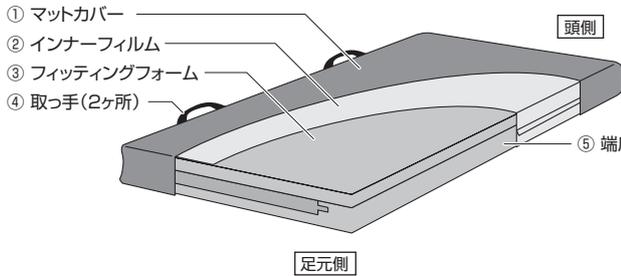


【マットレス内部構造】

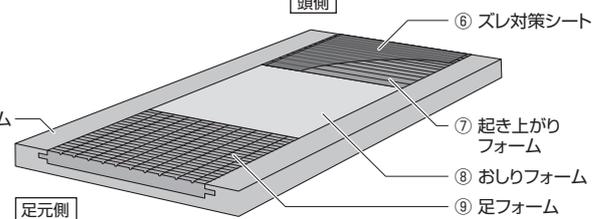

**警告**


インナーフィルムは取り外さず、そのままの状態  
で使用してください。

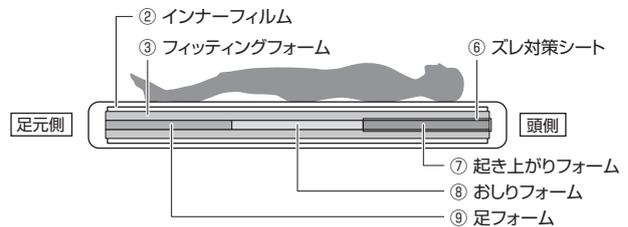

#### 設置方法


① マットレスのロゴマークを表(寝る側)の足元側  
にして設置します。

② シーツを取り付けて完成です。  
※シーツやパッドは強く巻き  
込まないでください。

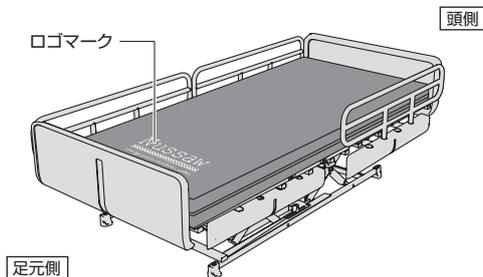

**警告**

転落・転倒のおそれがある場合  
は、安全のためサイドレールを  
使用してください。

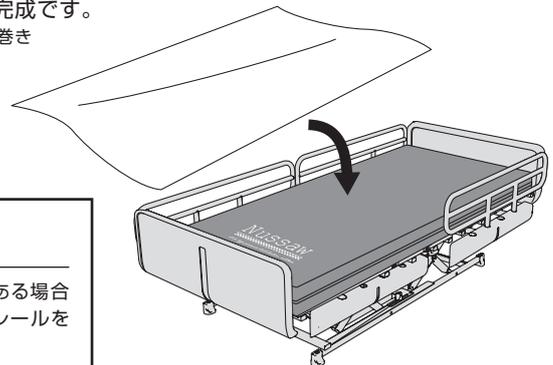

### お手入れ方法



: してはいけない「禁止」を意味します。



: 必ず実行していただく「強制」を意味します。

#### 汚れの落とし方

汚れが少ない場合は、マットカバー表面を水またはお湯を染み込ませた布で汚れた部分を拭き取って  
ください。もしくは市販の中性洗剤やアルコールを布に含ませて清拭してください。

汚れがひどい場合は、マットカバーを取り外し、洗濯機などで丸洗い洗浄してください。

洗浄後は乾燥機による乾燥または陰干ししてください。

インナーフィルムは中性洗剤、またはアルコールを布などに含ませて汚れを取り除いてください。



○ シンナーやベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。

○ 酸性洗剤は素材を傷めるおそれがあるので使用しないでください。

○ 漂白剤は色落ちや変色の原因になるので使用しないでください。

○ マットカバーが縮むおそれがあるのでドライクリーニングはしないでください。

① マットカバーを洗濯機で洗う場合は、キズが付くおそれがあるのでネットを使用してください。

① マットカバーを洗浄・乾燥する場合は、縮むおそれがあるので洗浄水温は40℃以下、乾燥温度  
は80℃以下で行ってください。


① 塩素系洗剤を使用する場合は、変色するおそれがあるので200~300倍に薄めて使用してく  
ださい。

※ マットカバーはロゴマークが上部フォーム側および足元側にくるように取り付けてください。



### 消毒のしかた

消毒薬やアルコールを噴霧または布に染み込ませて清拭してください。  
消毒装置を使用する場合は、分解せず平置きの状態または横向きに立てた状態で曲げずに装置に入れてください。  
温度設定は《80℃》に設定してください。

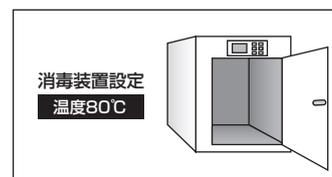

- Ⓛ マットレスを消毒装置に入れる場合は、変形や破損のおそれがあるので、80℃以上の温度にしないでください。
- Ⓛ マットレスをオゾン消毒する場合は、ウレタン層が劣化するおそれがあるので、高濃度(5ppm以上)で長時間の消毒は行わないでください。

### お手入れ後の保管

- Ⓛ 変形や破損のおそれがあるので、重量物を上に置いたまま保管しないでください。
- Ⓛ 折りたたんだり、丸めたりしないでください。
- ① カビなどが発生するおそれがあるので、汚れを取り除き、よく乾燥させてから保管してください。
- ① 材質や色が変わるおそれがあるので、直射日光に当たらない場所で保管してください。

### 注意事項



#### 警告

- ① インナーフィルムは取り外さず、そのままの状態で使用してください。
- ② 必ず医師や看護師、福祉用具専門相談員などの専門の方に相談してください。
- ③ 使用中、体に異常を感じたり不安を感じた場合には、直ちに使用をやめ、医師や看護師、福祉用具専門相談員などの専門の方に相談してください。
- ④ 使用后、改善が見られない場合や身体状況に合わない場合は、医師や看護師、福祉用具専門相談員などの専門の方に相談してください。
- ⑤ 転落・転倒のおそれがある方は、安全のためサイドレールを使用してください。  
転落・転倒のおそれがある場合は、必ずサイドレールや手すりを使用してください。  
また、サイドレールや手すと、マットレスの間に体がはさまれないようにしてください。
- ⑥ マットレスは必ず表と裏、頭側と足元側を確認して設置してください。  
寝心地を損ねたり、本来の性能が発揮されず、症状悪化などの原因になります。
- ⑦ 本製品はリプレイメントタイプです。必ずベッドの上へ直接設置してください。
- ⑧ マットレスの上で立ち上がりたり、歩行したりしないでください。  
足元が不安定になり、転落・転倒してケガをするおそれがあります。



#### 注意

- ① マットレスの上に人や物が乗った状態で移動させないでください。  
マットレスは、人や重いものが乗っていない状態で移動してください。人が転落してケガをしたり、マットレスが破損するおそれがあります。
- ② マットレスの取手は、手足を引っ掛けないように必ずシートで巻き込んでください。
- ③ 熱い物の近くに置かないでください。  
火災・変形・破損の原因となります。
- ④ 長期間マットレスの上に重量物を置かないでください。  
マット表面には柔らかい素材を使用していますので、ウレタンフォームの変形やマットカバーに跡が残るおそれがあります。
- ⑤ マットレスを折りたたんで保管しないでください。  
マットレスの変形・破損の原因となります。
- ⑥ マットカバーを開いたまま使用しないでください。  
マット内部に水分などが入り込み、マットレスの汚染や破損の原因となります。
- ⑦ 直射日光の当たる場所では保管しないでください。  
直射日光に当たると材質・色などが変わることがあります。
- ⑧ 本来の目的以外に使用しないでください。  
本来の目的以外に使用すると、思わぬ事故やケガにつながるおそれがあります。
- ⑨ マットレスの修理・改造はしないでください。  
思わぬ事故やケガ・破損の原因となります。
- ⑩ インナーマットは洗淨しないでください。

### 仕様

#### ナッソー

- 素材 カバー：ウレタン合皮(防水仕様)※抗菌加工  
インナーフィルム：ウレタンフィルム  
ズレ対策シート：ナイロン  
インナーマット：ウレタンフォーム

〔83cm幅レギュラーサイズ〕 サイズ：幅83×長さ191×厚さ13cm 重量：8.1kg  
〔91cm幅レギュラーサイズ〕 サイズ：幅91×長さ191×厚さ13cm 重量：9.0kg

■ 静止型マットレス ■ リプレイメントタイプ

#### 開発・製造元

ISO9001 認証取得  
ISO13485 認証取得  
※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、  
製造および付帯サービスにて取得  
本製品の取扱説明書は下記QRコード  
からダウンロードいただけます。



取扱説明書

#### 株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部  
[www.molten.co.jp/health](http://www.molten.co.jp/health)  
東京 札幌 仙台 埼玉 名古屋 大阪 広島 福岡  
製品他、各種お問い合わせは  
〒733-0036 広島市西区観音新町四丁目10-97-21  
**TEL.082-578-9226**  
E-mail:health@molten.co.jp

〈電話による受付時間〉月曜日～金曜日/9:00～17:00  
※ 祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休業日など弊社休業日を除く