

取扱説明書

注意事項

❗ : 必ず実行していただく「強制」を意味します。



注意

- ① 中身のクッションビーズを食べないでください。
- ② 火気・高温の近くで使用しないでください。
火災・変形の原因になります。
- ③ 長期間クッションの上に重量物を置かないでください。
変形の原因になります。
- ④ 直射日光の当たる場所で保管しないでください。
変形・変色の原因になります。

お手入れ方法

汚れの落とし方

まくらを洗濯機などで丸洗い洗浄してください。
洗浄後は、乾燥機または天日干ししてください。

- ① 水温40℃以上での洗浄は、外カバーが縮むおそれがあります。
- ① 外カバーを繰り返し洗浄すると、ポリエステル繊維表面に傷がつき黒い汚れが付着することがあります。
- ① 乾燥機の設定は、クッションビーズが変形するおそれがあるので《80℃で20分以内》に設定してください。

消毒のしかた

- ① 塩素系洗剤(次亜塩素酸ナトリウム)を使用する場合は、外カバーやクッションビーズが劣化するおそれがあるので200～300倍に薄めて使用してください。
- ① オートクレープなどの高温消毒装置は、クッションビーズが変形するおそれがあるので使用しないでください。
- ① 《80℃で10分》の熱湯による消毒が可能です。必要以上の高温、長時間の熱湯による消毒はクッションビーズが変形、劣化するおそれがあるのでおやめください。

株式会社 モルテン 健康用品事業本部 お客様窓口 TEL(082)578-9226

〈電話による受付時間〉月曜日～金曜日/9:00～17:00 ※祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休業日など弊社休業日を除く

仕様

ドリーマ

品番 MDRML

- 素 材：クッションビーズ=ポリエチレン
中メッシュ=ポリエステル
外カバー=ポリエステル
- サイズ：53×33cm ●重 量：1.2kg

オプション

- 〔外カバー単体〕 品番 MDRMLCV
- 〔オプションカバー〕 品番 MPHOPL
- ※外カバーにかぶせる専用カバー(ピローケース)
- 素 材：ポリエステル65%・綿35%

開発・製造元

ISO9001 認証取得
ISO13485 認証取得
※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、
製造および付帯サービスにて取得

本製品の取扱説明書は下記QRコード
からダウンロードいただけます。



取扱説明書

株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部

www.molten.co.jp/health

東京 札幌 仙台 埼玉 名古屋 大阪 広島 福岡

製品部 各社お問い合わせ

〒733-0036 広島市西区観音新町四丁目10-97-21

TEL.082-578-9226

E-mail:health@molten.co.jp

〈電話による受付時間〉月曜日～金曜日/9:00～17:00
※祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休業日など弊社休業日を除く