

取扱説明書

注意事項



注意

- ① 火気・高温の近くで使用しないでください。
火災・変形・変色の原因となります。
- ② 直射日光の当たる場所で保管しないでください。
変形・変色の原因となります。

使用方法

「すき間を埋める」「重なる部分に挟む」ことで体圧を分散


クッションでは埋めにくい小さな隙間に合わせて、ポジパッドを丸めたり、折りたたんで入れることで体圧分散性を向上させ、楽な姿勢を作ります。
腕や脚が重なる部分には緩衝材としてはさみ、体がこすれ合うことを防ぎ、局所にかかる体圧を分散させます。

〈ポジショニングケアでの使用例〉



カバーのファスナータグについて

クッションの中身を誤飲するおそれのある利用者様に使用するなど、ファスナーを簡単に開けたくない場合は、タグを切り取りスライダーの取っ手をゴムバンドの内側に入れてください。

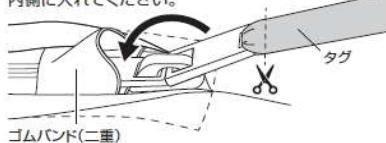

お手入れ方法

外カバー

外カバーを取り外して洗濯機などで洗浄してください。
洗浄後は、乾燥機または陰干ししてください。

- ① 《水温40℃以上》での洗浄は、カバーが縮むおそれがあります。
- ① 乾燥は《80℃以下》で行ってください。
- ① 熱水消毒は《80℃以下》で消毒してください。
※熱水消毒を行うと、カバー生地が収縮することがあります。

インナーバッグ・インナークッション

消毒用アルコールや消毒薬をインナーフィルム全体に噴霧、または布にしみ込ませて清拭してください。

- ① 消毒薬は使用方法、注意事項をよくお読みの上、ご使用ください。
※塩素系消毒薬などの漂白効果のある薬剤を使用した場合、色落ちすることがあります。
- ① インナーバッグ、インナークッションは洗わないでください。
- ① オートクレープでの消毒はおやめください。

仕様

ポジパッド

品番 バスタオル：MPTWB（ブルー）／MPTWB-Z（ピンク）
フェイスタオル：MPTWF（ブルー）／MPTWF-Z（ピンク）

●素材 インナークッション：ウレタンフォーム インナーバッグ：ポリウレタン

外カバー：ポリエステル+ナイロン

バスタオルサイズ

●サイズ 幅50×長さ120cm

フェイスタオルサイズ

●サイズ 幅30×長さ80cm