


床置き型手すり **ハーツ**

【廊下～玄関内用】

取扱説明書

目 次

○梱包内容	・ ・ ・ ・ ・ P 1
○タイプ(品番)別梱包内容一覧表	・ ・ P 1
○各部名称	・ ・ ・ ・ ・ P 2
○組み立て方法	・ ・ ・ ・ ・ P 3
○点検項目	・ ・ ・ ・ ・ P 6
○このようなときには	・ ・ ・ ・ ・ P 7
○お手入れ方法	・ ・ ・ ・ ・ P 8
○運搬・保管方法	・ ・ ・ ・ ・ P 8
○注意事項	・ ・ ・ ・ ・ P 9
○各部寸法	・ ・ ・ ・ ・ P 10
○仕様	・ ・ ・ ・ ・ P 11

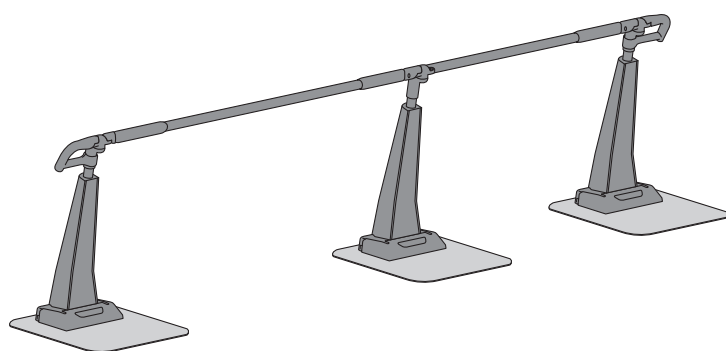

安全にお使いいただくために

この度は当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後もいつでも見られる場所に大切に保管してください。利用者様の健康状態や体調が変化した場合には医師や看護師、福祉用具専門相談員などの専門の方に相談した上でご使用ください。利用者様の身体状態、設置場所を十分確認し、安全であることを確認してからご使用ください。

安全上の注意 必ずお守りください

- ①利用者様や他の人への危害・財産への損害などを未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
取扱説明書に表示されている記号や用語は、表示内容を見逃し誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次のような表示区分であらわしています。

 **警告**：死亡または重傷などを負う可能性を意味します。

 **注意**：障害を負うまたは物的損害を発生させる可能性を意味します。

注意：本製品の故障を防止するための注意事項や、より満足に使用していただくためのアドバイスを意味します。

- ②お守りいただく内容の種類を次の表示区分であらわしています。


：してはいけない「禁止」を意味します。

：必ず実行していただく「強制」を意味します。

梱包内容

以下の部品がすべて揃っているか、破損・変形などしていないか確認してください。
お買い求めいただいたタイプ(品番)によって梱包内容が異なるので、右の一覧表をご参考ください。
万が一、部品の不足・破損があった場合は、お買い求めいただいた販売店にご連絡ください。

支柱付ベースプレート

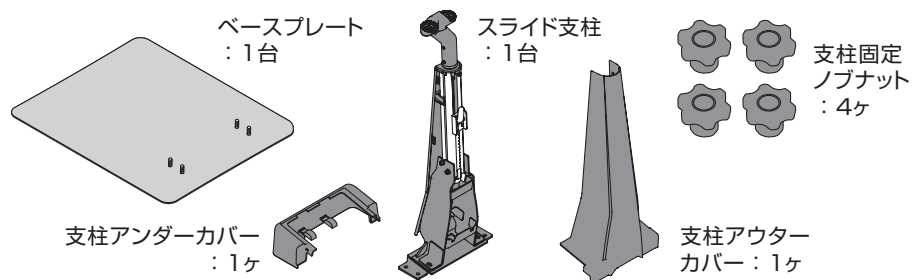

付属品




取扱説明書
兼 保証書
: 1部

伸縮手すり

伸縮手すりAタイプ(524~684mm)
伸縮手すりBタイプ(687~847mm)

伸縮手すりCタイプ(847~1,007mm)
伸縮手すりDタイプ(1,006~1,308mm)

※端部の識別シールで識別が可能です。

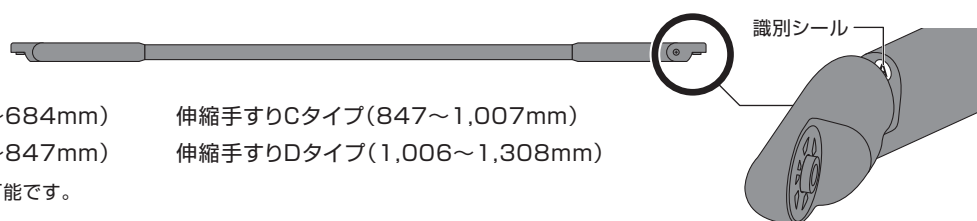


エンドグリップセット




タイプ(品番)別梱包内容一覧表

タイプ/品番	支柱付き ベースプレート	伸縮手すり	エンドグリップ セット
113タイプ/MNTPHT12A	2	Aタイプ×1	1
128タイプ/MNTPHT12B	2	Bタイプ×1	1
144タイプ/MNTPHT12C	2	Cタイプ×1	1
160タイプ/MNTPHT12D	2	Dタイプ×1	1
W189タイプ/MNTPHT13AA	3	Aタイプ×2	1
W205タイプ/MNTPHT13AB	3	Aタイプ×1・Bタイプ×1	1
W221タイプ/MNTPHT13AC	3	Aタイプ×1・Cタイプ×1	1
W238タイプ/MNTPHT13AD	3	Aタイプ×1・Dタイプ×1	1
W254タイプ/MNTPHT13BD	3	Bタイプ×1・Dタイプ×1	1
W286タイプ/MNTPHT13DD	3	Dタイプ×2	1
W316タイプ/MNTPHT14ABC	4	Aタイプ×1・Bタイプ×1・Cタイプ×1	1

各 部 名 称

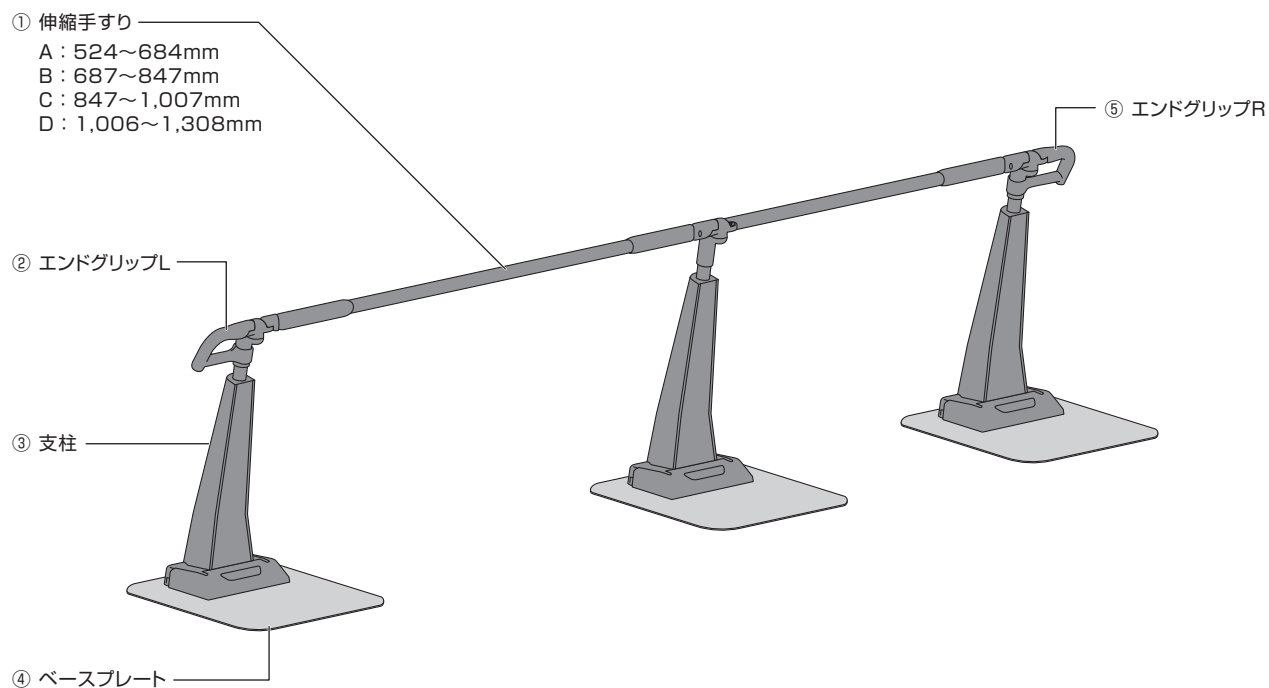

【支柱(背面側)】

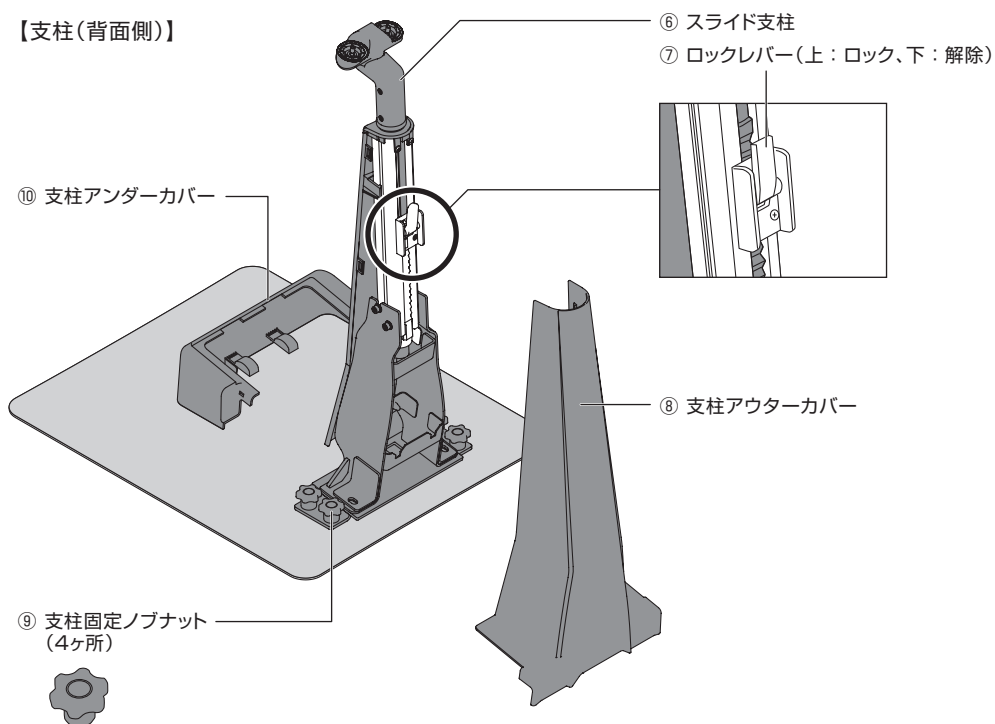


組み立て方法

ハーツ【廊下～玄関内用】は現地での組み立てが必要となります。


重量がありますので、ケガをしないように平らな場所で以下の手順で組み立ててください。

※5mmの六角レンチが必要です。 ※工具は付属していません。

1 支柱の組み立て

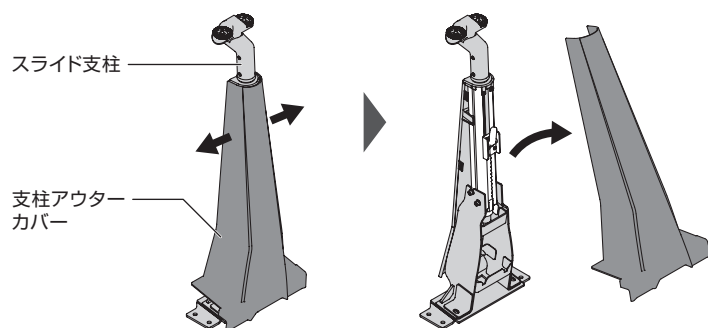


- ①支柱アウターカバーの上側の両端を持って開きながらスライド支柱から外します。

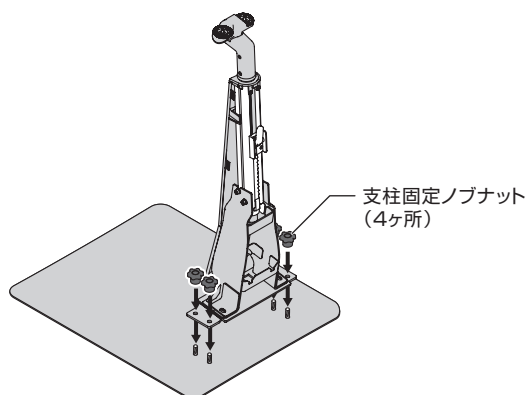

- ②スライド支柱をベースプレートのボルト位置に合わせて置き、ノブナットで固定します (4ヶ所)。


2 エンドグリップを取り付ける

※ベースプレート側からの視点(支柱が奥側)となります。

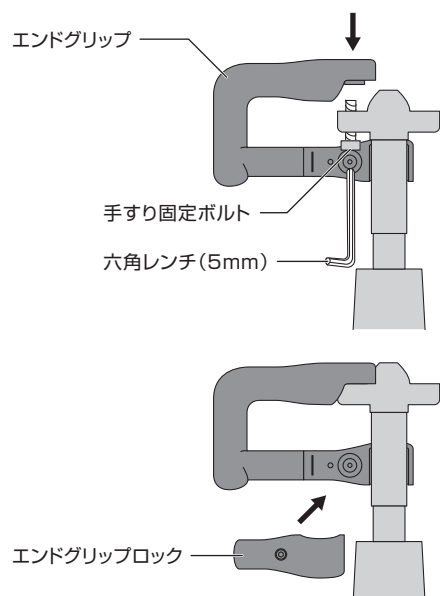


- ①支柱のジョイント部とエンドグリップ端部の位置を合わせ、手すり固定ボルトを下から差し込んで5mmの六角レンチでしっかりとめて固定します。

- ②エンドグリップのブラケットカバーを取り付け、手すり固定ボルトを5mmの六角レンチでしっかりとめて固定します。

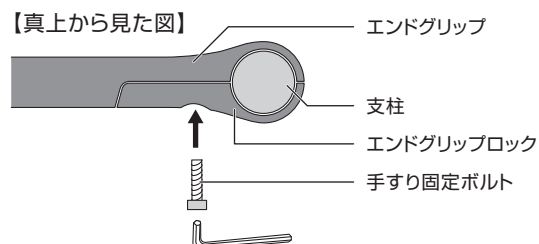


3 手すりの高さ調整方法

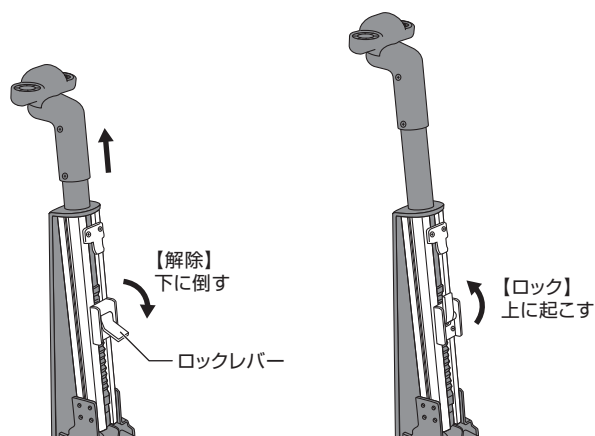

- ① ロックレバーを下に倒して解除し、スライドレールをスライドさせて高さ調整を行います。
- ② 高さを合わせたらロックレバーを上を起こしてロックします。


支柱の高さが
合わせやすい
目盛り付き

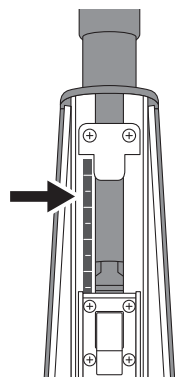

【フィッティング方法】


右図のように立ったとき、腰（大転子）の位置に手すりの上端がくるように高さを合わせます。

※高さ調整方法はあくまでも目安です。用途や利用者様に最適な位置に合わせてください。

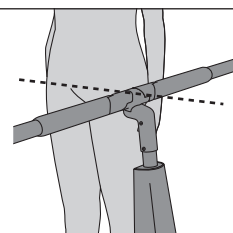


4 カバーの取り付け方法

支柱アンダーカバーの取り付け

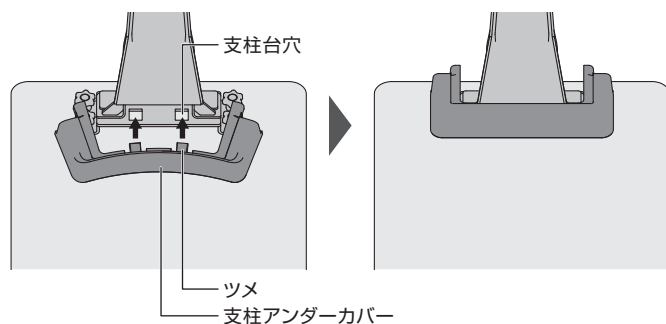


支柱アンダーカバーを左右に広げながら支柱台穴とカバーのツメの位置を合わせて取り付けます。

【正しく取り付けられた状態（反対側から）】

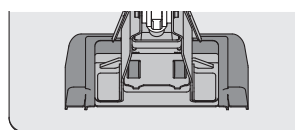


【取り外す場合】

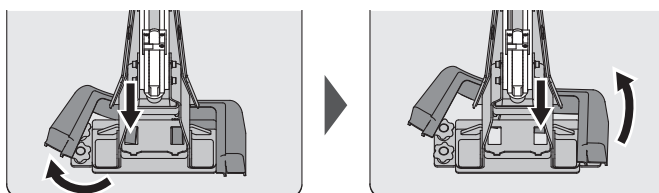

- ① 片方のツメを押しながら支柱アンダーカバーを外側に広げるように外します。
- ② 反対側も同様にして取り外します。


組み立て方法

支柱アウターカバーの取り付け

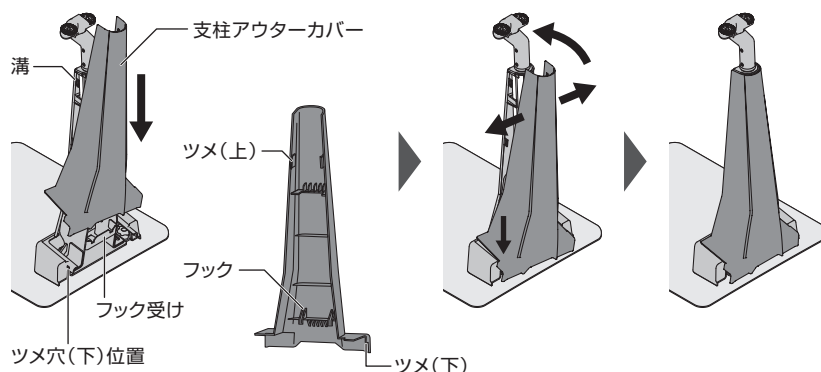

- ① 支柱アウターカバー内側のフックを支柱プレートに引っ掛けるように取り付け、下側のツメをとめます。
- ② 上部の両端を開きながら支柱にかぶせ、ツメを支柱の溝に入れます。

5 ベースプレートを設置する

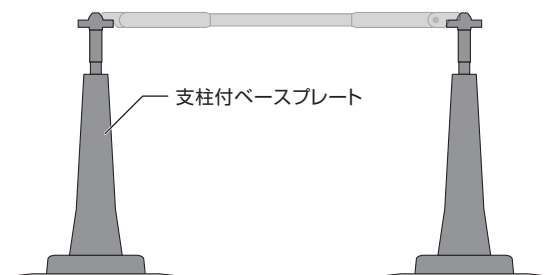

支柱付ベースプレートを、使用する手すりの長さに合わせて置きます。


※手すり長さは調整可能です。(16cm)

※手すりは左右角度45度まで調整可能です。




警告

- ① 支柱と伸縮手すりの水平方向の角度が45度以上になる場合は、設置しないでください。
- ② 支柱付ベースプレートが平行に設置できない、水平に置けない、床からはみ出す場合は、設置しないでください。

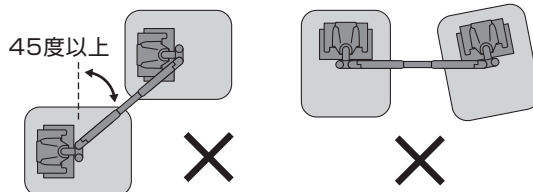


6 伸縮手すりを取り付ける

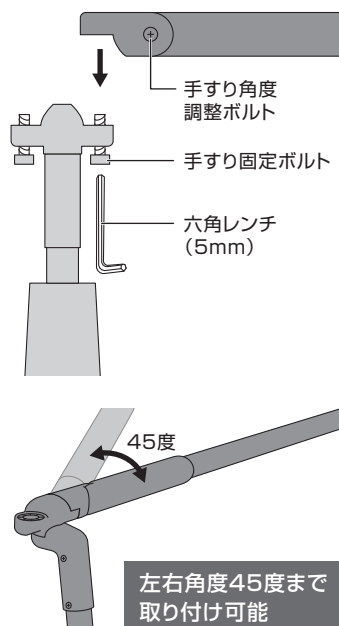

- ① 手すり端部の手すり角度調整ボルトを5mmの六角レンチでゆるめます。
- ② 支柱ジョイント部と手すり端部の位置を合わせ、手すり固定ボルトを下から差し込んで5mmの六角レンチでしっかりとめて固定します。
- ③ 手すり角度と手すり長さを調整し、角度→長さの順でボルトをしめて固定します。

【手すり長さの調整方法】(調整幅：片側8cmずつ、合計16cm)

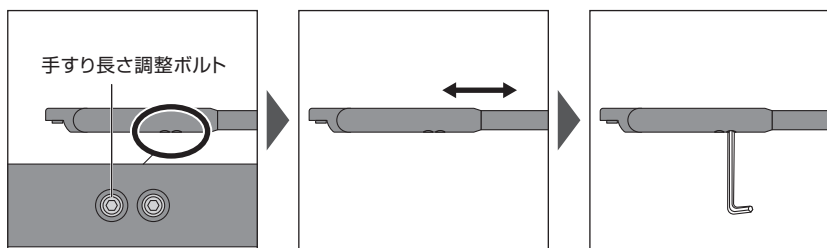

- ① 手すり端部の下部にある固定ボルトを5mmの六角レンチでゆるめます。
- ② ジョイント部をスライドして長さを調整します。
- ③ ゆるめておいた固定ボルトをしっかりとめます。


点検項目

●ハーツ【廊下～玄関内用】チェックシート

下記の点検項目を確認してください。

異常があった場合は、お求めの販売店または㈱モルテン健康用品事業本部お客様窓口までご相談ください。

点検項目		確認	
1	各部のガタつきの確認 ・手すりに力をかけたときに、伸縮手すり・エンドグリップ・支柱・ベースプレートにガタつきがありませんか？	YES ☐	NO
2	伸縮手すり・エンドグリップの各種固定ボルトの確認 ・伸縮手すりのジョイント部、長さ調整部、角度調整部の固定ボルトがゆるんでいませんか？ ・エンドグリップのジョイント部、ブラケット固定部の固定ボルトがゆるんでいませんか？	YES ☐	NO
3	支柱固定ノブナット、ロックレバーの確認 ・支柱固定ノブナットがゆるんでいませんか？ ・ロックレバーはしっかりと上に起きていますか？	YES ☐	NO
4	ベースプレートの確認 ・ベースプレートにゆがみなどの異常はありませんか？ ・著しい塗装のはがれなどはありませんか？ ・ベースプレート同士が平行になるように設置されていますか？ ・ベースプレートが床からはみ出していませんか？	YES ☐	NO

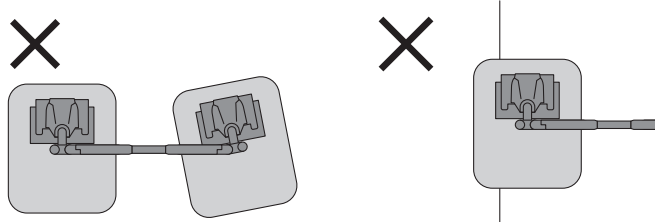

このようなときには

症 状	確 認	処 置
手すりに ガタつきがある	手すりのジョイント部・長さ調整部・ 角度調整部の固定ボルトがゆるんで いませんか？	各ボルトの増しじめを行ってください。
	エンドグリップのジョイント部・ エンドグリップロックの固定ボルトが ゆるんでいませんか？	各ボルトの増しじめを行ってください。
	ロックレバーはロックされていますか？	ロックレバーをしっかり上に起こしてロックして ください。(P4参照)
	支柱固定ノブナットがゆるんで いませんか？	支柱固定ノブナットを増しじめしてください。 (P3参照)
	ベースプレートが床からはみ出して いませんか？	ベースプレートは床からはみ出さないように 設置してください。
手すりが かたむいたまま 戻らない	手すりや支柱、ベースプレートが 変形していたり、破損していませんか？	使用を中止し、お求めの販売店または(株)モルテン 健康用品事業本部お客様相談窓口までご相談くだ さい。
	支柱固定ノブナットがゆるんで いませんか？	支柱固定ノブナットを増しじめしてください。 (P3参照)
手すりが かたむいたまま 戻らない	手すりや支柱、ベースプレートが 変形していたり、破損していませんか？	使用を中止し、お求めの販売店または(株)モルテン 健康用品事業本部お客様相談窓口までご相談くだ さい。
	支柱固定ノブナットがゆるんで いませんか？	支柱固定ノブナットを増しじめしてください。 (P3参照)



警告

使用中にゆるみやガタつきが発生した場合は、使用を中止し必ず貸与事業所へ相談してください。

上記の処置で直らなかった場合、またはその他の現象の場合は、お求めの販売店または
(株)モルテン 健康用品事業本部 お客様窓口までご相談ください。

株式会社 モルテン 健康用品事業本部 お客様窓口
TEL(082)578-9226

〈電話による受付時間〉月曜日～金曜日／9:00～17:00 ※祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休業日など弊社休業日を除く

お手入れ方法

汚れの落とし方

柔らかい布で乾拭きするか、水拭きしてください。

汚れがひどい場合は、中性洗剤を水で薄めて柔らかい布に浸し、よく絞ってから清拭してください。

仕上げに水拭きしてください。

水拭きした後は、乾いた布で水分をふき取ってください。

使用前に手すりやベースプレートがすべらないか、必ず確認して使用してください。



消毒のしかた

アルコール消毒剤や次亜塩素酸ナトリウム消毒剤で清拭消毒してください。

上記以外の消毒剤を使用する場合や、製品全体の消毒を行う場合は、お求めの販売店にご相談ください。

⓪ 次亜塩素酸ナトリウム消毒剤を使用する場合は、0.1%以下に希釈して清拭し、仕上げに水拭きしてください。

⓪ オゾンガスおよびホルムアルデヒドガスは使用しないでください。

⓪ 60℃以上の温度を加えないでください。

運搬・保管方法

運搬方法

運搬する場合は、伸縮手すりを支柱から取り外して別々に運んでください。



警告

①組み立てた状態で運ばないでください。

②車両で運搬する場合は、上に重量物を重ねたり、不安定な積み方で運搬しないでください。



注意

伸縮手すりを支柱から外す場合は、ジョイント部の固定ボルト／ネジをゆるめて取り外してください。

手すり長さ調整ボルトと手すり角度調整ボルトは取り外さないでください。

保管方法

汚れを取り除き、よく乾燥させて保管してください。

直射日光の当たらない場所で保管してください。(材質、色が変わるおそれがあります)

湿気の多い場所では保管しないでください。(サビ、カビ発生の原因になります)

手すりを重ねて置いたり、不安定な状態での立て置き保管はしないようにしてください。

ハーツ【廊下～玄関内用】は置くだけで使え、玄関まわりでの行動範囲を広げる床置き型手すりです。
下記内容を必ず守って使用してください。



警告

- ① **利用者様の身体状態を十分に確認し、安全に使用できることを確認してから使用を開始してください。**
介助が必要な場合は、必ず介助者が付き添って使用してください。
- ② **他社製品と連結して使用しないでください。**
手すりが変形・破損したり不安定になり転倒し、ケガをするおそれがあります。
- ③ **製品に異常がある場合は、使用しないでください。**
使用中不安定になり転倒し、ケガをするおそれがあります。
- ④ **最大利用者体重を守ってください。**
最大利用者体重は100kgです。
- ⑤ **支柱固定ノブナットや手すりのジョイント部固定ボルトなどがゆるんだ状態で使用しないでください。**
設置後や定期点検時に各部のノブナット・固定ボルトの締め具合をしっかりと確認してください。ゆるみあがる場合は、締め直してください。
- ⑥ **利用者様の動線を十分に検討しないまま設置しないでください。**
本来の性能を発揮することができません。利用者様の動線に合わせて最適な位置に設置してください。
- ⑦ **手すりの高さや位置を利用者様の身体状態に合わせないまま設置しないでください。**
手すりの高さや位置は利用者様の身体状態に合わせ、最適な設定と設置を行ってください。
身体状態に合わない無理な高さや位置で使用すると体を痛める原因や、転倒しケガをするおそれがあります。
無理な姿勢で使用すると過大な負荷が発生し、転倒するおそれがあります。
- ⑧ **利用者様がベースプレートの上を通るように設置してください。**
反対側から手すりを使用すると手すりが不安定になり、ケガをするおそれがあります。
- ⑨ **滑りやすい床や土間などのやわらかい床の上に設置しないでください。**
使用中不安定になり転倒し、ケガをするおそれがあります。
- ⑩ **マットレスやクッションなどの柔らかい物の上に設置して使用しないでください。**
使用中不安定になり転倒し、ケガをするおそれがあります。
- ⑪ **ベースプレート同士が平行に設置できない、水平に置けない、床からはみ出すなどの場合は、設置しないでください。**
- ⑫ **手すりの角度が左右・上下ともに45°以上になる場合は、設置しないでください。**
- ⑬ **屋外や風呂場など、風雨にさらされたり水気のある場所では使用しないでください。**
- ⑭ **手すり・支柱の間に頭・体・手足を入れないでください。**
- ⑮ **2人以上で同時に手すりを使用しないでください。**
手すりが不安定になり転倒し、ケガをするおそれがあります。
- ⑯ **手すりを横から引っ張ったり体をぶつけたりしないでください。**
手すりが不安定になり転倒し、ケガをするおそれがあります。
また、ベースプレートが持ち上がり、床面とのすき間に足の指などをはさみ込み、ケガをするおそれがあります。
- ⑰ **手すりに座ったり、ぶら下がったり、踏み台にしないでください。**
通常の使用状態以上の力や衝撃が加わると、変形したり破損するおそれがあります。また転倒し、ケガをするおそれがあります。
- ⑱ **ベースプレートや足が濡れた状態でベースプレートの上を歩かないでください。**
足が滑り、転倒してケガをするおそれがあります。


注意事項



注意

- ① 本来の目的以外には使用しないでください。
本来の目的以外に使用すると製品が破損したりして思わぬケガをするおそれがあります。
- ② お客様による分解・改造は行わないでください。
変形・破損の原因となり、ケガをするおそれがあります。
不具合が生じた場合は、必ずお求めの販売店または㈱モルテン健康用品事業本部お客様窓口までご相談ください。
- ③ 製品を移動させる場合には、伸縮手すりを外してから行ってください。
伸縮手すりを取り付けたまま移動すると、伸縮手すりや支柱が破損するおそれがあります。
- ④ 火気を近付けたり、ストーブ、ファンヒーターなどのそばで使用しないでください。
火気やストーブ、ファンヒーターの熱などにより製品を破損したり、火災につながるおそれがあります。
- ⑤ 有機溶剤やスプレータイプの殺虫剤などを直接噴射しないでください。
お手入れは本取扱説明書のお手入れ方法以外のやり方では行わないようにしてください。
消毒する場合は、柔らかい布などに消毒剤を付けてから清拭し、必ず仕上げに水拭きしてください。
有機溶剤などお手入れに適さない物は、使用しないでください。
- ⑥ 介護者など付き添いが必要な方が使用する場合は、十分注意してください。
介護者など付き添いが必要な方が使用する場合は、必ず付き添いの方と一緒に使用してください。
- ⑦ 床とベースプレートとの段差でつまずかないように十分注意してください。
床とベースプレートには段差があります。段差でつまずいて転倒しないように十分注意してください。
また、すり足で歩行される方が使用する場合は、十分注意してください。
- ⑧ ベースプレートが濡れたり、結露した状態で使用しないでください。
ベースプレートやその周辺にカビを発生させる原因になります。必ずふき取り乾いた状態で使用してください。

各部寸法

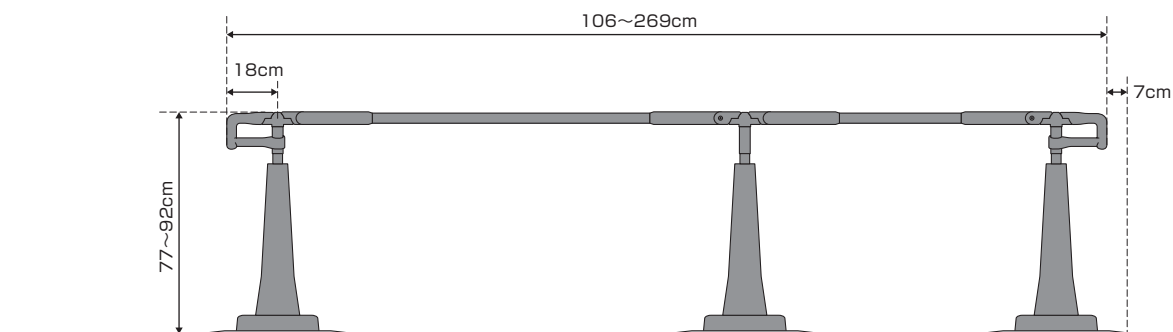

【段差設置時の目安】

段差数	支柱間距離	設置可能な段差高さ
Aタイプ	70~76cm	0~23cm
	76~85cm	0~3cm
Bタイプ	85~100cm	0~17cm
Cタイプ	102~116cm	0~14cm
Dタイプ	118~123cm	0~36cm
	123~132cm	0~12cm

【手すり全長】

113タイプ	106~120cm	W189タイプ	176~205cm	W254タイプ	240~269cm
128タイプ	122~136cm	W205タイプ	192~221cm	W286タイプ	272~301cm
144タイプ	138~152cm	W221タイプ	208~237cm	W316タイプ	294~337cm
160タイプ	153~168cm	W238タイプ	224~253cm		

仕様

ハーツ【廊下～玄関内用】

品番 MNTPHT12A(113タイプ)／MNTPHT12B(128タイプ)／MNTPHT12C(144タイプ)／
MNTPHT12D(160タイプ)／MNTPHT13AA(W189タイプ)／MNTPHT13AB(W205タイプ)／
MNTPHT13AC(W221タイプ)／MNTPHT13AD(W238タイプ)／MNTPHT13BD(W254タイプ)／
MNTPHT13DD(W286タイプ)／MNTPHT14ABC(W316タイプ)

- 素 材：手すり部=アルミ+樹脂、支柱=鉄+アルミ+樹脂、ベースプレート=鉄+塗装
- 本 体 サ イ ズ：製品全体=全長120～351×全幅60×全高77～92cm(平面設置時)
ベースプレート=幅60×奥行50cm
手すり部直径=3.5cm
- 重 量：72.9kg(W316タイプ)
- 最大利用者体重：100kg

■1年保証

開発・製造元

ISO9001 認証取得
ISO13485 認証取得
※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、
製造および付帯サービスにて取得
本製品の取扱説明書と使用方法動画は
下記QRコードからダウンロードいた
できます。



取扱説明書



動画で見る製品情報

株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部

www.molten.co.jp/health

東京 札幌 仙台 埼玉 名古屋 大阪 広島 福岡
製品他、各種お問い合わせは

〒733-0036 広島市西区観音新町四丁目10-97-21

TEL.082-578-9226

E-mail:health@molten.co.jp

《電話による受付時間》月曜日～金曜日／9:00～17:00

※祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休業日など弊社休業日を除く

[2023.01]