

床置き型手すり ルーツ カインドグリップ取扱説明書

【サイドタイプ】【センタータイプ】【ロングタイプ】【コーナータイプ】【スモールタイプ】

※ルーツ本体の取扱いについては、ルーツ各種の取扱説明書をご参照ください。

安全上の警告・注意事項



警告

- ①手すりを横から引っ張ったり体をぶつけたりしないでください。
手すりが不安定になり転倒し、ケガにつながるおそれがあります。
- ②最大利用者体重を超える人が使用したり、無理な荷重を加えることはしないでください。(最大使用者体重100kg)
手すりが破損したり、不安定になり転倒してケガにつながるおそれがあります。
- ③手すりの間に腕などを入れたまま、電動ベッドの背上げや昇降動作を行わないでください。
腕などがはさまれてケガにつながるおそれがあります。必ず確認してベッドを操作してください。
- ④ルーツ カインドグリップの手すり部が動いていたり外れている場合は使用しないでください。
不安定になり転倒し、ケガにつながるおそれがあります。
- ⑤火器に近づけたり、ストーブ、ファンヒーターのそばで使用しないでください。
熱によってカインドグリップや手すり表面が変形したり、火災につながるおそれがあります。

注意

- ①炎天下の車の中など、高温環境下で長時間の保管や手すりを重ねて置いたり、不安定な状態での立て置き保管はしないでください。
カインドグリップが変形する原因となります。

使用方法

さまざまな立ち上がり・歩行動作をより安全にします。

1 立ち上がり／立位保持時の基本動作3パターン

【設置場所】
ベッドサイドや玄関、
いす周りなど



腕を置く



手のひらを置く



指をかける

2 歩行時の基本動作2パターン

【設置場所】
ベッドサイドや玄関、
廊下など



手のひらを置く



指をかける

お手入れ方法

一度はがしたパーツは再使用できません。メンテナンス時ははがさず清拭してください。

消毒する場合は、アルコール消毒剤などを柔らかい布に吹き付けてから清拭してください。
清拭する場合は、中性洗剤を水で薄め柔らかい布に浸し、よく絞ってから清拭してください。
仕上げに乾いた布で拭き取ってください。

- ① シンナーやベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
- ① オゾン消毒をする場合は、金属部が劣化するおそれがあるので、高濃度(5ppm以上)で長時間の消毒は行わないでください。
- ① 金属ブラシ、ナイロンたわしなどはキズをつけるため、使用しないでください。
- ① 塩素系消毒剤を使用する場合は、表示の注意事項および濃度を確認し希釈して使用してください。濃度が高い場合は、手すり表面が変色するおそれがあります。



保管方法

カインドグリップが変形するおそれがありますので、炎天下の車の中などの高温環境下での長時間の保管や手すりを重ねて置いたり、不安定な状態で立て置き保管はしないようにしてください。

また、間に仕切り(ダンボール等)を入れてグリップの変形に気を付けてください。

- ① 湿気の多い場所では保管しないでください。
- ① 汚れを取り除き、よく乾燥させて保管してください。
- ① 直射日光の当たらない場所で保管してください。(材質色に変化するおそれがあります。)

仕様

ルーツ カインドグリップ

●素 材：手すり部=スチール+樹脂、グリップ部=特殊エラストマー

【サイドタイプ】MNTPLBRKG 【センタータイプ】MNTPSBRKG ※手すり共通 【グリップ単体】MNTPKG

- サイズ：手すり部=幅34×高さ70/75/80cm(3段階高さ調整)
トップグリップ=6.4×3.5cm(ストレート部)、7.0×3.5cm(コーナー部)
ミドルグリップ(楕円)=3.1×2.8cm
- 重 量：21.9kg(サイドタイプ)/13.2kg(センタータイプ) ※ベースプレート、支柱含む

【ロングタイプ】MNTPLGBRKG 【グリップ単体】MNTPLGKG

- サイズ：手すり部=幅82×高さ70/75/80cm(3段階高さ調整)
トップグリップ=6.3×3.5cm(ストレート部)、7.0×3.5cm(コーナー部)
ミドルグリップ(楕円)=3.1×2.8cm
- 重 量：17.6kg ※ベースプレート、支柱含む

【コーナータイプ】MNTPCBRKG 【グリップ単体】MNTPCRKG

- サイズ：手すり部=幅37×奥行34×高さ70/75/80cm(3段階高さ調整)
トップグリップ=6.4×3.5cm(ストレート部)/7.0×3.5cm(コーナー部)
ミドルグリップ(楕円)=3.1×2.8cm
- 重 量：24.1kg ※ベースプレート、支柱含む

【スモールタイプ】MNTPT2KG(両手すり仕様)
MNTPT1KG(片手すり仕様)

【グリップ単体】MNTPTKG

- サイズ：手すり部=幅38×高さ60/65/70cm
(3段階高さ調整)
トップグリップ=7.5×3.8cm(ストレート部)
7.9×4.2cm(コーナー部)
ミドルグリップ(楕円)=3.1×2.8cm
- 重 量：14.6kg(両手すり仕様)/12.3kg(片手すり仕様)
※ベースプレート、支柱含む

開発・製造元

ISO9001 認証取得
ISO13485 認証取得
※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、
製造および付帯サービスにて取得
本製品の取扱説明書と使用方法動画は
下記QRコードからダウンロードいただけます。



取扱説明書



動画で見る製品情報

株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部

www.molten.co.jp/health

東京 札幌 仙台 埼玉 名古屋 大阪 広島 福岡
製品他、各種お問い合わせは

〒733-0036 広島市西区観音新町四丁目10-97-21

TEL.082-578-9226

E-mail:health@molten.co.jp

〈電話による受付時間〉月曜日～金曜日/9:00～17:00
※祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休業日など弊社休業日を除く