

据え置き型コンパクトリフト **リーチ<電動式>**

取扱説明書

目 次



○注意事項	P 1
○各部名称	P 3
○設置レイアウト	P 4
○事前調査	P 5
○設置方法	P 6
○使用方法	P 13
○緊急時の対応方法	P 14
○ワイヤレス(無線)リモコンの乾電池について	P 14
○ペアリングNo.の確認方法	P 15
○分解方法	P 16
○運搬方法	P 20
○保管方法	P 20
○お手入れ方法	P 20
○点検項目	P 21
○このようなときには	P 21
○仕様	P 22

安全にお使いいただくために

この度は当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。ご使用前に取扱説明書を確認の上、正しくお使いください。確認後は、本取扱説明書を大切に保管してください。また利用者様の身体状況や環境が変化した場合には、福祉用具専門相談員などの専門の方に相談し適切な処置を受けてください。

安全上の注意 必ずお守りください

- ①利用者様や他の人への危害・財産への損害などを未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
取扱説明書に表示されている記号や用語は、表示内容を見逃し誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次のような表示区分であらわしています。

⚠ 警告：死亡または重傷などを負う可能性を意味します。

⚠ 注意：障害を負うまたは物的損害を発生させる可能性を意味します。

注意：本製品の故障を防止するための注意事項や、より満足に使用していただくためのアドバイスを意味します。

- ②お守りいただく内容の種類を次の表示区分であらわしています。

⊘：してはいけない「禁止」を意味します。

Ⓢ：必ず実行していただく「強制」を意味します。



- ① **本製品は車いす専用のリフトです。本来の目的以外に使用しないでください。**
思わぬ事故やケガにつながるおそれがあります。
- ② **電動車いすは使用できません。**
- ③ **本製品を改造しないでください。**
破損や事故につながるおそれがあります。
- ④ **本製品には正しい向きがあります。前後／左右間違えて使用しないでください。**
思わぬ事故やケガにつながるおそれがあります。
- ⑤ **ほかの製品を組み合わせ使用しないでください。**
破損や事故につながるおそれがあります。
(例)本製品にスロープをかけて使用、踏み台を組み合わせ使用など
- ⑥ **本製品は屋内専用の昇降リフトです。屋外では使用しないでください。**
電動モーターやリモコンが雨で濡れると、感電したり故障する原因になります。また、フレーム部分が腐食し、使用できなくなります。
- ⑦ **搭乗定員は1名です。**
定員を超えると故障・転落事故の原因となります。
- ⑧ **最大上昇荷重は120kg、最大耐荷重(保持)は150kgまでです。**
車いすなども含め、総重量が150kgを超える状態では使用しないでください。
故障や転落により事故につながるおそれがあります。
- ⑨ **使用する車いすのサイズを確認して使用してください。(P5「車いすサイズの確認」参照)**
転落や転倒により事故につながるおそれがあります。
- ⑩ **リモコン操作は取り扱いを理解できる方が行ってください。**
お子様や操作を理解できないと思われる方(認知症の方など)が一人でリモコンに触れる可能性がある場合(介護する方が外出されるときなど)は、電源プラグをその都度抜いて誤操作による事故を未然に防いでください。
また、操作する方および介護する方は必ず、リモコンの操作方法を理解した上で使用してください。
- ⑪ **夜間に使用される場合は、照明器具などを用いて十分な明るさを確保してください。**
転落や転倒により事故につながるおそれがあります。
- ⑫ **最大使用可能段差を超える場所では使用しないでください。**
- ⑬ **設置場所は平らな固い床面にしてください。**
不安定になり転落・転倒するおそれがあります。
- ⑭ **ガタつきが発生する場所では使用しないでください。**
不安定な場所で使用すると、転落や転倒により事故につながるおそれがあります。
- ⑮ **壁面やあがりかまちなどのすき間に注意してください。**
転落やはさみ込みによる事故、家屋の破壊につながるおそれがあります。
- ⑯ **電源コードはテーブルやベースユニットにはさみ込まないよう、必ず壁際に固定してください。**
コードが傷むことで漏電し、感電や火災のおそれがあります。またコードが断線し、本製品が動かなくなるおそれがあります。
- ⑰ **転落防止用ガード・車輪止めプレートは必ず使用してください。**
テーブルへの乗り降りで転落するおそれがあります。
- ⑱ **土や砂、雪などが走行面にある場合は、必ず清掃して使用してください。**
滑って転倒・転落するおそれがあります。
- ⑲ **テーブルへ乗り降りする場合は、テーブルの手前で一旦停止し、ゆっくりと乗り降りしてください。**
勢いよくテーブルへ乗り降りすると、転倒・転落するおそれがあります。
- ⑳ **車いすの足置きや転倒防止バーが走行面に接触しないように調整してください。**
走行するときに引っかかり、事故につながるおそれがあります。
- ㉑ **異音など昇降動作に異常がある場合は、使用しないでください。**
思わぬ事故やケガにつながるおそれがあります。

- ②室内側からテーブルへ乗り降りする場合は、テーブルをあがりかまちと同じ高さにして行い、玄関側からテーブルへ乗り降りする場合は、テーブルを一番下に下げた状態で行ってください。
テーブルが一番下まで下っている状態やあがりかまちの高さと合っていない状態で乗り降りすると、転倒・転落するおそれがあります。
- ③車いすの4輪がすべてテーブルの上を通るように気をつけてゆっくりと乗り込んでください。
ななめに移動すると転倒・転落するおそれがあります。
- ④昇降時はテーブルの中央に車いすを止め、ブレーキを必ずかけて使用してください。
テーブルの端に車いすを止めると不安定になり、転倒・転落や思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ⑤昇降時には、常に利用者様や車いすの状態に注意し、昇降動作によるはさみ込みや干渉が起こらないよう注意してください。
- ⑥テーブルの昇降動作中に乗り降りしないでください。
転倒・転落するおそれがあります。
- ⑦テーブルの昇降動作中はテーブル上でむやみに動かないでください。
転倒・転落するおそれがあります。
- ⑧テーブル上で立ち上がったたりしないでください。
転倒・転落するおそれがあります。
- ⑨昇降時はペットなどが下に入り込まないように周辺を確認して操作してください。
- ⑩リフト使用後はテーブルを下げた状態にしてください。
- ⑪下降時はテーブルの下に手や足を入れないでください。
手や足をはさまれてケガをするおそれがあります。
- ⑫テーブルの下に物などを置かないでください。
- ⑬テーブルから前進して降りる場合は、車いすの前方へ体重をかけながら降りないでください。
前のめりになり転倒するおそれがあります。
- ⑭モーターカバーにつかまったり、寄りかかたりしないでください。
転落や転倒により事故につながるおそれがあります。
- ⑮モーターユニットに水をかけないでください。
電動モーターやリモコンが濡れると、感電したり故障する原因になります。

注意


- ①緊急用電源に使用する電池には使用期限があります。
使用期限を超えた電池を装着したままにすると、液もれや破裂などのおそれがあったり、実際に使用したい場合に動かないことがあります。
1度も使用していなくても使用期限が切れた電池は使用しないでください。
また、定期的に電池の使用期限を点検の上、交換をお願いします。
- ②ネジやアンカーで固定して使用しないでください。
破損や変形の原因になります。
- ③運搬時には物などに接触させたり、転落させないように注意してください。
破損するおそれがあります。
- ④本製品の上で跳びはねたりしないでください。
破損するおそれがあります。
- ⑤長期間設置した場合は、床面にアジャスターの跡が残るおそれがあります。
- ⑥保護カバーを取り付けて使用してください。
思わぬ事故やケガにつながるおそれがあります。
- ⑦本製品はワイヤレス(無線)リモコンを使用しています。
他の機器類に影響がないことを確認の上、使用してください。

各 部 名 称

以下の部品が全てそろっているか、破損・変形などしていないかを確認してください。
万が一、部品の不足・破損があった場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。

ベースユニット・スロープパーツ


ベースフレーム：1台

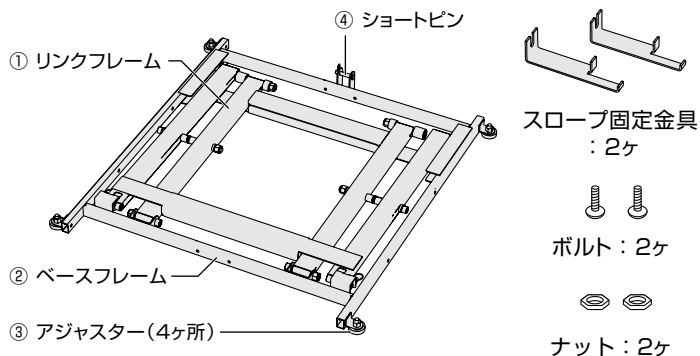

モーターカバー・スロープ本体


モーターカバー：1台

スロープ本体：1台

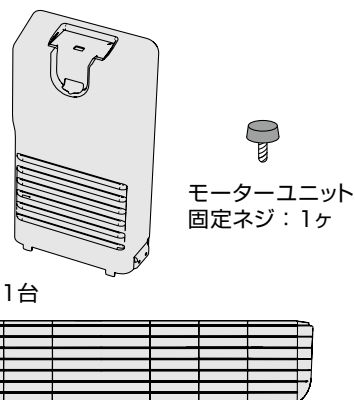

モーターユニット

モーターユニット：1台

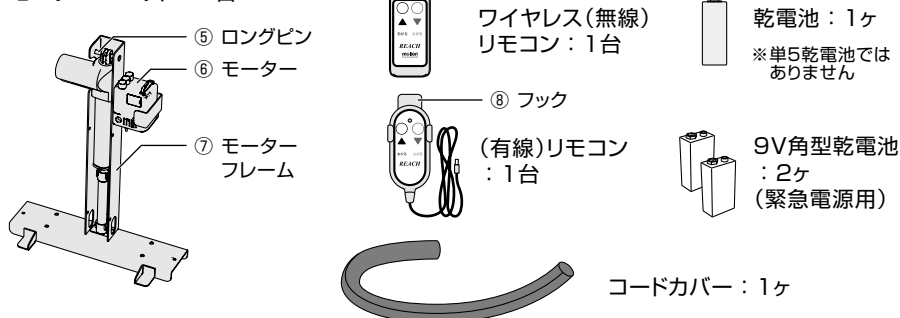


付属品



取扱説明書：1部


テーブルユニット

テーブル：1台

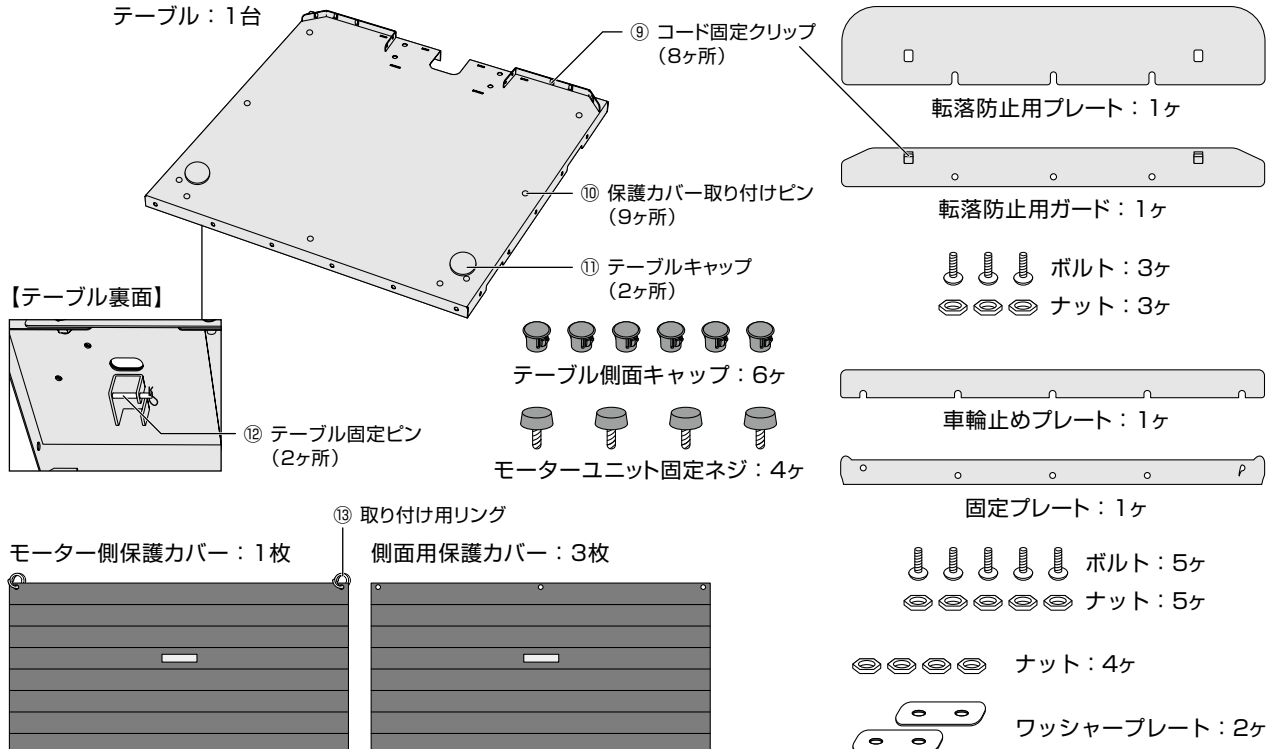


玄関とあがりかまちの位置関係からレイアウトを決めます。

玄関ドアの正面にあがりかまちがある場合【直進使用】

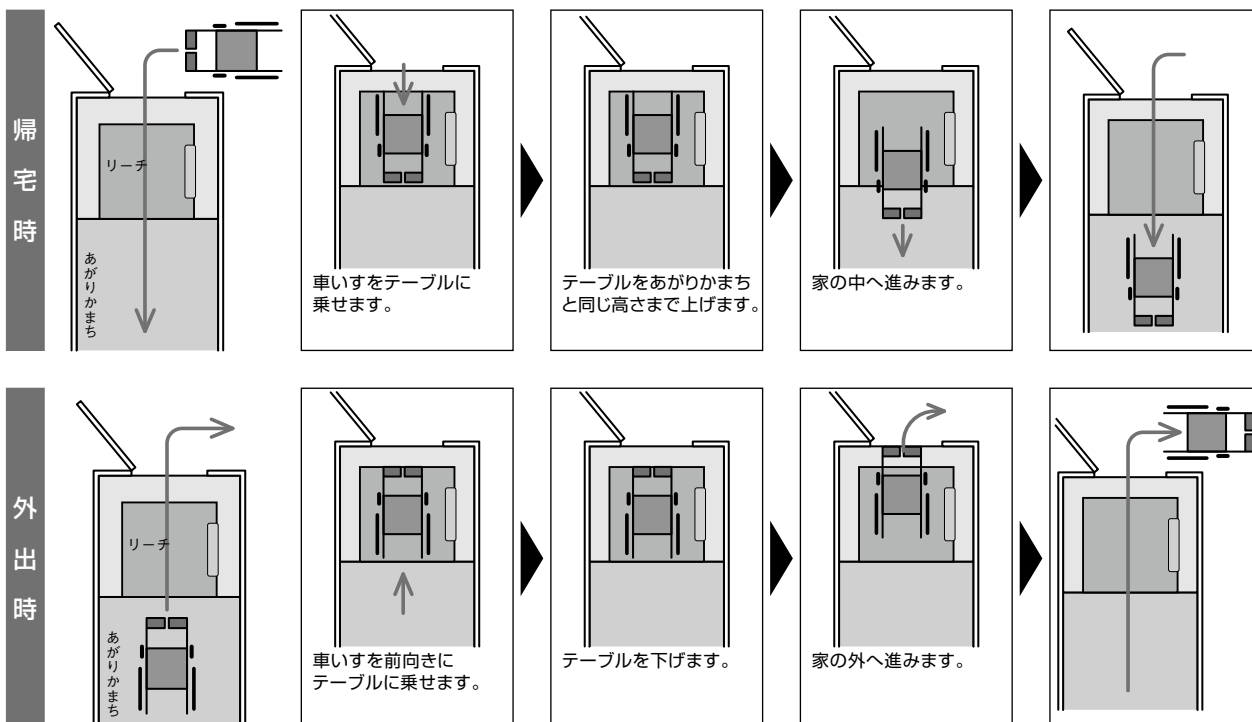

玄関ドアに対して右側や左側にあがりかまちがある場合【回転使用】

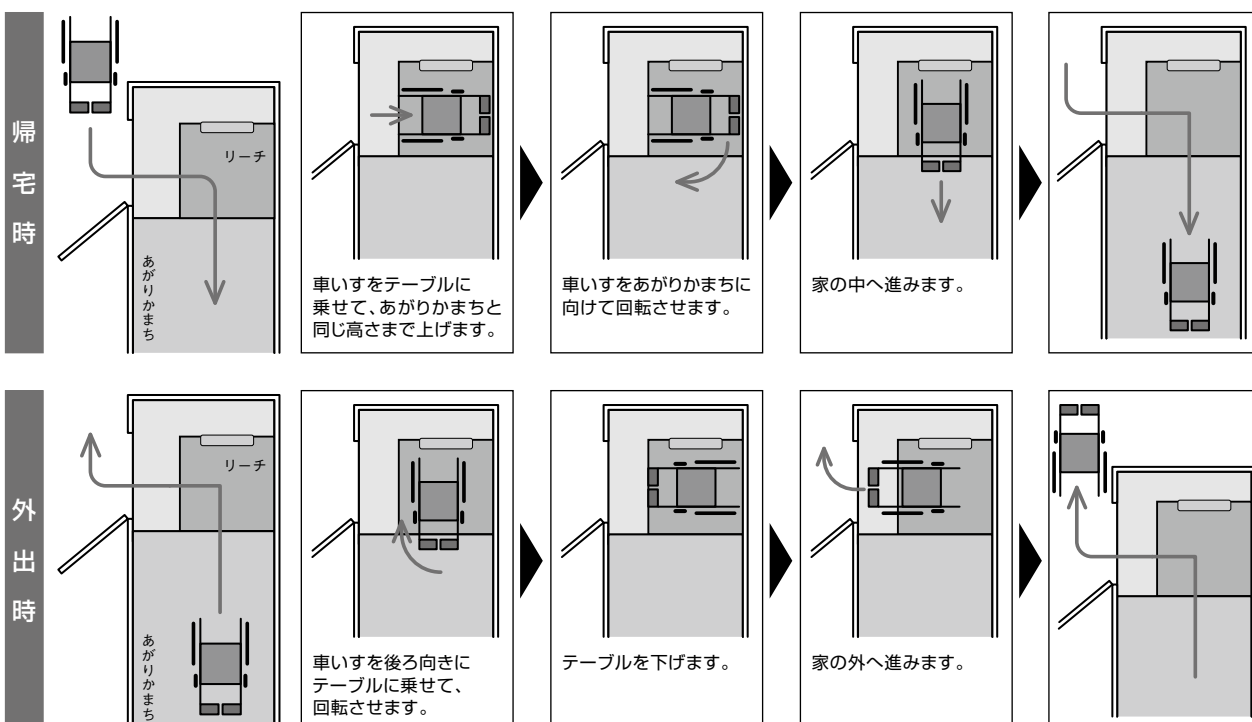


リーチを設置する前に住宅環境を調査し、レイアウトを決めます。


1 スペースの確認

玄関のスペースに電動リーチが設置できるか確認します。

【直進使用】

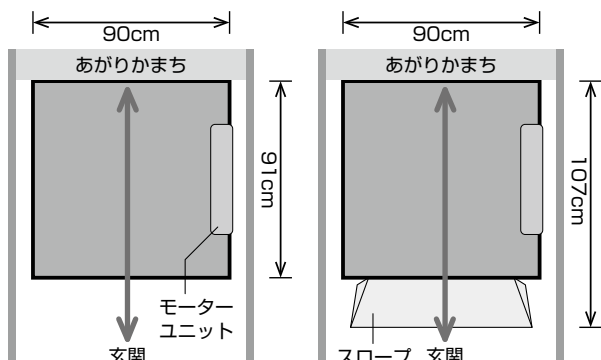

【回転使用】

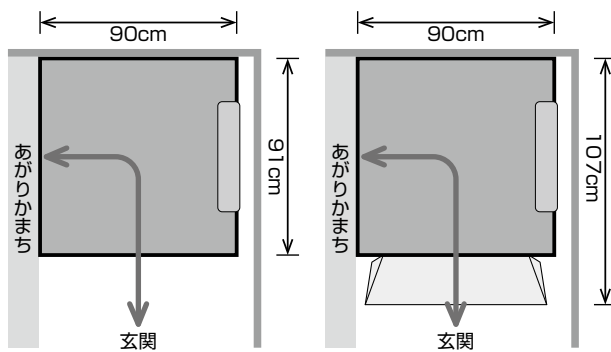

2 使用方向の確認

玄関ドアに対してあがりかまちがどこにありますか？

●正面……【直進使用】

●右側または左側……【回転使用】


3 車いすサイズの確認

後輪の幅が75cm以内のものを使用してください。


【直進使用】

●あがりかまちに
あがる場合

●あがりかまちから
降りる場合

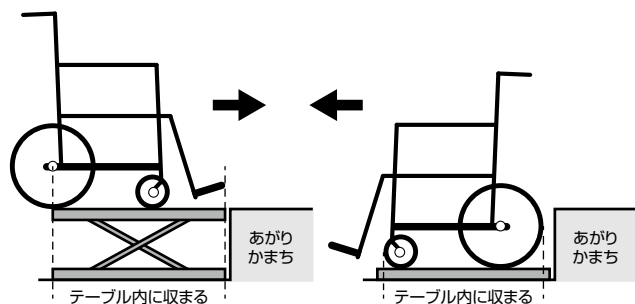

【回転使用】

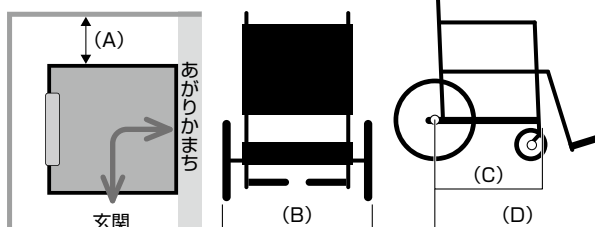


設置したときのすき間(A)が20cm以上ある場合は、後輪の幅(B)が50cm以内、後輪のセンターと前輪の軸部までの距離(C)が55cm以内のものを使用してください。

設置したときのすき間(A)が20cm未満の場合は、後輪の幅(B)が50cm以内、後輪のセンターとステップの先端までの距離(D)が65cm以内のものを使用してください。

4 モーターユニットの位置の確認


モーターユニットをどちらに向けて設置しますか？

【直進使用】

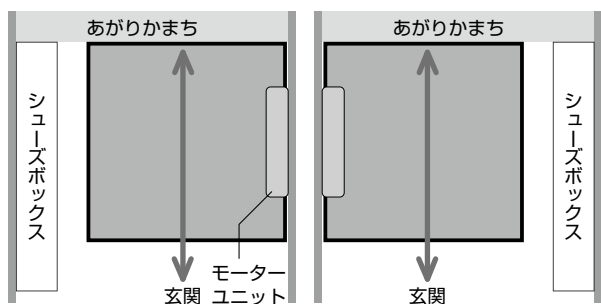

※モーターユニットがシューズボックスの反対側にくるように設置してください。

【回転使用】

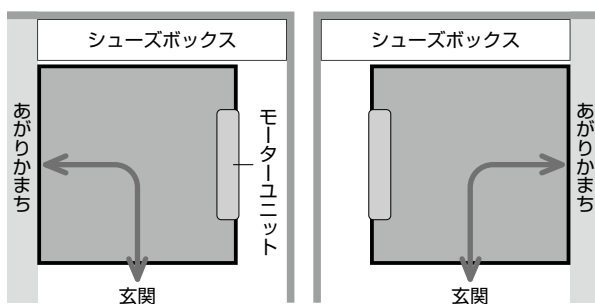


※モーターカバー方向からの出入りはできません。

5mmの六角レンチと13mm・17mmのスパナが必要です。工具は付属していません。


1 ベースフレームの設置

- ① フレームユニットを平らな床の上に置きます。
 - ② フレームユニットは進行方向のあがりかまちに対して1cm(目安)離して設置します。
 - ・ 直進方向で使用する場合は、モーターは右、あるいは左側に設置されることになります。
 - ・ 回転方向で使用する場合は、モーターはあがりかま치의反対側。
- ※モーターユニットの位置からの出入はできませんので向きには十分注意して設置してください。

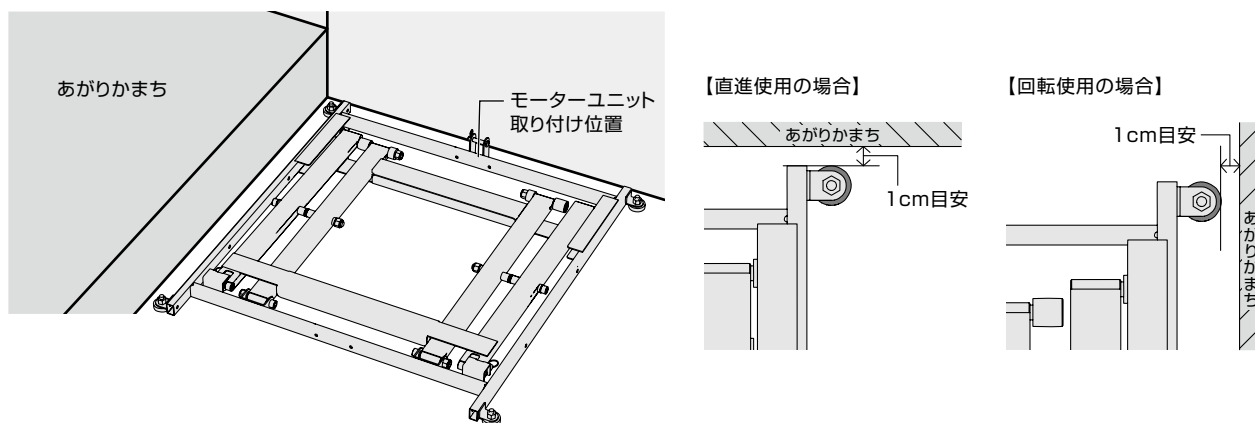

あがりかま치의上部が突出している場合は、内側に入り込まないように設置してください。


※ベースフレームを持って移動させてください。指をはさまないようご注意ください。

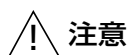


注意




1cm目安
ベース
フレーム

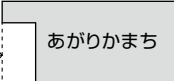

2 モーターユニットの取り付け

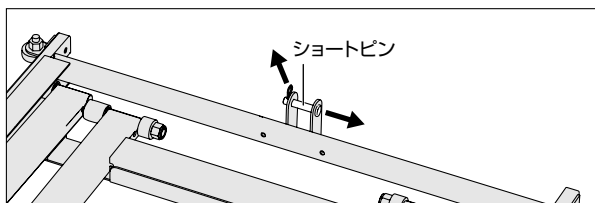


- ① フレームユニットからショートピンを取り外します。
ピンは割りピンを引き抜くと外せます。

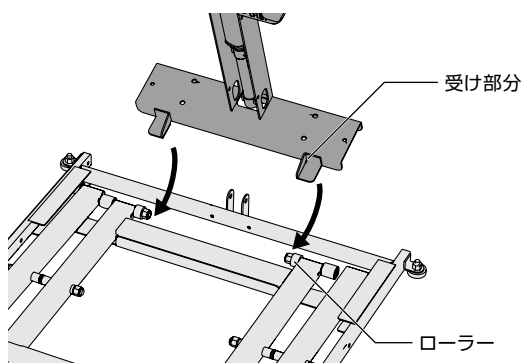


- ② モーターフレームの受け部分とフレームユニットのローラー位置を合わせ、ゆっくりと差し込みます。

※床面をこすって傷つけないよう十分注意してください。

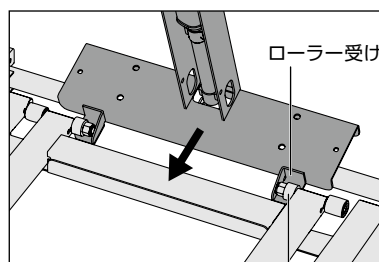

フレームユニットのローラー


設置方法

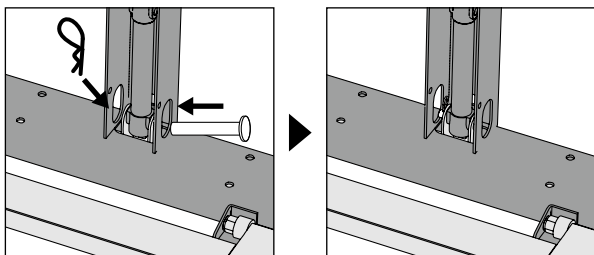


- ③モーターフレームをフレームユニットに取り付けます。
モーターフレームとフレームユニットの穴位置を合わせ、
①で外したショートピンを差し込み、割りピンで固定します。

割りピンの差し込みについて


右のイラストのように奥まで割りピンを差し込んでください。
ご使用中にピンが外れケガをするおそれがあります。

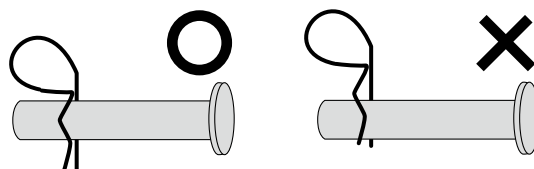

3 緊急用電源の取り付け

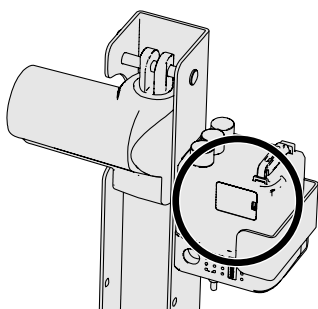

- ①モーター前面のフタを開きます。
②中の電源ソケットに付属の9V角型乾電池を取り付けてください。(2ヶ所)

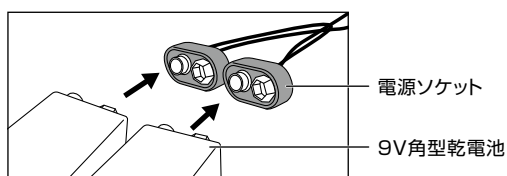


- ③乾電池をボックス内に収容し、フタを閉じてください。



注意


緊急用電源に使用する電池には使用期限があります。
使用期限を超えた電池を装着したままにすると、液もれや破裂などのおそれがあったり、実際に使用したい場合に動かないことがあります。
1度も使用していなくても使用期限が切れた電池は使用しないでください。
また、定期的に電池の使用期限を点検の上、交換をお願いします。

4 テーブルの準備

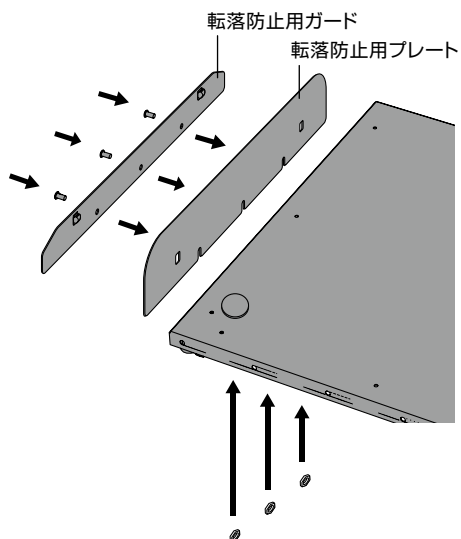


- ①転落防止用ガードと転落防止用プレートをボルトとナットではさむようにして取り付けます。
5mmの六角レンチおよび17mmのスパナを使用してしめてください。

※転落防止用ガードの向きはコード
固定クリップのフック側を内側に
してください。

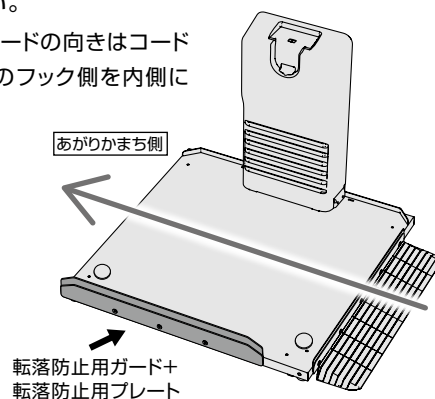

設置方法

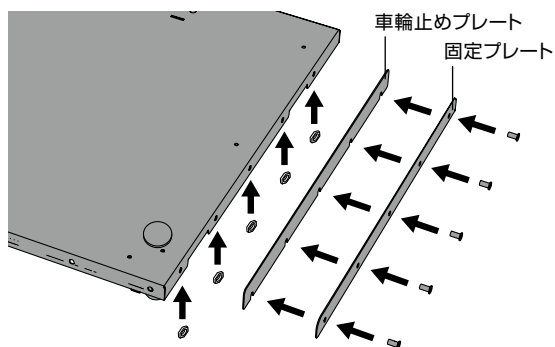

② 進入する側に、車輪止めプレートと固定プレートと一緒にボルトとナットではさむようにして取り付けます。
5mmの六角レンチおよび17mmのスパナを使用してしめてください。

③ 転落防止ガード、車輪止めプレートを付けていない箇所には、テーブル側面キャップを取り付けてください。



テーブル側面キャップ

転落防止用ガードおよび車輪止めプレートの位置について

転落防止用ガードおよび車輪止めプレートは、全ての面に取り付け可能です。

用途に応じて取り付け位置を決めてください。




転落防止用ガード+転落防止用プレート




車輪止めプレート+固定プレート


【直進使用】

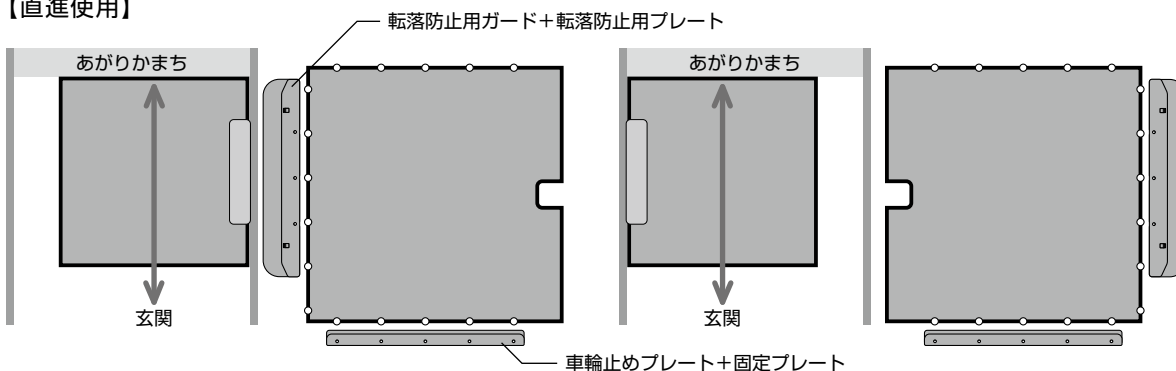


【回転使用】

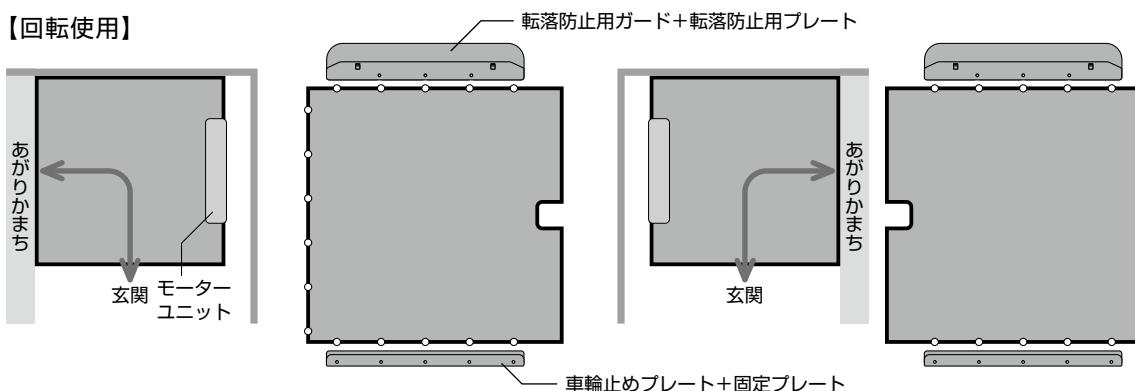


5 テーブルの取り付け

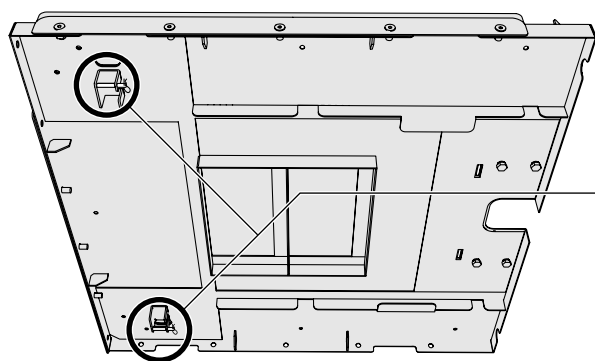

- ① テーブル裏面のテーブル固定ピンを取り外します。
ピンは割りピンを引き抜くと外せます。

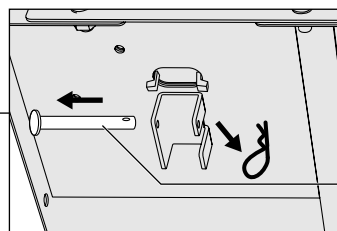


テーブル固定ピン


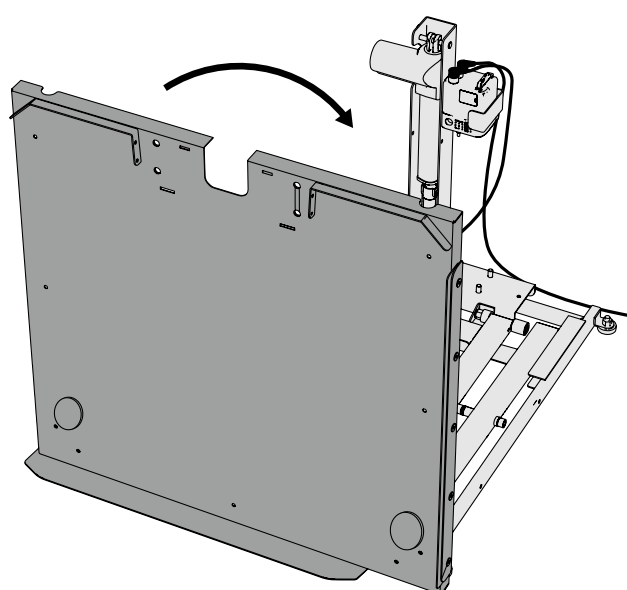


- ② 設置場所を決め、フレームユニットにテーブルを取り付けます。

テーブルの向きを確認し、モーターの反対側に下側を押し当てるようにテーブルを立て、モーターユニットを外側に押しながらゆっくりとモーター側に倒してください。手、足のはさみ込みには十分注意してください。

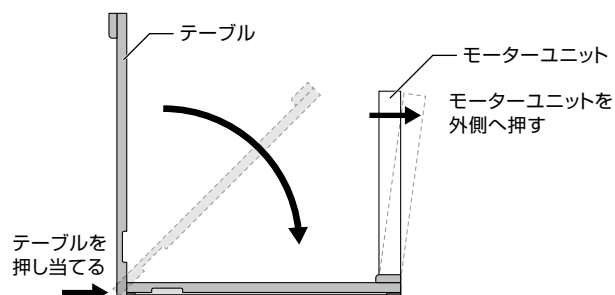

- ③ ネジの部分が全てテーブルにはまり、テーブルが水平になっていることを確認してください。(4ヶ所)

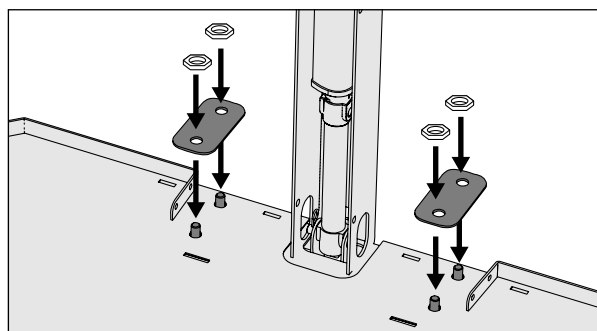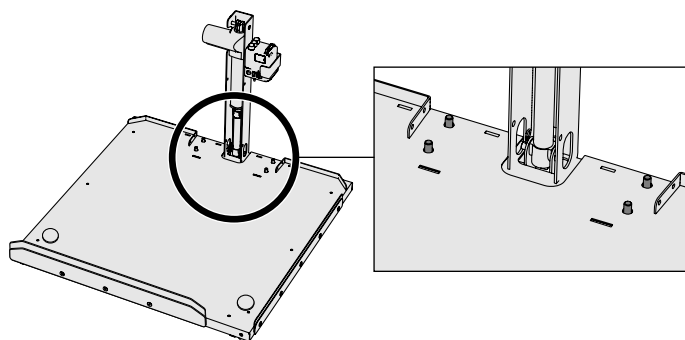


- ④ ワッシャープレートとナットを取り付けます。(4ヶ所)
17mmスパナでナットを確実にしめ付けてください。

- ⑤ 電源コードをコンセントに接続してください。


- ⑥ (有線)リモコンを操作してテーブルを一番上まで上げてください。

設置方法

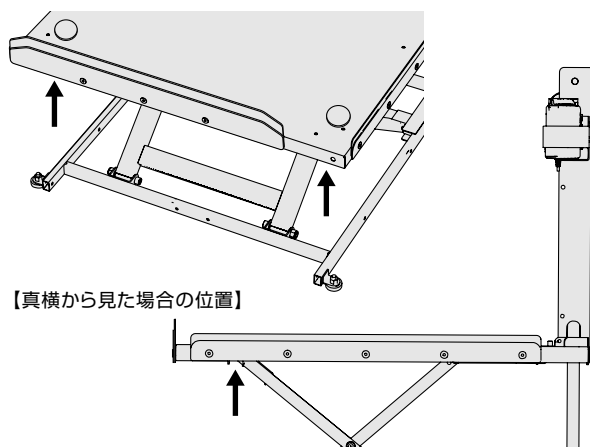


⑦ テーブルを固定します。

①で外したテーブル固定ピンをフレームとテーブル裏側の接続部に差し込み、割りピンで固定します。テーブル固定ピンを取り付けた後、ロックされていることを確認してください。

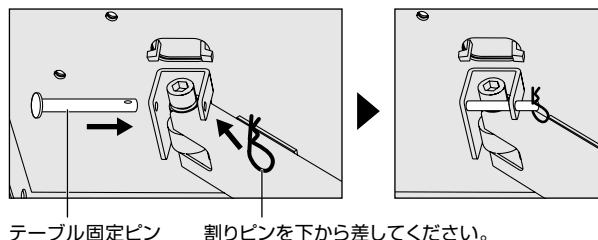


6 設置状態の確認

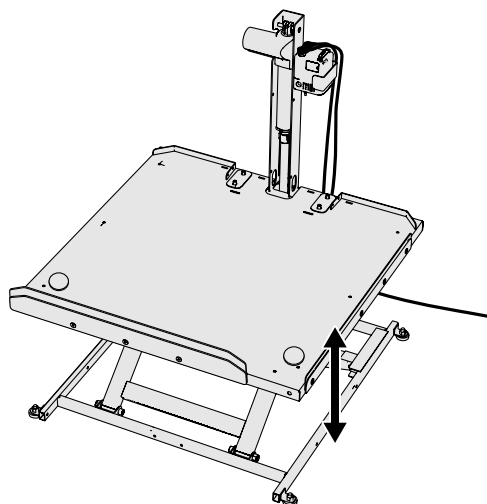

① ワイヤレス(無線)リモコンに電池を入れます。


※ 12V-23Aの乾電池を使用します。単5乾電池は使用できません。(P14参照)

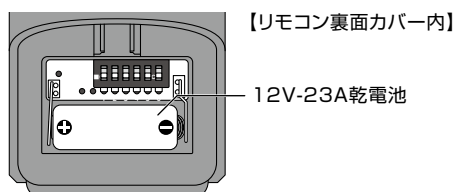


② (有線)リモコンおよびワイヤレス(無線)リモコンを操作し、上昇・下降がスムーズに行えるか確認します。

③ あがりかまちとの位置関係を確認します。 (すき間1cm目安)

【直進使用の場合】

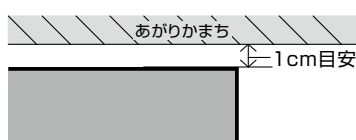


【回転使用の場合】

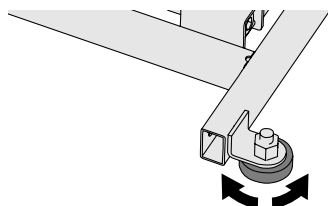


④ テーブルがかたむいていないか、ガタつきはないか確認します。 ベースフレームの端にあるアジャスター(4ヶ所)を回して調整してください。

7 モーターユニットカバーの取り付け

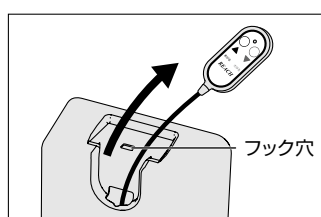

① (有線)リモコンのフックを取り外します。


② リモコンをモーターユニットカバーの中を通し、上部の穴から引き出してください。

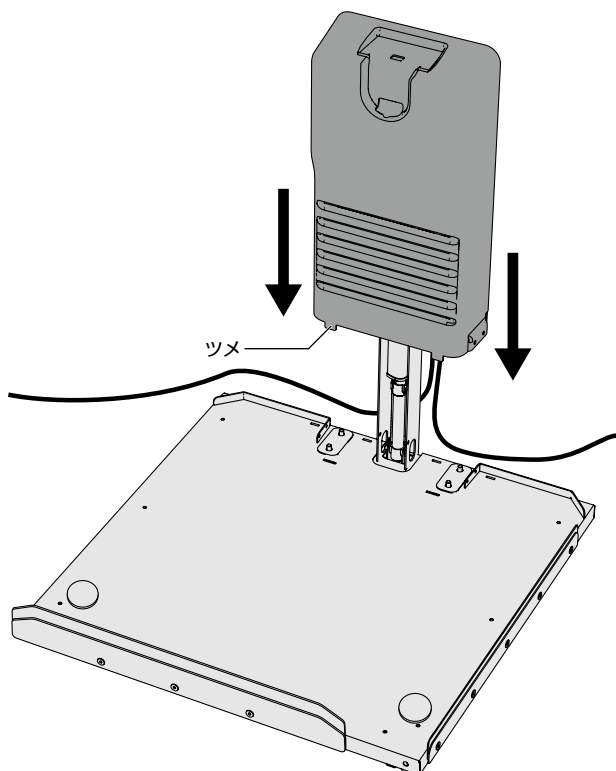


③モーターユニットにカバーを取り付けます。
ツメと穴の位置を合わせ、周りに注意しながらカバーをかぶせてください。
電源コードは背面側の溝から出してください。

④側面下部(4ヶ所)と背面上部(1ヶ所)にあるモーターユニット取り付け穴にモーターユニット固定ネジを取り付け、カバーを固定してください。


【側面下部】

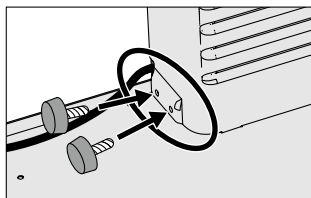

【背面上部】

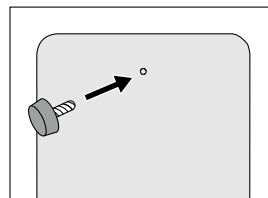


⑤①で外したフックを取り付け、天面のフック穴に掛けて収納します。

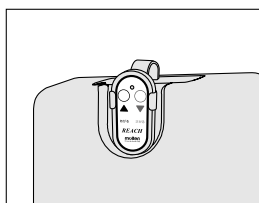



8 配線の固定

昇降動作中の電源コードのはさみ込みを防止するため、設置後以下の要領で電源コードの配線を固定してください。

【直進使用】


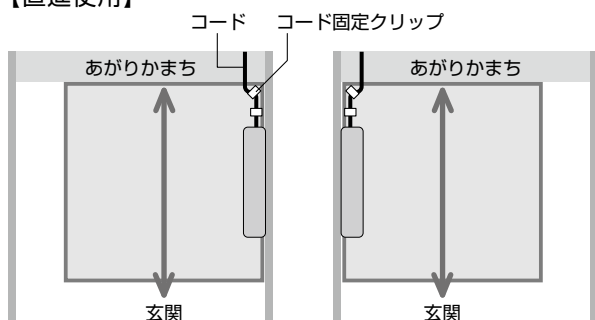


【回転使用】

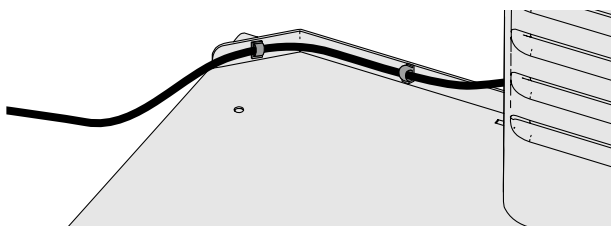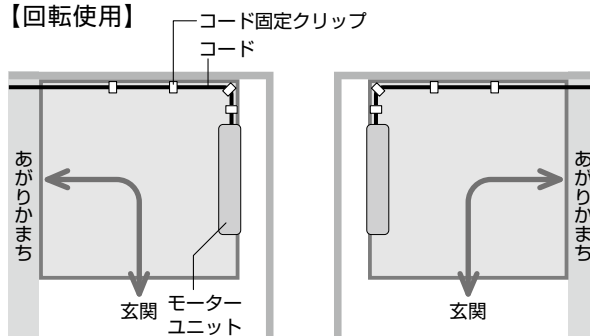

コードをコード固定クリップに通し、固定します。


※コードカバーは必要に応じてコードに巻いて使用してください。

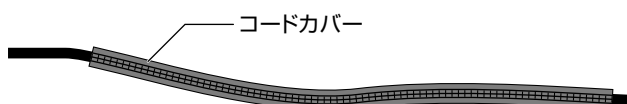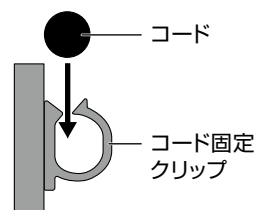

9 保護カバーの取り付け

モーター側にモーター側保護カバーを、それ以外の面に側面用保護カバーを取り付けます。


【保護カバー取り付け位置】

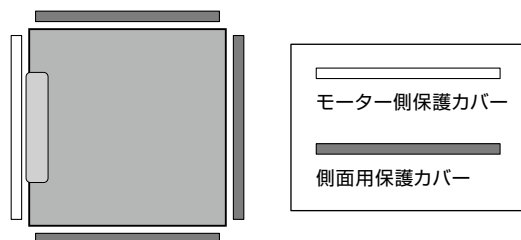


【側面用保護カバー】

※取り付け用穴3ヶ所

取り付け用穴

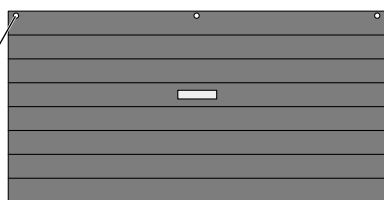


テーブルに取り付けてある保護カバー取り付けフックに取り付け用穴を通してください。

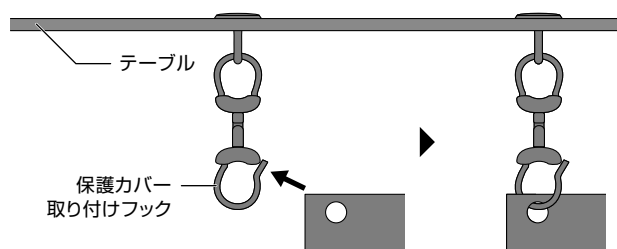


【モーター側保護カバー】

※取り付け用リング2ヶ所

取り付け用リング

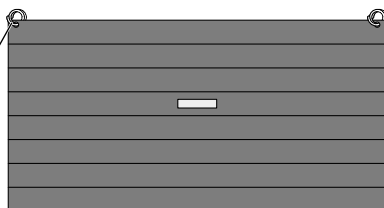


外側に向いているコード固定クリップのフックに取り付け用リングを通してください。

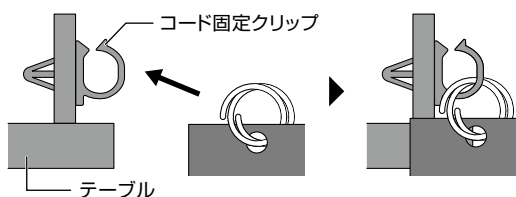

10 スロープの取り付け

5mmの六角レンチと13mmのスパナが必要です。工具は付属していません。

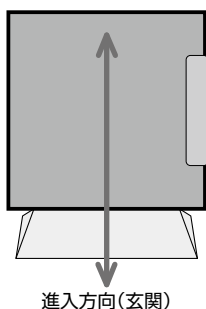

進入方向(玄関)

①リモコンを操作し、テーブルの高さを一番上まで上げます。

②左図を参照に、スロープを取り付ける側のベースフレームにスロープ固定金具をボルトとナットで取り付けてください。(2ヶ所)


※スロープは設置場所に応じて各面に取り付け可能です。

5mmの六角レンチと13mmのスパナを使用してしめてください。




③スロープを設置します。

スロープ固定金具の突起にスロープ裏面の溝をはめ込んでください。

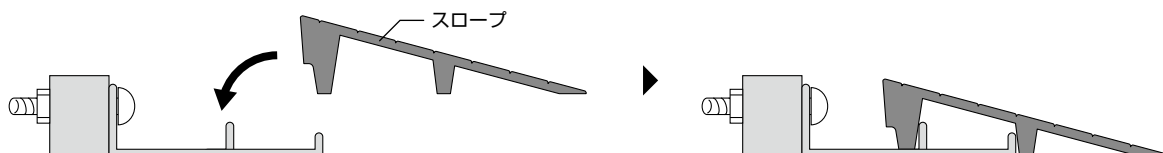


リフトの昇降

1 リフトの上昇

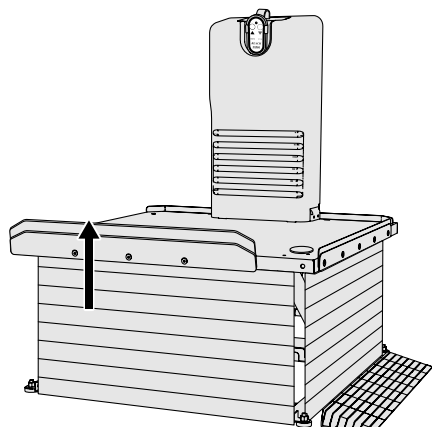


①リモコンの『あがる』ボタンを押している間リフトが上昇します。ボタンを離すと止まります。

②あがりかまちとテーブルが同じ高さになるように合わせます。

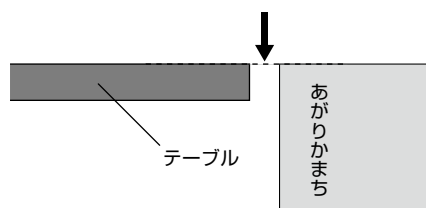


警告

あがりかまの上部が突出している場合は、足先が内側へ入り込まないように注意してください。上昇時に足をはさみ込み、ケガをするおそれがあります。

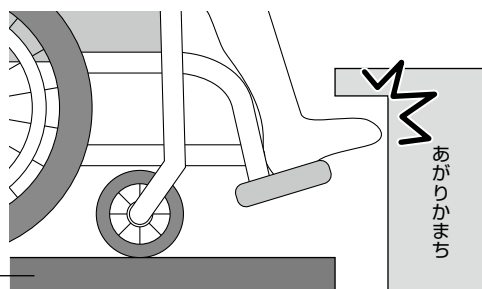

2 リフトの下降

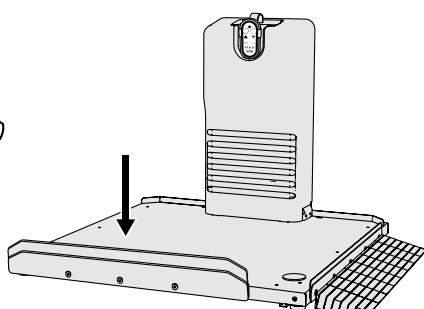


リモコンの『さがる』ボタンを押している間リフトが下降します。ボタンを離すと止まります。



警告

- ①テーブルを下げるときはテーブル下に手や足を置かないでください。はさみ込んでケガをするおそれがあります。
- ②テーブルをあがりかまより高く上げた場合は、そのすき間に手や足を入れないでください。下降時にはさみ込んでケガをするおそれがあります。

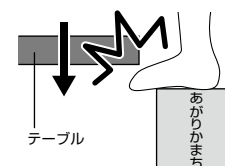


注意

電源コードや(有線)リモコンのコードをテーブルにはさまないよう注意してください。コードが傷むことで漏電し、感電や火災のおそれがあります。またコードが断線し、本製品が動かなくなるおそれがあります。

緊急時の対応方法

停電時

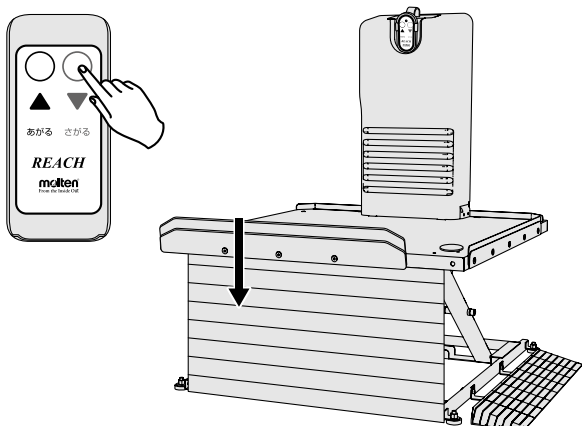

テーブルが上昇した状態で停電などにより下降できない場合は、設置時に取付けた9V角型乾電池が緊急用電源として使用できます。

リモコンの下降ボタンを押してテーブルを下げてください。

※緊急用電源ではテーブルを上昇する事はできません。

※緊急用電源を使用しての下降動作は一度しかできません。

ワイヤレス(無線)リモコンの乾電池について


ワイヤレス(無線)リモコン用乾電池について

ワイヤレス(無線)リモコンは12V-23A乾電池を使用します。

お近くの家電量販店でお買い求めください。

なお、単5乾電池は使用できません。

※12V-23A乾電池は単5乾電池よりも少し小さいです。

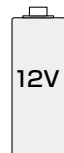

12V



単5



単4



単3


ペアリングNo.の確認方法

本製品は、ワイヤレス(無線)リモコンとモーターのペアリングNo.が一致しないと作動(通信)しません。


ペアリングNo.は1～64のパターンがあります。

製品出荷時は、ワイヤレス(無線)リモコン・モーターとも下記のように表示してペアリングしています。

【モーター側注意シール】

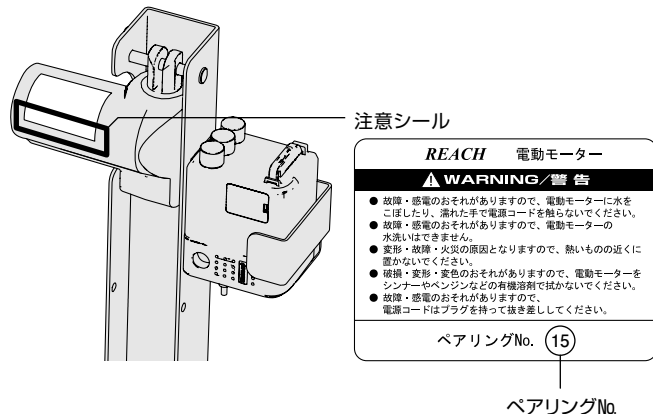

【ワイヤレス(無線)リモコン背面】

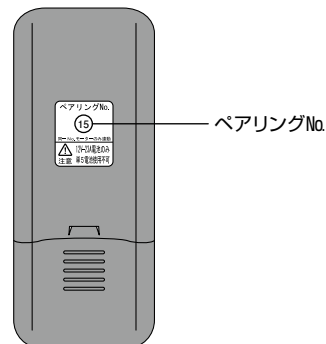

製品のワイヤレス(無線)リモコンとモーターのペアリングNo.が一致しない場合は、(株)モルテン健康用品事業本部 お客様窓口までご連絡ください。

ワイヤレス(無線)リモコンやモーターを紛失または破損し、購入される場合は、注文時にペアリングNo.をご指定ください。ペアリングNo.を設定し、販売させていただきます。



警告

ペアリングNo.が同じ製品を近くで使用すると同時に作動することがあります。

ペアリングNo.が同じ製品を近くで使用しないでください。

同時に作動するとおぼやけ事故やケガにつながるおそれがあります。


株式会社 モルテン 健康用品事業本部 お客様窓口
TEL(082)842-9975

分解方法


1 スロープの取り外し

5mmの六角レンチと13mmのスパナが必要です。工具は付属していません。

- ①リモコンを操作し、テーブル高さを一番上まで上げます。
- ②スロープ固定金具からスロープを取り外してください。

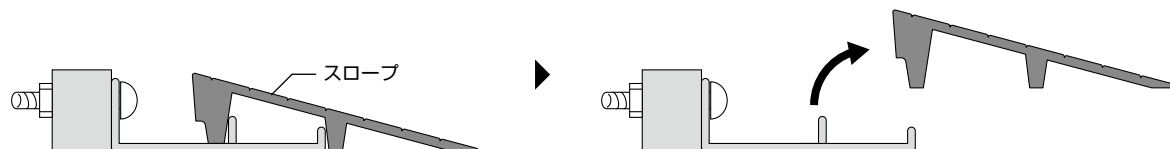


- ③5mmの六角レンチと13mmのスパナを使用してボルトとナットを取り外し、ベースフレームからスロープ固定金具を取り外してください。

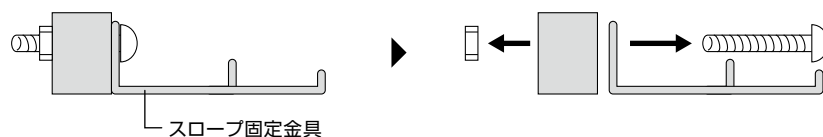


2 保護カバーの取り外し

側面用保護カバーは取り付けフックから取り外します。モーター側保護カバーはコード固定クリップのフックから保護カバーの取り付け用リングを抜いて取り外します。


【側面用保護カバー】※取り付け用穴3ヶ所

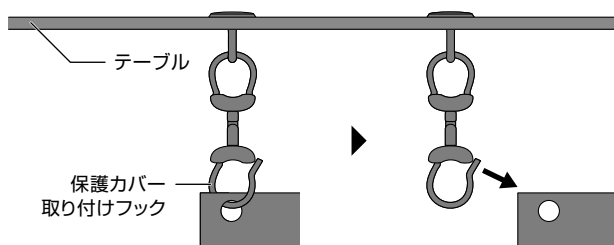


【モーター側保護カバー】※取り付け用リング2ヶ所

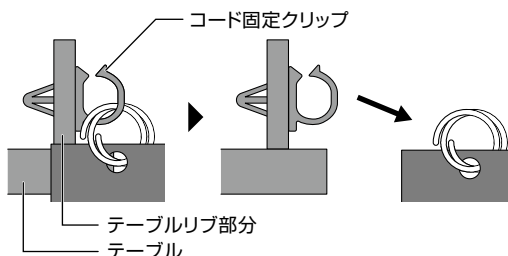


3 配線の取り外し

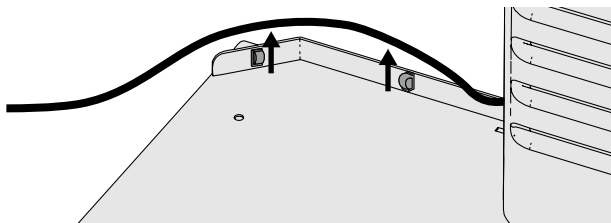

コード固定クリップからコードを外してください。

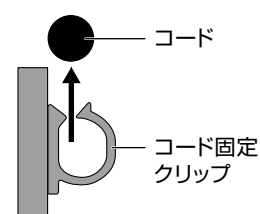


4 モーターユニットカバーの取り外し

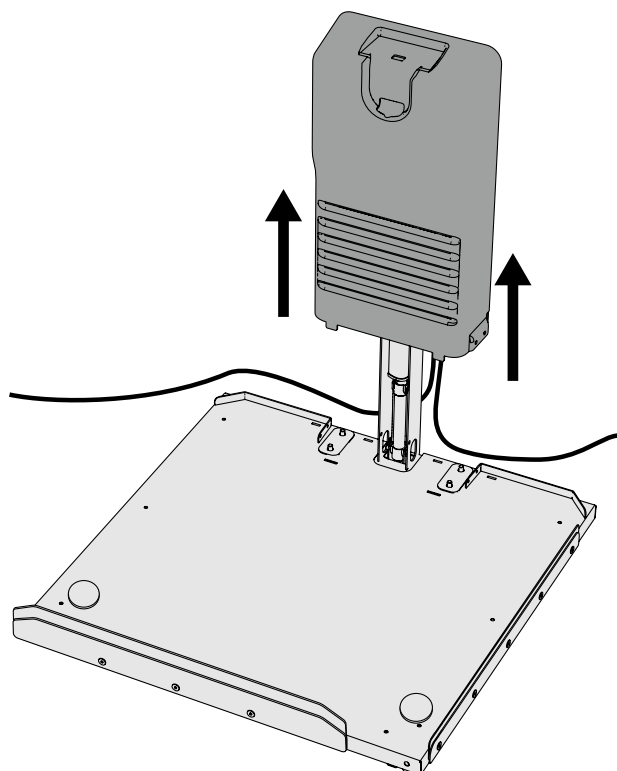


①側面下部(4ヶ所)と背面上部(1ヶ所)にあるモーターユニット固定ネジを取り外してください。

【側面下部】

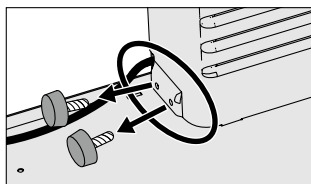


【背面上部】

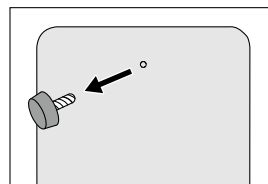


②(有線)リモコンのフックを取り外し、モーターユニットカバーを外しながら(有線)リモコンをモーターユニットカバーの穴に入れ、カバーを取り外します。

取り外したフックは紛失防止のため、(有線)リモコンに取り付けておいてください。

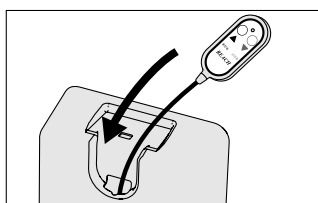


5 緊急用電源の取り外し

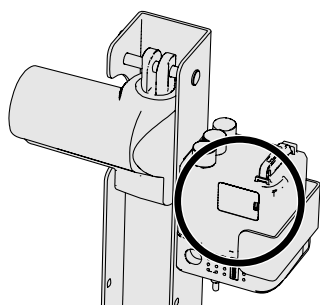


①モーター前面のフタを開きます。

②中の電源ソケットから付属の9V角型乾電池を取り外してください。(2ヶ所)

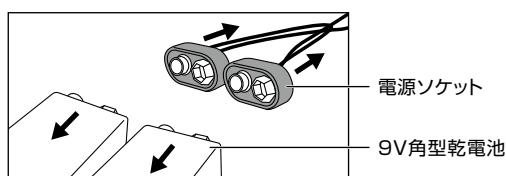


③電源ソケットをボックス内に収容し、フタを閉じてください。

6 テーブルの取り外し

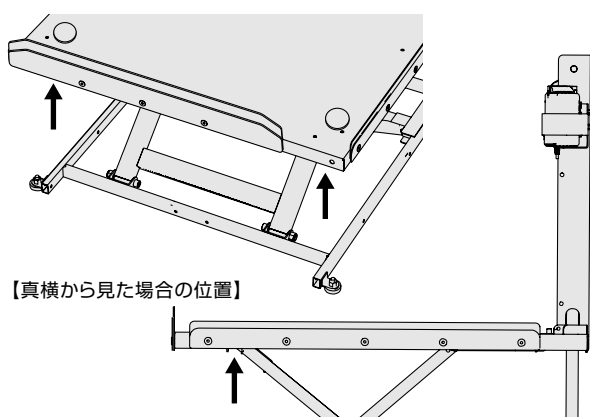


①テーブルの固定を外します。


フレームとテーブルを固定しているピンを外してください。

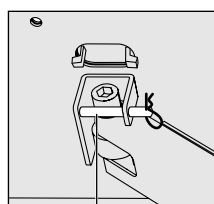

テーブル固定ピン

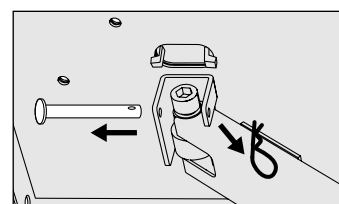


分解方法

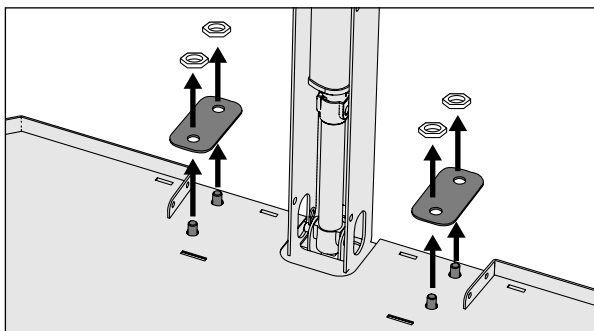

②(有線)リモコンを操作してテーブルを一番下まで下げてください。



③電源コードをコンセントから抜いてください。

④17mmスパナでナット・ワッシャープレートを取り外します。(4ヶ所)

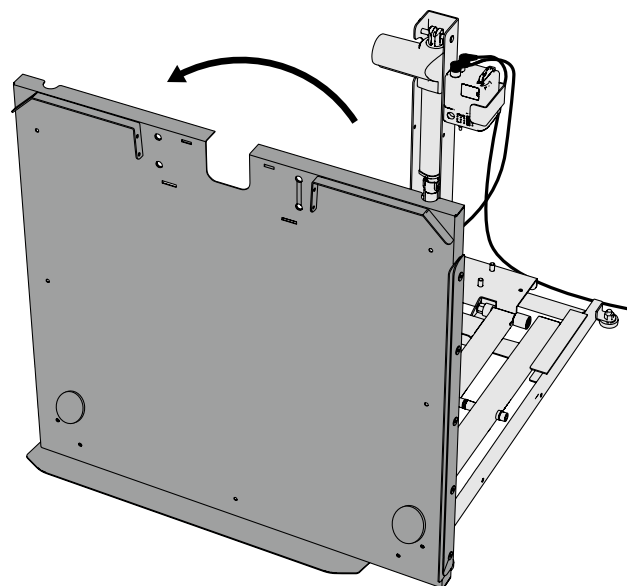


⑤モーターユニットを外側に押しながらモーターユニット側からゆっくりとテーブルを起こしてください。



手、足のはさみ込みには十分注意してください。

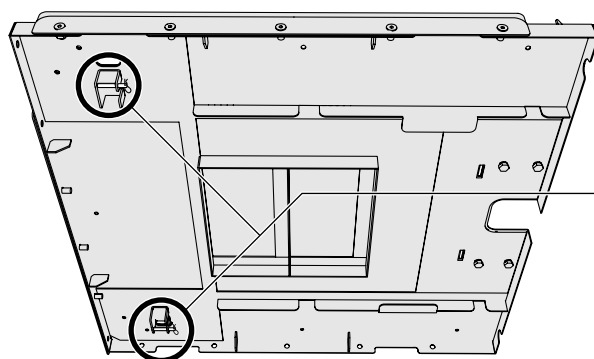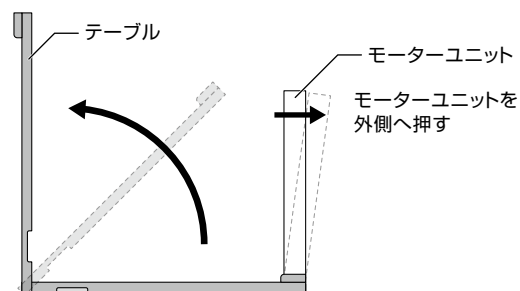

⑥①で外したテーブル固定ピンは紛失防止のため、テーブル裏面の元の穴に取り付けておいてください。(2ヶ所)

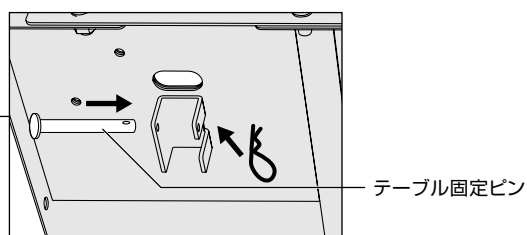


7 モーターユニットの取り外し

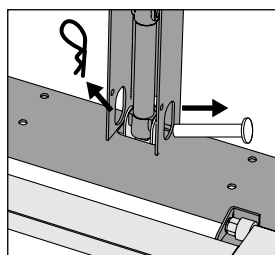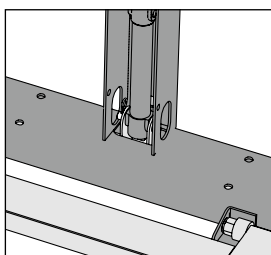

①モーターフレームを取り外します。


モーターフレームとフレームユニットを固定しているショートピンを外してください。

分解方法

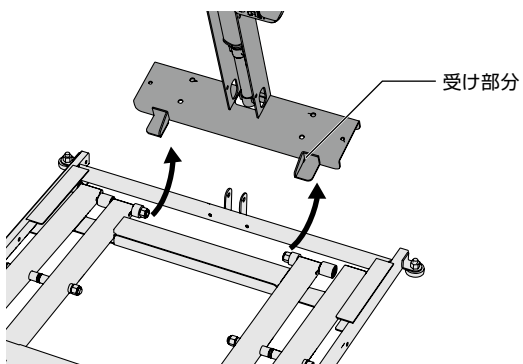


- ②モーターフレームを倒しながら、フレームユニットからゆっくり取り外してください。

※床面をこすって傷つけないよう十分注意してください。

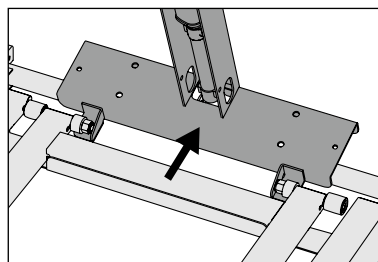


- ③①で外したショートピンは紛失防止のため、フレームユニットの元の穴に取り付けておいてください。

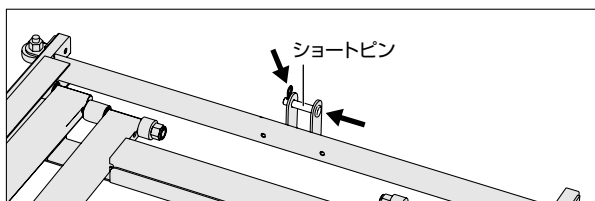


運搬方法

テーブルおよびフレームの運搬方法

【テーブルを運搬する場合】

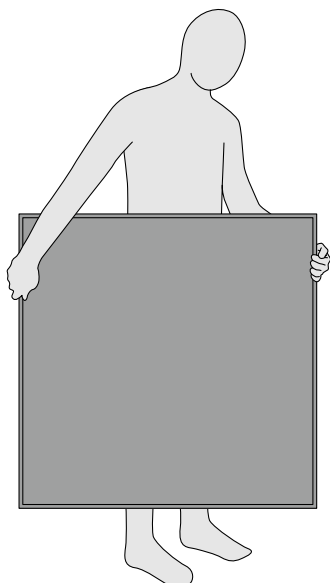

【フレームを運搬する場合】

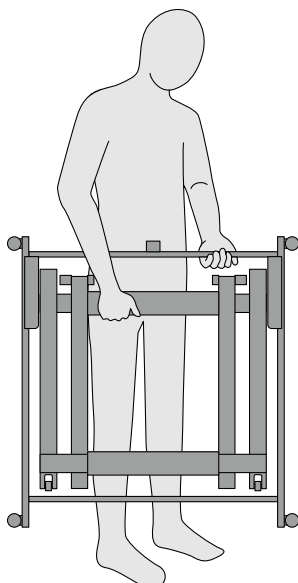

【テーブルを運搬する場合】


表面を自分側に向け、両端を持って運んでください。

【フレームを運搬する場合】

フレームの上部を持って運んでください。

⚠ 注意

- ① 足の上に落とさないよう十分注意してください。
- ② フレームを運搬する場合は、フレームの間に手をはさまないように十分注意してください。

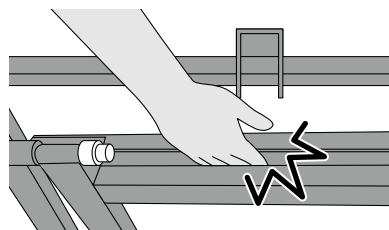

保管方法

長期間にわたり使用しない場合は、下記の点にご注意ください。

- ⊗ 他のものと重ねて置いたり、不安定な状態で立て置き保管はしないでください。
- ⊗ 重いものを上に載せないでください。(変形の原因になる場合があります)
- ⓪ 汚れを取り除き、よく乾燥させて保管してください。
- ⓪ 材質や色が変化するおそれがあるので、直射日光の当たらない場所で保管してください。

お手入れ方法

消毒する場合は、アルコール消毒剤などを柔らかい布に吹き付けてから清拭してください。

清拭する場合は、中性洗剤を水で薄め柔らかい布に浸し、よく絞ってから清拭してください。仕上げに乾いた布で拭き取ってください。



- ⊗ 次亜塩素酸を使用する場合は、6%水溶液を100～200倍に希釈して清拭し、仕上げに水拭きしてください。
- ⊗ 有機溶剤(シンナーやベンジンなど)、強酸性洗剤は使用しないでください。
- ⊗ オゾンガスは金属部分に影響を与えるため、使用しないでください。
- ⊗ 60℃以上の温度を加えないでください。
- ⊗ 金属ブラシ、ナイロンたわしなどはキズをつけるため、使用しないでください。


点検項目

下記の点検項目を確認してください。

異常があった場合は、お求めの販売店または(株)モルテン健康用品事業本部お客様窓口までご相談ください。

点 検 項 目		確 認	
1	あがりかまちとのすき間の確認(1cm目安) ・ テーブルとあがりかまちが接触していたり、すき間が広すぎたりしていませんか？	YES ☐	NO P10参照
2	テーブル、フレームユニット、モーターカバーの確認 ・ ガタつきはありませんか？	YES ☐	NO P10参照
3	動作の確認 ・ 上昇、下降の動作がスムーズにできますか？	YES ☐	NO P10参照
4	モーターの確認 ・ 異音がしていませんか？	YES ☐	NO
5	緊急用電源の確認 ・ 9V角型乾電池を2ヶ取り付けましたか？ ・ 9V角型乾電池の使用期限は切れていませんか？	YES ☐	NO P7参照
6	配線の確認 ・ 電源コードとリモコンコードがテーブルやフレームにはさまれていませんか？ ・ きちんと配線が固定されていますか？	YES ☐	NO P11参照
7	ボルト・ナット、ロングピン、ショートピンの確認 ・ 確実に固定されていますか？	YES ☐	NO
8	テーブル固定ピン、テーブルキャップの確認 ・ 確実に固定されていますか？	YES ☐	NO P9参照
9	保護カバーの確認 ・ 確実に取り付けていますか？	YES ☐	NO P12参照

このようなときには

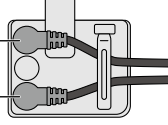症 状	確 認	処 置
テーブルが 上昇・下降しない	電源コードがコンセントに 接続されていますか？	電源コードをコンセントに接続してください。 (P9参照)
	(有線)リモコンのコードが 外れていませんか？	(有線)リモコンのコードをモーターに 正しく接続してください。 【モーターを上から見た図】  (有線)リモコンコード 電源コード
	ワイヤレス(無線)リモコンの電池が 消耗していませんか？	12V・23A乾電池を交換してください。 (P10、P14参照)
	ワイヤレス(無線)リモコンに 単5電池を使用していませんか？	12V・23A乾電池に交換してください。 (P10、P14参照)

このようなときには


症 状	確 認	処 置
テーブルが 上昇・下降しない	120kg以上の荷重が かかっていませんか？	上昇可能な最大上昇荷重は120kgまでです。 (最大耐荷重<保持>は150kgまで)
上昇の動きがおかしい	連続運転していませんか？	30分後に再操作してください。
テーブルが 上昇するが下降しない	テーブル下側に何か入っていたり、 何かに引っかかっていませんか？	引っかかっているものを取り除いてください。
全体がガタつく	アジャスターが浮いていませんか？	アジャスターが浮かないように 床面につくまで下げてください。(P10参照)

上記の処置で直らなかった場合、またはその他の現象の場合は、お求めの販売店または
(株)モルテン 健康用品事業本部 お客様窓口までご相談ください。

株式会社 モルテン 健康用品事業本部 お客様窓口
TEL(082)578-9226

〈電話による受付時間〉月曜日～金曜日／9:00～17:00 ※祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休業日など弊社休業日を除く

仕 様

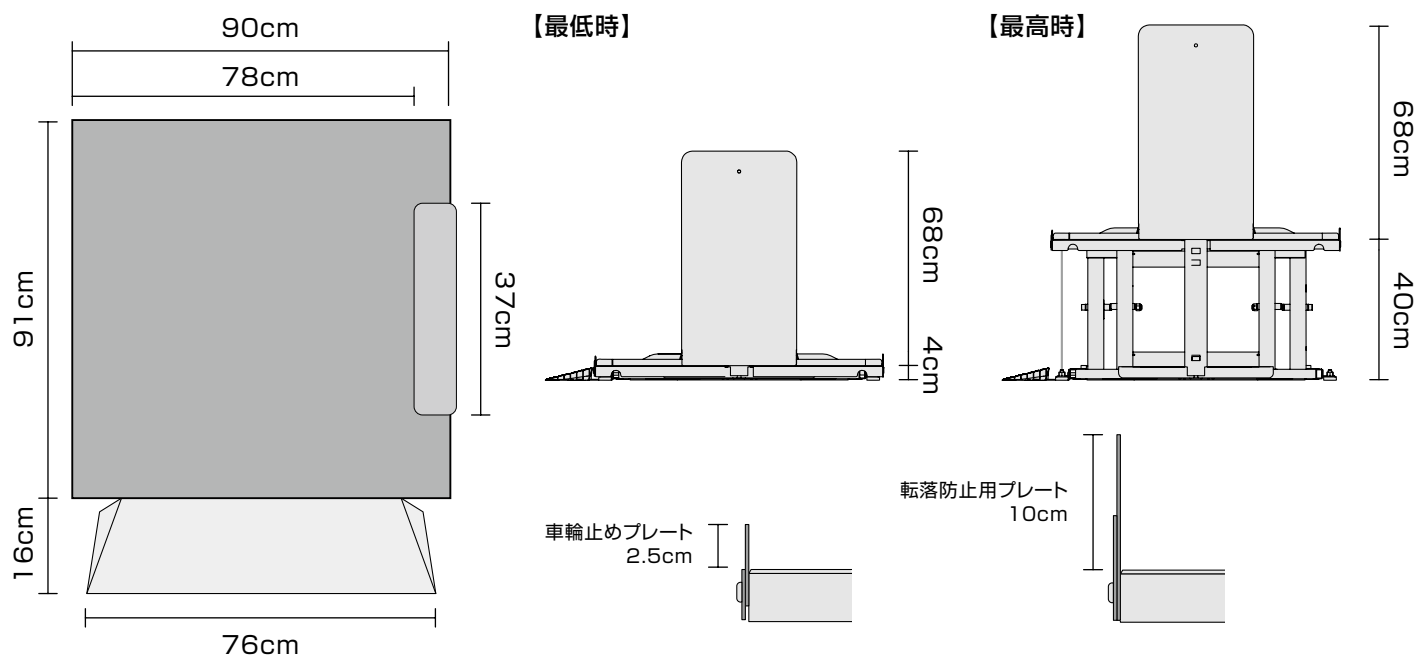

リーチ<電動式>

品番：MREAD

- 素 材：スチール
- 本 体 サ イ ズ：最低時＝幅90×長さ91×高さ72cm(テーブル高さ4cm)
最高時＝幅90×長さ91×高さ108cm(テーブル高さ40cm)
最大耐荷重(保持)=150kg 最大上昇荷重=120kg
- 昇降用モーター：AC100V 50/60Hz 120W
- 重 量：52kg

開発・製造元

ISO9001 認証取得

ISO13485 認証取得

※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、
製造および付帯サービスにて取得

本製品の取扱説明書と使用方法動画は
下記QRコードからダウンロードいた
できます。



取扱説明書



動画で見る製品情報

株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部

www.molten.co.jp/health

東京 札幌 仙台 埼玉 名古屋 大阪 広島 福岡

製品他、各種お問い合わせは

〒733-0036 広島市西区観音新町四丁目10-97-21

TEL.082-578-9226

E-mail: health@molten.co.jp

〈電話による受付時間〉月曜日～金曜日／9:00～17:00
※祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休業日など弊社休業日を除く

2022.10