

トランスファーボード スライディ／スライディM 取扱説明書

●品番 スライディ：MSLD／スライディM：MSLDM

注意事項

必ず理学療法士や作業療法士、福祉用具専門相談員などの専門家にご相談・指導の上で使用ください。



警告

- ① 本製品は、車いす・ベッド間などの移乗を補助するトランスファーボードです。本来の目的以外に使用しないでください。
思わぬ事故やケガにつながるおそれがあります。
- ② 本製品を改造しないでください。
破損や事故につながるおそれがあります。
- ③ 本製品には正しい向きがあります。裏表を間違えて使用しないでください。
思わぬ事故やケガにつながるおそれがあります。
- ④ 最大使用者体重は100kgです。使用者体重が100kgを超える場合は、使用しないでください。
思わぬ事故やケガにつながるおそれがあります。
- ⑤ 必ず裏面の滑り止め部が車いすのフレームや座面、ベッド上のマットレスなどにあたるように使用してください。
思わぬ事故やケガにつながるおそれがあります。
- ⑥ 破損やひび割れなどの異常がある場合は、使用しないでください。
思わぬ事故やケガにつながるおそれがあります。



注意

- ① 車いすは駐車ブレーキをかけ、動かないようにしてください。
- ② 必ず衣類などを着用して使用ください。
直接皮膚が触れた状態でボードを移動するとケガのおそれがあります。


各部名称および梱包内容

以下の部品が全てそろっているか、破損・変形などしていないかを確認してください。
万が一、部品の不足・破損があった場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。

本体：1枚



【おもて面】

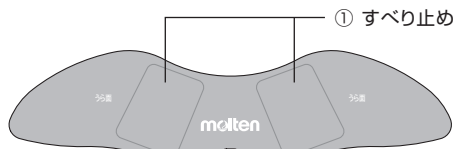

【うら面】

付属品



取扱説明書
：1部

使用方法


移乗は、車いすのアームサポートが邪魔にならないことを確認して行ってください。
邪魔になる場合は、アームサポート取り外しや跳ね上げ、伸縮可能な車いすを使用してください。

車いすとベッドの角度は30度ぐらいを目安にしてください。
初めての使用では、利用者様へ説明の上、使用してください。

- ① フットサポートを両方とも跳ね上げ、足元を動きやすくしてください。
- ② 移乗先が低くなるように高さを調整してください。
- ③ お尻が半分乗るまでボードを敷いてください。
- ④ 移乗先へ体を傾け、お尻を滑らせてください。
- ⑤ 移乗先へお尻が全て乗っているか確認ください。
- ⑥ ボードの反対側を持って引き上げるように抜いてください。

ベッド

使用方法の
動画はこちら

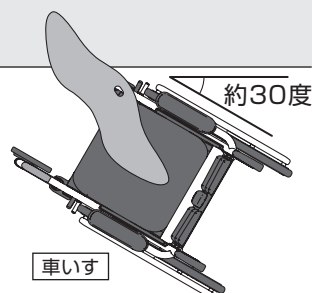

車いす

使用方法



警告


必ず裏面の滑り止め部が車いすのフレームや座面、ベッド上のマットレスなどにあたるように使用してください。




注意

- ①使用前にひび割れなどの破損がないか点検してください。
- ②車いすは駐車ブレーキをかけ、動かないようにしてください。
- ③抜き差ししやすい形状になっており、多少変形することがあります。変形が大きい場合は、手で慣らしてから使用してください。

介助移乗のポイント

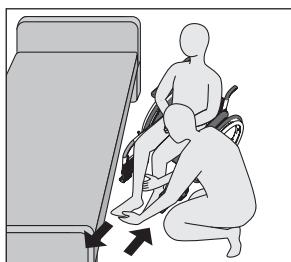

①ベッド側の足を一步前に出して、反対側の足を引きます。

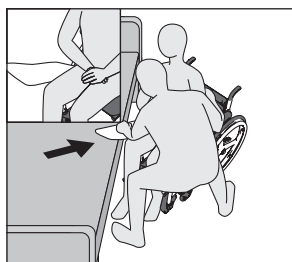

②お尻とクッションの間にボードを差し込みます。




③右肩と左腰に手を添え、ベッド側の足を軸足にしてボード上を滑らせます。




④ボードを引き抜いて完了です。


自立移乗のポイント

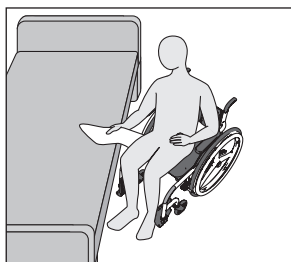

①お尻とクッションの間にボードを差し込みます。

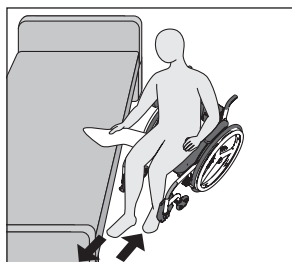

②ベッド側の足を一步前に出して、反対側の足を引きます。

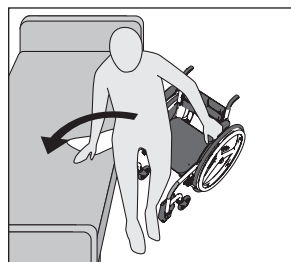

③ベッド側の足を軸足にしてボード上を滑ります。



④ボードを引き抜いて完了です。

お手入れ方法

消毒する場合は、アルコール消毒剤などを柔らかい布に吹き付けてから清拭してください。

清拭する場合は、中性洗剤を水で薄め柔らかい布に浸し、よく絞ってから清拭してください。

仕上げに乾いた布で拭き取ってください。

- 塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)を使用する場合は、0.05%に希釈して清拭し、仕上げに水拭きしてください。
- 有機溶剤(シンナーやベンジンなど)、強酸性洗剤は使用しないでください。
- 60℃以上の温度を加えないでください。
- 金属ブラシ、ナイロンたわしなどはキズをつけるため、使用しないでください。



仕様

スライディ

品番 スライディ: MSLD
スライディM: MSLDM

●素材: ポリプロピレン

スライディ サイズ: 幅18.0×長さ65.0×厚み0.5cm 重量: 0.35kg

スライディM サイズ: 幅30.0×長さ65.0×厚み0.4cm 重量: 0.45kg

開発・製造元

ISO9001 認証取得
ISO13485 認証取得
※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、製造および付帯サービスにて取得
本製品の取扱説明書と使用方法動画は下記QRコードからダウンロードいただけます。



取扱説明書



動画で見る製品情報

株式会社 モルテン

健康用品事業本部

www.molten.co.jp/health

東京 札幌 仙台 埼玉 名古屋 大阪 広島 福岡
製品他、各種お問い合わせは

〒733-0036 広島市西区観音新町四丁目10-97-21

TEL.082-578-9226

E-mail: health@molten.co.jp

〈電話による受付時間〉月曜日～金曜日/9:00～17:00

※祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休業日など弊社休業日を除く