


室内用歩行車 **エスコート**

取扱説明書

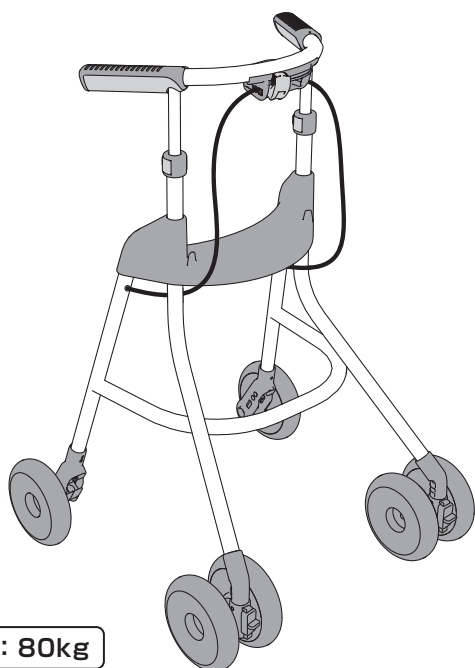

最大利用者体重：80kg

目次

○使用方法	P1
○点検項目	P3
○お手入れ方法	P4
○注意事項	P5
○各部名称および梱包内容	P5
○仕様	P6

安全にお使いいただくために

この度は当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。ご使用前に取扱説明書を確認の上、正しくお使いください。確認後は、本取扱説明書を大切に保管してください。また利用者様の身体状況や環境が変化した場合には、看護師・福祉用具専門相談員などの専門の方に相談し適切な処置を受けてください。

安全上の注意 必ずお守りください

①利用者様や他の人への危害・財産への損害などを未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

取扱説明書に表示されている記号や用語は、表示内容を見逃し誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次のような表示区分であらわしています。

⚠ 警告：死亡または重傷などを負う可能性を意味します。

⚠ 注意：障害を負うまたは物的損害を発生させる可能性を意味します。

注意：本製品の故障を防止するための注意事項や、より満足に使用していただくためのアドバイスを意味します。

②お守りいただく内容の種類を次の表示区分であらわしています。

⊘：してはいけない「禁止」を意味します。

⚡：必ず実行していただく「強制」を意味します。

エスコートは屋内向け歩行車です。




警告

- ① エスコートは主に自力で歩行できるが、歩行に不安のある方が対象です。
- ② 使用する場合は、福祉用具専門相談員または医療従事者に相談してください。
- ③ 歩行が不安定な方（認知症、ふらつきのある方）は同伴者の付き添いのもとと使用してください。
- ④ 最大利用者体重は80kgです。

1 ハンドルの高さ調整

グリップハンドルを利用者様の歩行姿勢に適した高さに調整します。

76／80／84／88／92cmの5段階で調整できます。

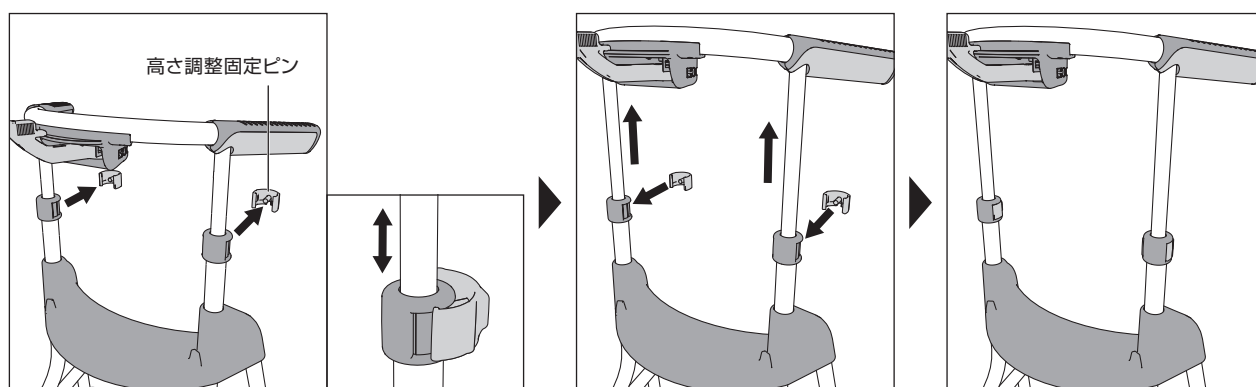

- ① 左右の高さ調整固定ピンを外して支柱を手で支えながら左右のハンドル高さを合わせます。

※高さ調整固定ピンを完全に取り外さない状態でも、ハンドル高さ調整は可能です。

- ② グリップハンドルの穴位置と本体フレーム穴位置を合わせ、固定ピンを差し込みます。


- ③ 固定ピンは奥まで確実にセットしてください。



警告

身体状況に合わせた歩行しやすいハンドル高さにして、ゆっくり歩行してください。

2 駐車ブレーキ操作方法

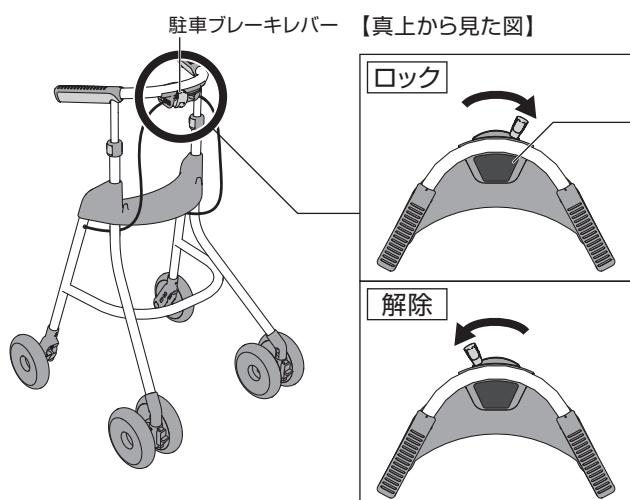

駐車ブレーキレバーを右に倒すとリアキャストの両輪の駐車ブレーキをロック、左に倒すと解除します。

駐車ブレーキシール




警告


歩行時には必ず駐車ブレーキのロックを解除し、確認してから動き出してください。
転倒につながるおそれがあり、大変危険です。

使用方法

押して歩く場合 ※以下のことに注意して使用してください。

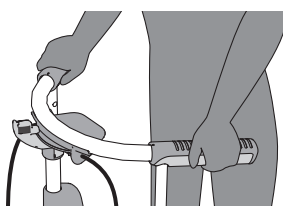



ハンドルグリップを握ってゆっくり歩行してください。

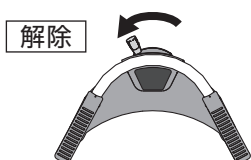

解除


歩行時には必ず駐車ブレーキのロックを解除し、確認してから動き出してください。

身体状態に合わせた歩行しやすいハンドル高さにしてください。

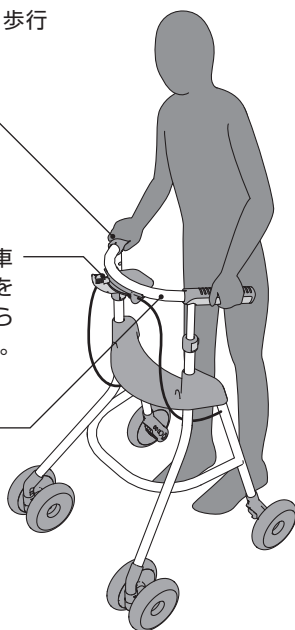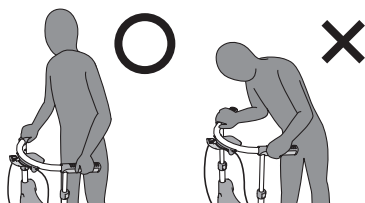

凹凸、段差、溝のあるところでは手前で止まり、十分注意して慎重に段差を越えてください。

ハンドルグリップに寄りかかったり、荷物を下げたりしないでください。

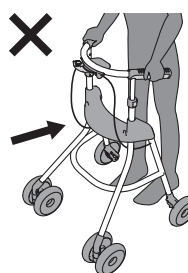


後方に歩行はできません。旋回して方向を前向きにしてください。



注意

- ①歩行が不安定な方(認知症、ふらつきがある方)は、同伴者の付き添いのもとで使用してください。
- ②本体フレームに足をかけたり、踏みつけたりしないでください。
転倒したり、製品破損の原因になります。



テーブルを支えに立ち上がる場合 ※以下のことに注意して使用してください。

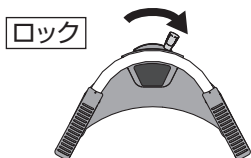

ロック

必ず駐車ブレーキを右に倒してロックしてください。


エスコート本体が立ち上がりの位置より距離が離れている状態での操作は不安定です。できるだけ近くで操作してください。

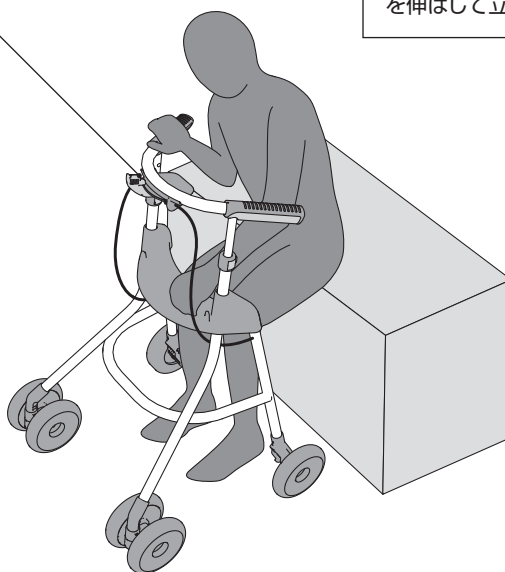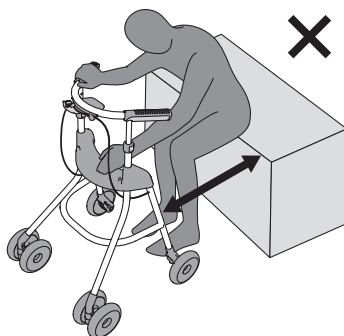

ワンポイントアドバイス

エスコートを正面に置き、テーブルに手を置いて上から体重をかけ、前傾姿勢をとってから次に膝を伸ばして立ち上がってください。

テーブルを引き込みながら立ち上がらないでください。不安定になります。

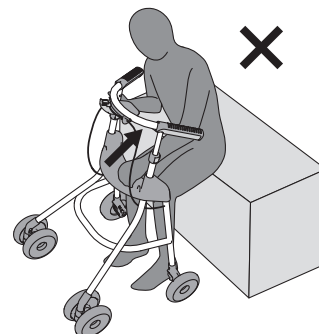

注意

立ち上がりが不安定な方は、同伴者の付き添いのもとで使用してください。

点検項目

下記の点検項目を確認してください。

異常があった場合は、(株)モルテン健康用品事業本部お客様窓口までご相談ください。

点 検 項 目		確 認	
1	ハンドルグリップの高さの確認 ・歩行姿勢に合っていますか？ ・水平になっていますか？	YES ☐	NO
2	ハンドル高さ固定ピンの確認 ・セット(ロック)されていますか？	YES ☐	NO
3	駐車ブレーキの確認 ・駐車ブレーキの操作(ロック)でリアキャストは止まりますか？ ・駐車ブレーキの操作(解除)でリアキャストは停止、回転できますか？	YES ☐	NO
4	グリップハンドル・テーブルの確認 ・ガタつき・キズ・変形はありませんか？	YES ☐	NO
5	キャストの確認 ・真っすぐ歩行できますか？ ・キャストの摩耗・キズはありませんか？ ・ガタつき・部品外れ・大きなキズはありませんか？ ・回転はスムーズですか？ ・異物・髪の毛を巻き込んでいませんか？	YES ☐	NO
6	フレームの確認 ・真っすぐ歩行できますか？ ・ゆがみ・変形・キズはありませんか？	YES ☐	NO

お手入れ方法

消毒する場合は、アルコール消毒剤などを柔らかい布に吹き付けてから清拭してください。

清拭する場合は、中性洗剤を水で薄め柔らかい布に浸し、よく絞ってから清拭してください。仕上げに乾いた布で拭き取ってください。



- ⓪ 次亜塩素酸を使用する場合は、6%水溶液を100～200倍に希釈して清拭し、仕上げに水拭きしてください。
- ⓪ 有機溶剤(シンナーやベンジンなど)、強酸性洗剤は使用しないでください。
- ⓪ オゾンガスは金属部分に影響を与えるため、使用しないでください。
- ⓪ 60℃以上の温度を加えないでください。
- ⓪ 金属ブラシ、ナイロンたわしなどはキズをつけるため、使用しないでください。

エスコートは屋内向け歩行車です。



- ① エスコートは主に自力で歩行できるが、歩行に不安のある方が対象です。
使用する場合は、福祉用具専門相談員または医療従事者に相談してください。
- ② 歩行が不安定な方（認知症、ふらつきのある方）は同伴者の付き添いのもとで使用してください。
- ③ 最大利用者体重80kgです。
- ④ 使用前に以下の作動を確認してください。
 - ・ 駐車ブレーキの操作で両輪のロックおよび解除が正しく作動すること。
 - ・ 両車輪（リアキャスト）がしっかりと固定されスムーズにガタつきなく動くこと。
 - ・ ハンドルの高さが水平に固定され、各部のガタつきがないこと。異常個所が発見された場合は、直ちに使用をやめて修理などの処置をして下さい。
- ⑤ 身体状況に合わせた歩きやすいハンドル高さにあわせ、ゆっくり歩行してください。
- ⑥ 歩行時はハンドルグリップをしっかり握って使用してください。
事故や転倒などによりケガをするおそれがあります。
- ⑦ 歩行時は必ず駐車ブレーキのロックを解除し、確認してから動き出してください。
ロックしたまま動き出すと、転倒につながるおそれがあり、大変危険です。
- ⑧ 歩行時に後方への歩行はできません。旋回して前向きに歩行してください。
後方への歩行は、転倒につながるおそれがあり、大変危険です。
- ⑨ 使用する場所に十分注意してください。
凹凸、段差および溝のあるところでは、手前で止まり、十分注意して慎重に障害を越えてください。
凹凸、段差および溝のあるところでは、斜めに侵入しないでください。事故や転倒などによりケガをするおそれがあります。
- ⑩ テーブルを利用して立ち上がる場合は、必ず駐車ブレーキをロックして立ち上がってください。
立ち上がりが不安定な方は、同伴者の付き添いのもとで使用してください。
- ⑪ テーブルに乗ったり座ったりしないでください。
- ⑫ テーブル左右の突起に荷物を吊り下げの場合は、左右バランスよく掛け、重たいもの、長尺なものを吊り下げないでください。
事故や転倒などによりケガをするおそれがあります。
- ⑬ ハンドルグリップ部に寄りかかったり、荷物を吊下げたりしないでください。
事故や転倒などによりケガをするおそれがあります。
- ⑭ 傾斜地では使用しないでください。また、ワックス、水濡れ等で滑りやすくなった床等では十分注意して使用してください。
- ⑮ 本製品を改造しないでください。
思わぬ事故やケガにつながるおそれがあります。





- ① タイヤ、ブレーキの摩耗がないか定期的に保守・点検し、必要に応じて修理・交換を行ってください。
- ② キャスター部のガタつき、部品外れ、大きなキズを定期的に確認し、必要に応じて修理・交換を行ってください。

各部名称および梱包内容

以下の部品が全てそろっているか、破損・変形などしていないかを確認してください。

万が一、部品の不足・破損があった場合は、(株)モルテン健康用品事業本部お客様窓口にご連絡ください。

●エスコート 本体一式

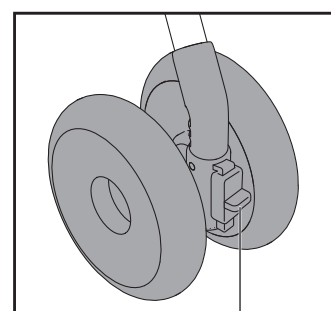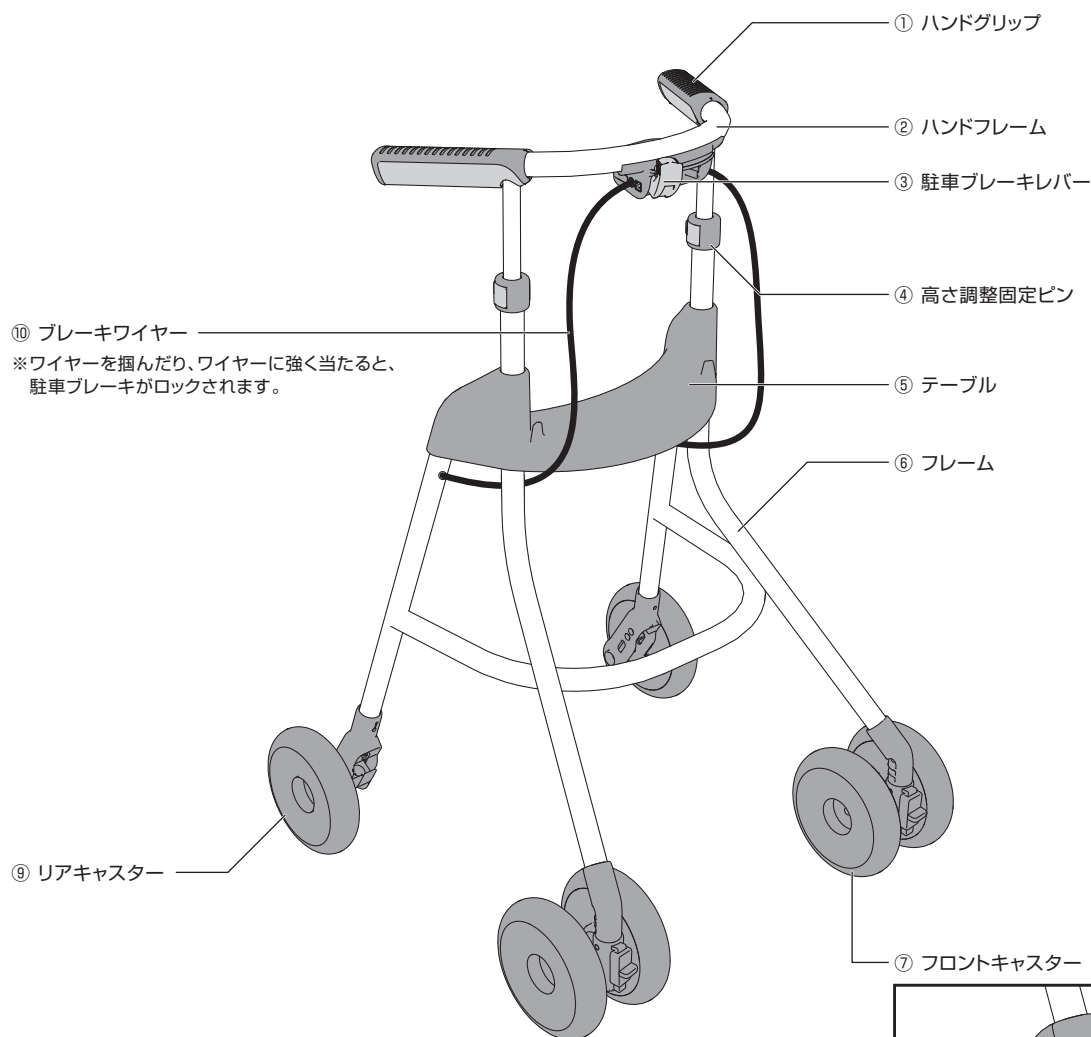



※フロントキャスターはスライドロックを上上げることで旋回回転止めができます。

付属品



取扱説明書
兼 保証書
：1部

仕 様

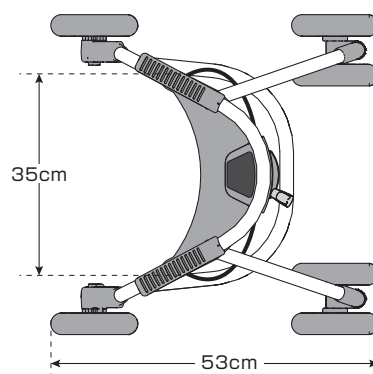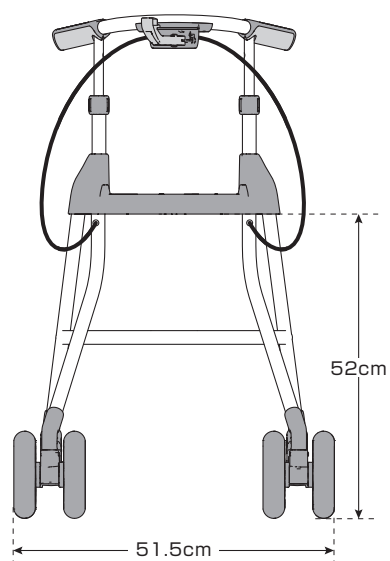

エスコート

品番 MESCP

- 素 材：フレーム本体=アルミニウム合金
テーブル=ABS樹脂
キャスター=EVA樹脂
- キャスターサイズ：φ14.5cm
- 重 量：3.0kg
- ハンドル高さ：76/80/84/88/92cm(ハンドル中心)

開発・製造元

ISO9001 認証取得

ISO13485 認証取得

※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、
製造および付帯サービスにて取得

本製品の取扱説明書と使用方法動画は
下記QRコードからダウンロードいた
できます。



取扱説明書



動画で見る製品情報

株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部

www.molten.co.jp/health

東京 札幌 仙台 埼玉 名古屋 大阪 広島 福岡

製品他、各種お問い合わせは

〒733-0036 広島市西区観音新町四丁目10-97-21

TEL.082-578-9226

E-mail:health@molten.co.jp

〈電話による受付時間〉月曜日～金曜日 / 9:00～17:00
※祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休業日など弊社休業日を除く

2023.05