

「自動体位変換機能」を搭載した 高機能エアマットレス

OSCAR

オスカー (コンパクト収納タイプ)



介護保険福祉用具貸与品：床ずれ防止用具

対象者


自分の力で寝返りができない人で、
人による体位変換が受けられない人

PAT.

特殊な工法により向上した 『体圧分散性能』

身体と接触するエアセルの表面を特殊な工法によりフラット (平ら) にすることで体圧分散性能を向上しています。


フラット形状のエアセル

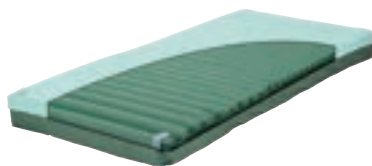

誰が寝ても安全・安心の 『自動体圧調整』


体型や体重に関係なく、誰が寝ても最適な体圧分散になるように自動で調整します。

体圧調整前 (寝た直後)

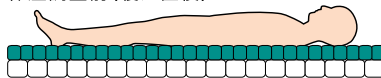

自動調整

体圧調整後 (数分後)

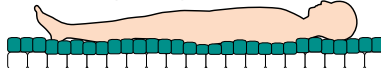


状況に応じて切り替えできる 『除圧性能』

利用者様の身体状況に合わせて2種類の圧切替の動き (除圧) が選べます。

<安定重視>


(全体の25%で除圧を行います)

おすすめ

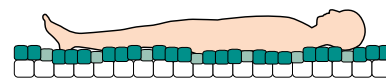

<除圧重視>

(全体の50%で除圧を行います)

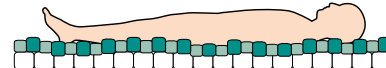

利用者様と介護者様にやさしい『自動体位変換機能』と『体位指定機能』

4つのポジショニングセルで人の手に近いやさしい体位変換を行います。

<自動体位変換機能>

自動体位変換は“仰臥位→側臥位→仰臥位”を一連の動きで行います。
身体状況に合わせて体位変換の「保持時間」や「角度」などを設定できます。



左側臥位

仰臥位

右側臥位

<体位指定機能>

仰臥位や左右の側臥位だけではなく、「セミファウラー位」「ひざ上げ」に対応し、おむつ交換や口腔ケア、安楽姿勢など、目的に合わせて指定の体位に変換することができます。



セミファウラー位

ひざ上げ

TAISコード：00054-000139

品番	マットサイズ (cm)			重量 (kg)	適合ベッドサイズ		価格
	幅	長さ	厚さ		幅	長さ	
MOSC83A	83	193	17	10.0	83cm程度	レギュラー	234,740円 (税抜価格213,400円)
MOSC91A	91	193	17	11.5	91cm程度	レギュラー	
MOSC83SA	83	182	17	9.5	83cm程度	ショート	
MOSC91SA	91	182	17	11.0	91cm程度	ショート	

<素材>

- マット部：ウレタンフィルム
- カバー：ウレタン合皮 (制菌加工)

開発・製造
販売元

医療・福祉機器 総合メーカー

株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部 www.molten.co.jp/health

東京/札幌/仙台/さいたま/名古屋/大阪/広島/福岡



ISO9001 認証取得
ISO13485 認証取得

※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、製造および付帯サービスにて取得