


オスカー 簡単操作マニュアル

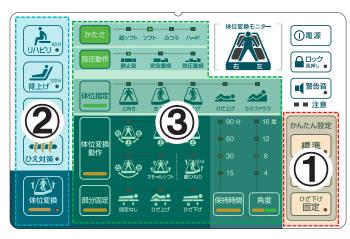

■ リモコン操作パネル

①最初の設定

ご使用になる前に、必ず設定してください。

②アシストモード

日常の生活をアシストするためのモード設定ができます。

③マニュアルモード

マットレスの動作をお好みに合わせて設定できます。必要に応じて設定してください。

1. 最初の設定 オスカーをご使用になる前に、必ず設定して公舎い。

<かんたん設定の目安>

※「かんたん設定」後は「体位変換」モードがONになるので 必ずベッドの背を下げて設定してください。

上体とひざの両方を 標準 ● ひざが曲がっていない人 傾けて体位変換をします。 上体とひざを1ヶ所毎に ● エアマットレスを初めて使用する人 船酔い 小さく傾けて体位変換を 対策 ● 体位変換の動きを抑えたい人 します。 ひざは下げたままで ● ひざがかなり曲がっている人 ひざ下げ 上体だけを傾けて 固定 ● 下肢を動かしたくない人 体位変換します。

2. アシストモード

アシストモードを使えば、日常の生活場面に合わせてマットレスの設定を簡単に変更できます。 各項目の使用方法についてはウラ面をご確認ください。



60分タイマー マットが安定し、 リハビリや離床を サポートします。



120分タイマー 安定性を高め 背上げ姿勢を サポートします。



寝床内の湿った 空気を換気して むれを対策します。



寝床内の常温 に維持してひえ を対策します。



自動で体位変換 を行います。

日常で使用するリモコン操作

マットレスの設定内容 このような時には 設定ボタン マットレスのふわふわ感を解消して、 リハビリ リハビリや介護がしやすいかたさにな ●マットレスの上でリハビリをしたい。 ります。 n (1) ●おむつ交換や着替えなどの介護を 体位変換実施時はマットレスが上向 リハビリー したい。 になります。 ※60分でもとのマットレス状態に戻ります。 ※動作中はランプがつきます。 マットレスの安定性を高め、背上げ姿勢 背上げ をサポートします。 体位変換実施時はマットレスが上向 ●食事の間、背上げをしたい。 **(2**) になります。 ●口腔ケアをする間、背上げをしたい。 背上げ["] ※120分でもとのマットレス状態に戻ります。 ※120分以上背上げをする場合は、再度 ※動作中はランプがつきます。 ボタンを押して設定してください。 むれ対策 ●入浴後で寝床内がむれている。 断続運転で足元側から送風をします。 (3) ●清拭後で寝床内がむれている。 ※身体を冷やすための冷房機能や温度調 むれ対策。 整機能ではありません。 ※動作中はランプがつきます。 ひえ対策 マットレス内部からマットレス表面を常 温(32℃程度)に温めます。 **(4**) ●マットレスの表面がつめたい。 ※身体を温めるための暖房機能や温度調 ひえ対策。 整機能ではありません。 ※動作中はランプがつきます。 体位変換【入】 ●自分ではうまく体位変換できない。 自動で体位変換を行います。 ●睡眠を妨げないように、夜間は自動 (設定した動作を繰り返し行います) **(5)** 体位変換にしたい。 ※標準設定では以下の設定となります。 ●角度=12度 ●家族が留守にする間、自動体位変換 ●時間=30分(3体位変換) にしたい。 ※【入】の時はランプがつきます。 体位変換【切】 ●昼間は家族で体位変換したい。 マニュアルモードで指定した体位に ●自動体位変換を止めたい。 **(6)** 体位変換します。 体位变换 ※標準設定では上向きになります。 ●好みの体位に変換したい。 ※【切】の時はランプが消えます。 ●注意ランプが点滅している。 ■ 単 注意 ≝ ≝ 注意

【停電時の対策】

(7)

長時間の停電で、マイクロエアセルの空気が全て抜けてしまったとしても、 ウレタンフォームのフィッティング層+底着き防止層があるため、静止型 マットレス同等の体圧分散性があるので安心してご使用ください。 但し、マイクロエアセルの空気が抜けた状態では、エアマットレスの除圧

●警告音が鳴っている。

(ピーピー/ピピピピッ)


効果および機能は発揮されませんので、速やかに復旧に努めてください。

【緊急時の対策】

■●警告音

(警告音【入】の時)

体位変換中は、マットレス足元右側の赤いCPRカプラーの取っ手 を矢印の方向へ強く引っ張り開けてください。 約20秒でフラットに なります。再度使用する場合は、「カチッ」と音がするまで取っ手 を強く閉めてください。

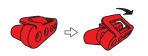

開発·製造元



ご購入およびレンタルされている販売店にご連絡ください。

取扱店