

# オスカー 簡単操作マニュアル



■ リモコン操作パネル

# 1最初の設定

ご使用になる前に、必ず設定してください。

### ②マニュアルモード

マットレスの動作をお好みに合わせて設定できます。必要に応じて設定してください。

## ③アシストモード

日常の生活をアシストするためのモード設定ができます。

# 1. 最初の設定

オスカーをご使用になる前に、必ず設定してください。


#### ① 標準設定

すべての項目が標準的な利用者様の設定になります。



### ② 5つの項目を入力

「体型」「ひざの曲がり」「発汗」「ひえ」「体位変換程度」の5つの項目を入力すると、自動で利用者様の身体状況にあった条件を設定します。

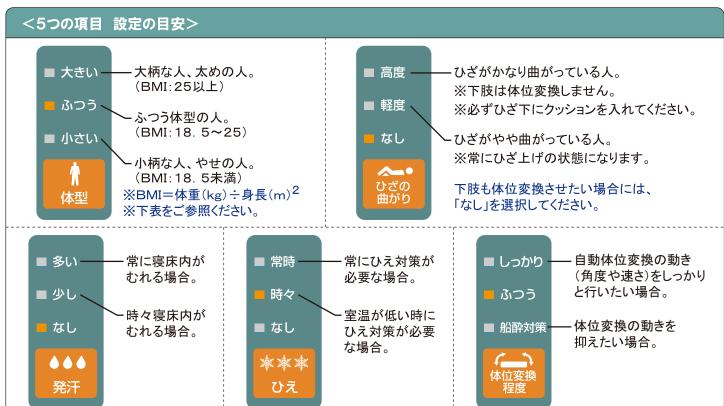

こちらからオスカーの 設定方法の動画が見れます。



	身長毎の体重目安			
体型	140cm	150cm	160cm	170cm
大きい	49kg 以上	56kg 以上	64kg 以上	72kg 以上
ふつう	36~49kg	42~56kg	47~64kg	53~72kg
小さい	36kg 未満	42kg 未満	47kg 未満	53kg 未満

# 2. 日常で使用するリモコン操作

アシストモードを使えば、日常の生活場面に合わせてマットレスの設定を簡単に変更できます。

#### このような時には 設定ボタン マットレスの設定内容 マットレスのふわふわ感を解消して、 リハビリ/CPR リハビリや介護がしやすいかたさにな ●マットレスの上でリハビリをしたい。 リハビリ/CPR ります。 (1)●おむつ交換や着替えなどの介護を ■ 体位変換実施時はマットレスが上向 したい。 になります。 ※動作中はランプがつきます。 ※60分でもとのマットレス状態に戻ります。 マットレスの安定性を高め、背上げ姿勢 背上げ をサポートします。 ●食事の間、背上げをしたい。 背上げ 体位変換実施時はマットレスが上向 **(2**) になります。 ●口腔ケアをする間、背上げをしたい。 ※120分でもとのマットレス状態に戻ります。 120分 ※120分以上背上げをする場合は、再度 ※動作中はランプがつきます。 ボタンを押して設定してください。 強力除湿 強力除湿 ●入浴後で寝床内がむれている。 連続運転で送風をします。 (3) ※60分でもとのマットレス状態に戻ります。 ●清拭後で寝床内がむれている。 60分 ※動作中はランプがつきます。 腰をひねる体位変換を行います。 腰ひねり体位 「右向き」と「左向き」を各1回ずつ 腰ひねり体位 行います。 ●寝たきりなので、体をしっかりと **(4**) ※60分でもとのマットレス状態に戻ります。 動かしてあげたい。 ※関節等の手術直後、痛みがある、拘縮や 60分 リウマチで関節可動域に制限がある等の ※動作中はランプがつきます。 場合には使用しないでください。 ●自分ではうまく体位変換できない。 自動体位変換【入】 自動体位変換を行います。 ●睡眠を妨げないように、夜間は自動 (設定した動作を繰り返し行います) 自動体位変換 **(5)** 体位変換にしたい。 ※標準設定では以下の設定となります。 ●角度=約16度(ふつう) 入/切岗 ●家族が留守にする間、自動体位変換 ●時間=約120分(ふつう・3体位変換時) ※【入】の時はランプがつきます。 にしたい。 自動体位変換【切】 ●昼間は家族で体位変換したい。 自動体位変換 指定体位変換を行います。 **(6)** ●自動体位変換を止めたい。 (指定した体位に体位変換します) ●好みの体位に変換したい。 入/切〇 ※【切】の時はランプが消えます。 ●注意ランプが点滅している。



注意 畄 畄

(7)

●警告音が鳴っている。 (ピーピー/ピピピピッ)



(警告音【入】の時)

ご購入およびレンタルされている販売店にご連絡ください。


#### 【停電時の対策】

長時間の停電で、マイクロエアセルの空気が全て抜けてしまったとしても、 ウレタンフォームのフィッティング層+底着き防止層があるため、静止型 マットレス同等の体圧分散性があるので安心してご使用ください。

但し、マイクロエアセルの空気が抜けた状態では、エアマットレスの除圧 効果および機能は発揮されませんので、速やかに復旧に努めてください。

#### 【緊急時の対策】

- ●心臓マッサージなど緊急の場合には、「リハビリ/CPR」ボタンを押すとマットレスが硬く安定します。
- ●体位変換中は、マットレス足元右側の赤いCPRカプラーの取っ手 を矢印の方向へ強く引っ張り開けてください。 約20秒でフラットに なります。 再度使用する場合は、「カチッ」と音がするまで取っ手 を強く閉めてください。

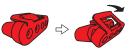

取扱店

#### 開発·製造元



www.molten.co.ip/health