







オスカー 日常のケアで使う機能（アシストモード）

アシスト
モード

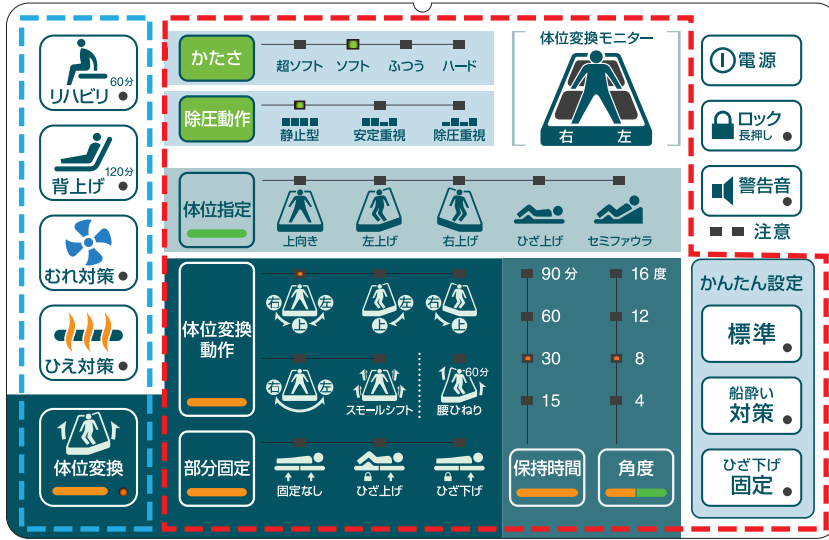

【赤枠内のボタン】は、初めて使用するとき設定するボタンです。日常では操作しません。

日常のケアで使う機能は【青枠内のボタン】で操作します。

ボタン	このようなときに使用します	このようなことができます
① 	リハビリやおむつ交換をするときに	マットレスのふわふわ感がなくなり、かたくなります。
② 	ベッドの背上げをするときに	背中やおしりの圧迫感が軽減されます。
③ 	汗をよくかくときに	“むれ”が軽減されます。
④ 	マットレスが冷たいときに	“ひえ”が軽減されます。
⑤ 	自動体位変換したいときに	利用者様の睡眠を妨げず、介護負担も軽減されます。

ボタンを押すとランプが点灯  します。点灯中が”入”の状態です。

