

「体圧分散性能」「除圧性能」を向上した 高機能エアマットレス

STAGEA

ステージア (コンパクト収納タイプ)



介護保険福祉用具貸与品：床ずれ防止用具

対象者


自分の力で寝返りができない人で、
人による体位変換が受けられる人

PAT.

体圧分散性能


上部にマイクロエアセルを配置することで、
体圧分散性能を向上しています。

内部構造
(長さ方向の断面図)

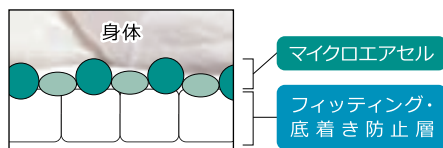


自動体圧調整

体型や体重に関係なく、誰が寝ても最適な
体圧分散になるように自動で調整します。

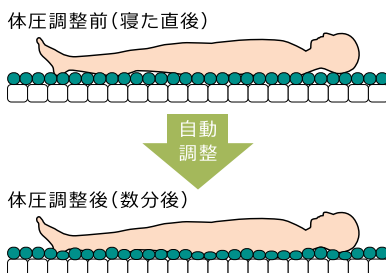

圧切替による除圧


寝心地のよさを持続させながら圧切替(除圧)
を行います。身体の50%をマイクロエアセル
で支え、残りの50%で除圧を行います。

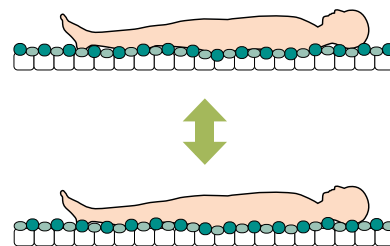


優れた『ずれ力対策』

ベッドの背上げ・背下げ時、おむつ交換、リハビリ時などには身体の
さまざまな部位に苦しい圧がかかります。「背上げモード」「リハビリ
モード」にすると背抜き・圧抜き動作を行い、身体にかかる苦しさを
緩和します。

背抜き動作

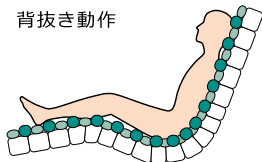


圧抜き動作

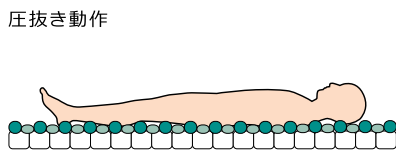


『むれ対策』と『ひえ対策』

エアマットレス特有の弱点である、寝床内の『むれ』と『ひえ』を対策
します。

<むれ対策>

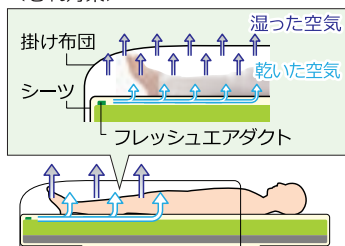

<ひえ対策>

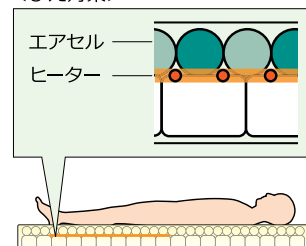

TAISコード：00054-000172

品番	マットサイズ (cm)			重量 (kg)	適合ベッドサイズ		価格
	幅	長さ	厚さ		幅	長さ	
MSTAA83	83	193	13	8.0	83cm程度	レギュラー	212,960円 (税抜価格193,600円)

<素材>

- マット部：ウレタンフィルム
- カバー：ウレタン合皮 (制菌加工)

