

生活の中で椅子や車いすに長時間座っている人のために
「体圧分散性」「自動体圧調整」「除圧」の3要素で、
おしりの痛みによる姿勢の崩れや「床ずれ」の不安を軽減する 車いす用クッション

Power Cushion

パワークッション



ノーマルタイプ



ハイタイプ

介護保険福祉用具貸与品：車いす付属品

障がい者総合支援

対象者

車いすや座位の姿勢で長時間過ごす人、プッシュアップが必要な人

PAT.P

体圧分散性能


3Dフィットエアセルが大腿部・坐骨部・尾骨部を包み込むように支え、体圧を分散させます

内部構造



自動体圧調整


誰が座っても最適な体圧分散になるように自動で調整します

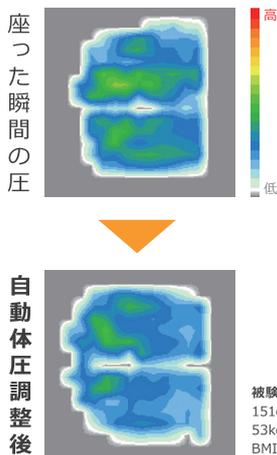

被験者
151cm
53kg
BMI 23.2

圧切替による除圧

3Dフィットエアセルの圧切替によって坐骨部や尾骨部の除圧を自動的に行います (15分ごと)
※ すべてのケースでプッシュアップが不要になるわけではありません

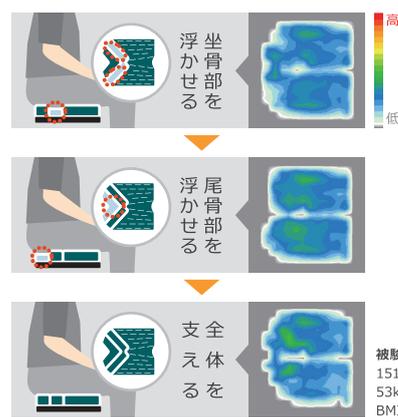

被験者
151cm
53kg
BMI 23.2

パワーバンク (充電式バッテリー)




電池残量の確認

パワークッション底面の窓からLEDの点灯で電池の残量が確認できます

パワーバンクはリチウムイオン式で「スマートフォン」や一般的な「モバイルバッテリー」と同じです。事故や故障の原因となるため「高温下での放置」や「劣化したパワーバンクの使用」はしないでください。

操作パネル

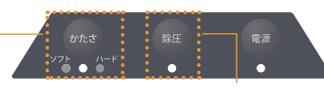

【かさ調整】

最適な圧力に自動で調整します。必要に応じて3段階でかさを選ぶことができます。

【除圧】

「静止型」と「圧切替型 (除圧)」の選択ができます。

介護保険		汎用性のあるサイズのクッションをご希望の場合							
タイプ	品番	TAISコード	サイズ (cm)				重量 (kg)	バッテリー持ち時間の目安	
			幅	長さ	厚さ	最厚部		活動性が低い	活動性が高い
ノーマルタイプ	MPWCL	00054-000439	38	40	8	11	1.2 (バッテリー含まず)	連続約50時間	連続約15時間
ハイタイプ	MPWCHL	00054-000616			11	14		連続約35時間	連続約11時間

障がい者総合支援		個別の車いすにあうクッションをご希望の場合								
<ul style="list-style-type: none"> ●品番等の詳細はお問い合わせください ●幅・長さはサイズ表を参考に、お使いの車いすに合うサイズをお選びください ●クッションタグのカラーは、イエロー/グレーの2色から選べます ●受注生産のため納品まで2週間程度かかります 										
			クッションタグ		イエロー	グレー				
			サイズ	長さ						
			cm	34	36	38	40	43		
			幅	32	S	SL				
				34		M	SL			
				38			L			
				40			LL			

<p><素材></p> <ul style="list-style-type: none"> ●エアセル:ウレタンフィルム ●底つき防止フォーム:ポリウレタンフォーム ●クッションカバー表面:ポリエステル ●クッションカバー裏面:ナイロン (滑り止め加工) ●インナー保護カバー:ウレタン合皮 <p><充電方式> AC100VまたはUSB/DC5V ※最大使用者体重:100kg</p>
価格
94,380円 (税抜価格85,800円)



ISO9001 認証取得
ISO13485 認証取得
※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、製造および付帯サービスにて取得