



# 簡単取扱説明書

カインドグリップ（コーナータイプ パーツ）の取付方法

取付時間のめやす：約5分間

カインドグリップ パーツの構成

コーナータイプ



コーナー部



端末部



ストレート部(長)



ストレート部(短)



プライマー



目印シール

ルーツの手すり部に  
取り付けて使用します

※ 一度はがしたパーツは  
再使用できません

メンテナンス時は  
はがさず清拭してください


## 【ストレート部】

1. 手すり（赤い部分）にプライマーを塗り、乾燥するまで**2分間**待ちます



- ※ プライマーとは両面テープをはがれにくくする下塗り剤です
- ※ 必ず手袋を着用してください
- ※ 後の工程で再度使用するため、乾燥しないよう元の袋に入れて保管します

2. 蓄光プレートに合わせて、目印シールを貼り付けます

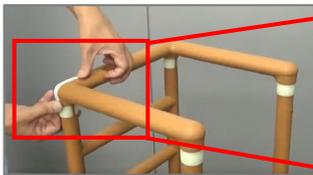

※ 手すりの中央に合わせてください



3. ストレート部(長)のはくり紙を全てはがし、目印シールとストレート部の中央（溝部分）を合わせます  
斜めにならないように、端から順にしっかりと押さえて力を加えてください




4. 裏側も、端から順に少しずつ貼っていき、目印シールをはがします



※ 貼り合わせた後は、必ず**手でしっかりと押さえて力を加えてください**


5. 蓄光プレートに合わせて、目印シールを貼り付けます

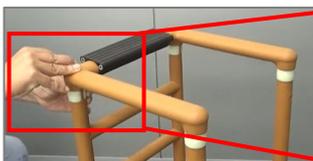

※ 手すりの中央に合わせてください



6. 同様に、ストレート部(短)のはくり紙を全てはがし、目印シールと中央(溝部分)を合わせ  
手すりに取り付けて、目印シールをはがします

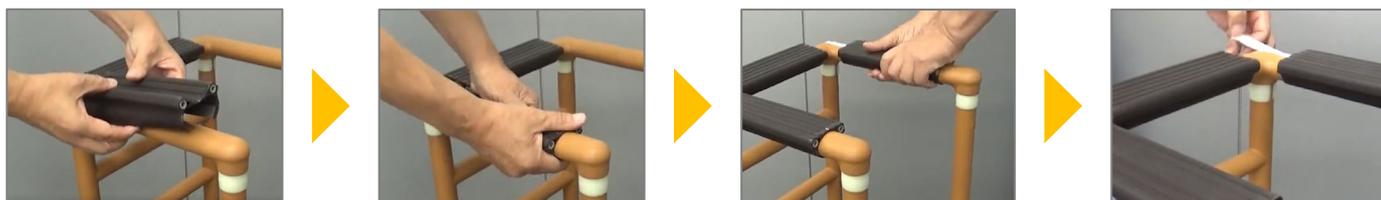

※斜めにならないように少しずつ貼り付け、最後必ず**手でしっかりと押さえて力を加えてください**  
 ※ストレート部(短)は2本あるので、2回くりかえしてください


【コーナー部・端末部】

7. ストレート部の端面 1cm程度 (赤い部分) にプライマーを塗ります



※ プライマーとは両面テープをはがれにくくする下塗り剤です  
 ※ 必ず手袋を着用してください

8. 同様に、コーナー部、端末部の順にはくり紙を全てはがし、手すりに取り付けます

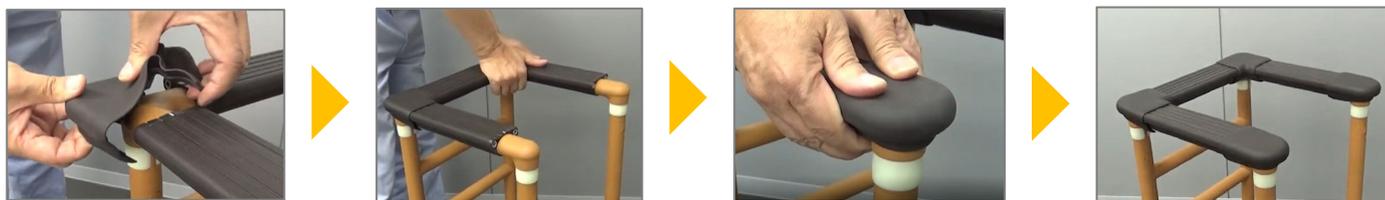

※すき間が開かないように、少しずつ貼り付け、最後必ず**手でしっかりと押さえて力を加えてください**

カインドグリップ (スモールタイプ パーツ) の取付方法

取付時間のめやす: 約2分間

カインドグリップ パーツの構成品

スモールタイプ




プライマー

ルーツの手すり部に取り付けて使用します


※ 一度はがしたパーツは再使用できません  
 メンテナンス時ははがさず清拭してください

1. 手すり (赤い部分) にプライマーを塗り、乾燥するまで**2分間**待ちます

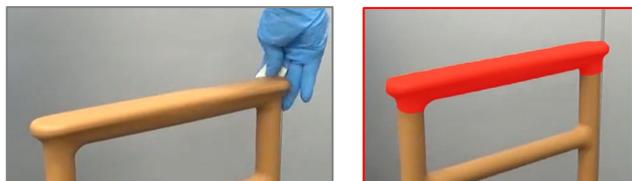

※ プライマーとは両面テープをはがれにくくする下塗り剤です  
 ※ 必ず手袋を着用してください

2. カインドグリップのはくり紙を全てはがし、手すりに取り付けます

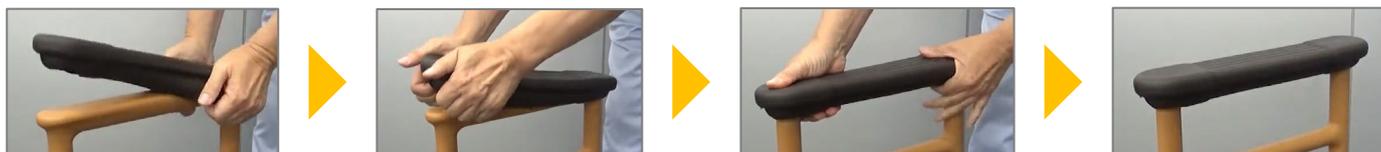

※すき間が開かないように、少しずつ貼り付け、最後必ず**手でしっかりと押さえて力を加えてください**

