




簡単取扱説明書

1 対象者

「立ち上がり/立位保持」「歩行」に不安のある人

2 立ち上がり・歩行動作 をより楽に・安全にする手すり

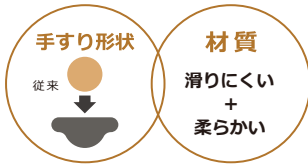


従来の床置き型手すり（断面が丸い形状）より圧倒的に「立ち上がり動作」や「歩行」がしやすくなりました！

ルーツ カインドグリップは従来の「ルーツ」をアップグレードした手すりです。利用者様の立ち上がり動作や歩行をより楽に・安全にさせていただくために価値を向上させました。

立ち上がり/立位保持時の初期の基本動作3パターン
身体をあずけ「腕を置く」or「手のひらを置く」or「指をかける」



歩行時の初期の基本動作2パターン
手のひらを置く」or「指をかける」歩く姿勢を支える

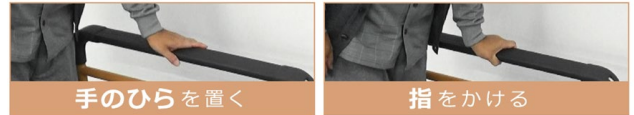

3 カインドグリップ（パーツ）の取付方法

取付時間のめやす：約5分間

カインドグリップ パーツの構成


サイド/センタータイプ



ロングタイプ



プライマー

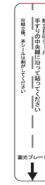


目印シール

ルーツの手すり部に
取り付けて使用します


※ 一度はがしたパーツは
再使用できません
メンテナンス時ははがさず
清拭してください

1. 手すり（イラストの赤い部分）にプライマーを塗り、乾燥するまで2分間待ちます

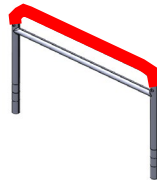


※ プライマーとは両面テープをはがれにくくする下塗り剤です
※ 必ず手袋を着用してください

2. 蓄光プレートに合わせて目印シールを貼り付けます

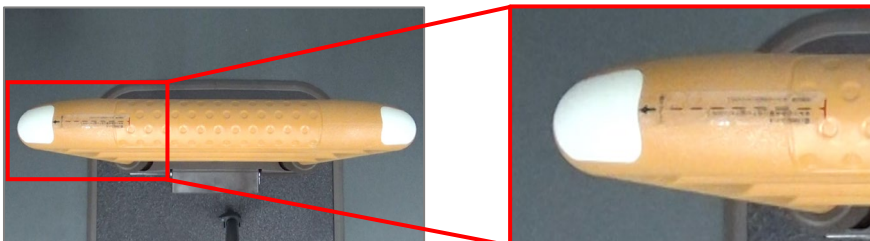

※ 手すりの中央線と、
シールの中央線を合わせてください


3. ストレート部のはくり紙を全てはがし、目印シールとストレート部の中央（溝部分）を合わせます
斜めにならないように、端から順にしっかりと押さえて力を加えてください

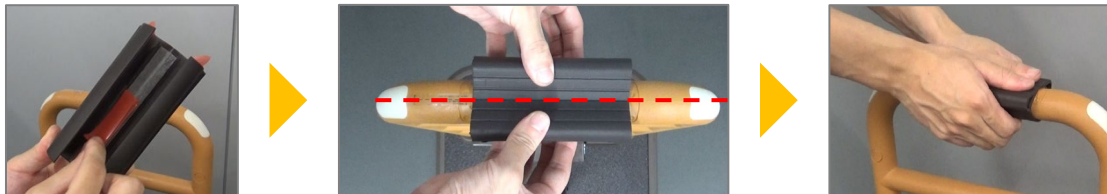

※ ロングタイプの場合、斜めにならないよう特に気を付けて、端から順にしっかりと押さえて力を加えてください




4. 裏側も端から順にすき間が開かないように、少しずつ貼っていき、最後に目印シールをはがします

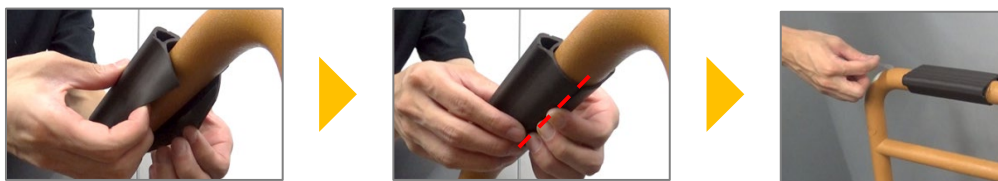

※ 貼り合わせた後は、必ず**手でしっかりと押さえて力を加えてください**

5. 同様に、コーナー部のはくり紙を全てはがし、手すりに取り付けます

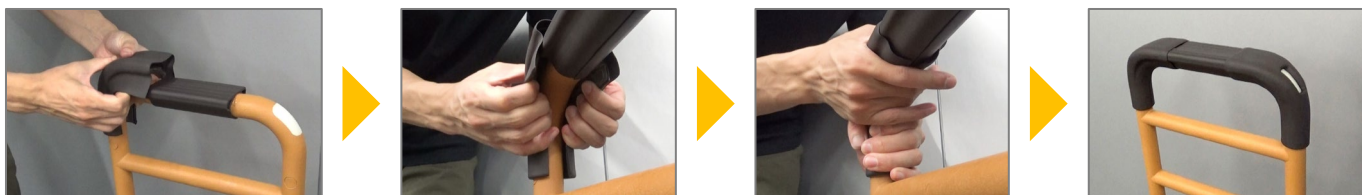

※ すき間が開かないように、少しずつ貼り付け、最後必ず**手でしっかりと押さえて力を加えてください**

4 メンテナンス方法

※ 一度はがしたカインドグリップ（パーツ）は再使用できません
メンテナンス時ははがさず、そのままおこなってください

汚れの落とし方

中性洗剤などを水で薄めたものやアルコールなどで清拭してください

消毒のしかた

- ・ 清拭消毒の場合、消毒剤を柔らかい布に染み込ませ全体を清拭してください
消毒剤を直接吹き付けると、すき間などに入り、ふき取りにくくなります
- ・ 消毒装置を使用する場合は、分解せずそのまま装置へ入れてください
耐熱温度（60℃）以上の熱はかけないでください



※ 詳細は取扱説明書および、メンテナンスマニュアルをご参照ください

5 保管方法

- ① 湿気の多い場所では保管しないでください（サビ、カビ発生の原因になります）
- ① 手すりを重ねて置いたり、不安定な状態での立て置き保管はしないようにしてください
- ① 汚れを取り除き、よく乾燥させて保管してください
- ① 直射日光の当たらない場所で保管してください（材質、色に変化するおそれがあります）

