

Becool(ビクール)取扱説明書

- ビクール83cm幅/品番:MBC1083
- ビクール91cm幅/品番:MBC1091
- ビクール83cm幅ショートサイズ/品番:MBC1083S
- ビクール91cm幅ショートサイズ/品番:MBC1091S

注意事項




- ①長期間マットの上に重量物を置かないでください。マット表面には柔らかい素材を使用していますので、跡が残るおそれがあります。
- ②汚れが付着したまま使用するとマット表面が劣化するおそれがありますので、定期的な洗浄をお勧めします。
- ③直射日光の当たる場所、湿度の高い場所では保管しないでください。変色やカビなどが発生するおそれがあります。
- ④マットを折りたたまないでください。へたりや変形・破損の原因になります。
- ⑤火気・高温の近くで使用しないでください。火災・変形の原因になります。

設置方法


1 マットレスを置きます

マットレスをベッドの上に置きます。

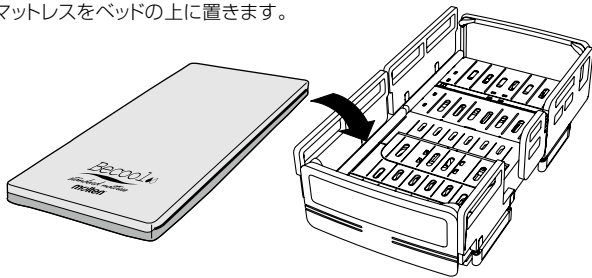

2 シーツを取り付け、ベッドメイキングをします

本体にしっかりとシーツを巻き込んでください。

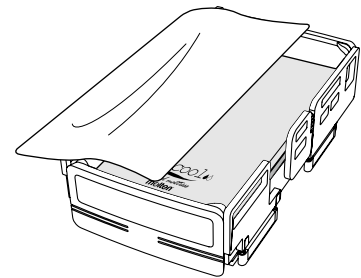

特長

●より衛生的に


【常に衛生的な状態で使用可能】

カバー、マットともに洗濯機での丸洗いができるので、常に衛生的に使用することができます。

【洗濯性の向上(洗浄性&超速乾)】

繊維と樹脂の多層構造により、汚れが落ちにくく洗うのが難しかった従来のウレタンフォームマットレスに比べて、汚れ落ちが格段に向上し、脱水・乾燥時間も飛躍的に速くなりました。

さらに、幅広い乾燥条件(温度・設備など)にも対応できるので条件を問わず洗濯効率が向上します。

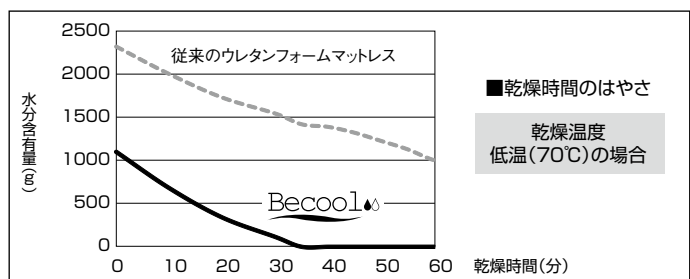

●より快適な眠りに

【触感のよさ】

柔らかい繊維層は常に干したての布団のように触感がよく、体を優しく支えて快適な眠りを実現します。

【抜群の通気性】


カバーのメッシュ素材とマットレスの繊維層により、抜群の通気性でマットレス内の換気を可能にしました。

むれにくいので常に快適に使えます。

【熱ごもりのしにくさ】

蓄熱しにくい繊維素材により、従来のウレタンフォームマットレスのような熱ごもりがなく、常に快適に使えます。

"水"、"空気"、"熱"を縦横の多方向に逃がします。

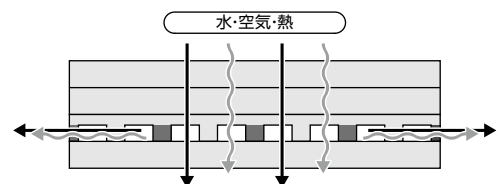

■マットレス断面(略図)



お手入れ方法

⊘ : してはいけない「禁止」を意味します。 Ⓛ : 必ず実行していただく「強制」を意味します。

●洗淨・乾燥方法

アウターカバー

- ①アウターカバーは取り外して洗濯してください。
(インナーメッシュカバーは取り外さないでください)
※推奨設定でもカバーは5%程度収縮する場合があります。
 - ②乾燥機によるアウターカバーの乾燥時間は、80℃×10分程度を目安に設定してください。
- ⊘ 面ファスナーが付いた物などと一緒に洗濯・乾燥しないでください。カバーの生地にダメージを与えやすく劣化するおそれがあります。
- ⊘ 温風の吹き出し口付近は高温になりますので置かないでください。
- ⊘ 漂白剤は変色や色落ちの原因になりますので使用しないでください。
- ⊘ シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
- ⊘ ドライクリーニングはマットカバーが縮むおそれがあるのでしないでください。
- Ⓛ アウターカバーにはメッシュ素材を使用しておりますので、洗濯される場合は洗濯ネットなどに入れてください。
- Ⓛ 業務用洗濯・乾燥機で洗濯する場合は、カバーの著しい収縮を防ぐために40℃以下の水温で洗濯してください。

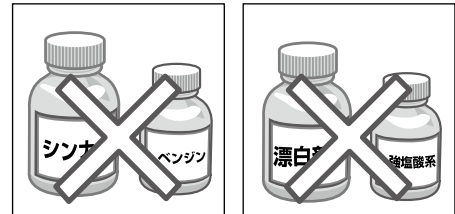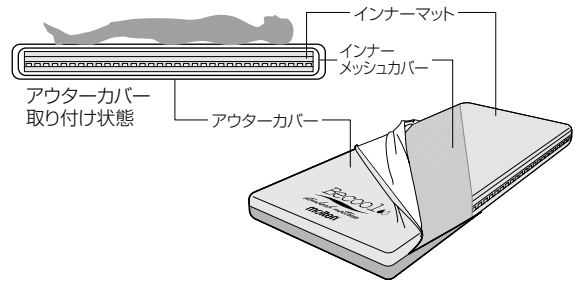

インナーマット

- ①インナーマットはインナーメッシュカバーごと洗濯します。
 - ②マットレス洗浄装置を使用する場合は、一般的なマットレスと同様の設定で洗濯できます。
・設定の目安：洗濯水温：40℃、洗濯時間：50分、洗浄剤：中性洗剤
 - ③インナーマットの乾燥は以下の設定が目安となります。
・平置き型の乾燥機の場合 乾燥温度：120℃×30分程度
※乾燥機によって大きく異なります。
- ⊘ 面ファスナーが付いた物などと一緒に洗濯・乾燥しないでください。カバーの生地にダメージを与えやすく劣化するおそれがあります。
- ⊘ 変形(へこみ)量が2.5cm以上になった場合は、使用を止めてください。寝心地が悪化するおそれがあります。

耐熱温度
アウターカバー / 120℃
インナーマット / 120℃


●消毒方法

アウターカバー

- ①一般的な除菌を行う場合は、消毒用エタノールをお勧めします。
- ②血液が付着した場合またはノロウィルスなどアルコール消毒が効かない細菌に感染した場合
・熱水消毒をする場合は、80℃以上の熱水に10分間程度漬け置きした後、水洗いして洗濯します。
・次亜塩素酸ナトリウムによる消毒の場合は、次亜塩素酸ナトリウム6%水溶液を200倍～300倍に希釈した液に10分程度漬け置きした後で充分すすぎ洗いで洗濯してください。
※色落ちする場合があります。
※すすぎ洗いなどが不足すると素材劣化のおそれがあります。

インナーマット

- ①80℃で1時間、120℃で10分程度の熱風消毒装置による処理をお勧めします。
- ②ガス消毒を行う場合、ホルマリン・オゾンガス・EOGガスなどの消毒装置をお勧めします。
設定は一般的なマットレスと同様の設定をお勧めします。

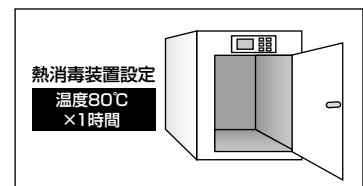

仕様

ビクール

TAISコード/00054-000148

- ビクール83cm幅 ●サイズ：幅83×長さ191×厚さ10cm ●重量：6.5kg
 ビクール91cm幅 ●サイズ：幅91×長さ191×厚さ10cm ●重量：7.0kg
 ビクール83cm幅ショートサイズ ●サイズ：幅83×長さ180×厚さ10cm ●重量：6.3kg
 ビクール91cm幅ショートサイズ ●サイズ：幅91×長さ180×厚さ10cm ●重量：6.8kg

- 素材：マット=ポリエステル、ポリウレタン
 通気カバー=ポリエステル

開発・製造元

株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部

www.molten.co.jp/health

東京 札幌 仙台 埼玉 名古屋 大阪 広島 福岡

製品他、各種お問い合わせは

〒739-1794 広島市安佐北区口田南2-18-12

TEL.082-842-9975

FAX ☎0120-769-123

E-mail:health@molten.co.jp

ISO9001 認証取得

ISO13485 認証取得

※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、製造および付帯サービスにて取得