

注意事項




- 長期間マットの上に重量物を置かないでください。マット表面には柔らかい素材を使用していますので、跡が残る恐れがあります。
- 直射日光の当たる場所では保管しないでください。
- マットを折りたたまないでください。変形・破損の原因となります。
- 火気・高温の近くで使用しないでください。火災・変形の原因となります。
- 本製品は日本国内専用です。海外では使用できません。

設置方法


1 マットレスを置きます

マットレスをベッドの上に置きます。

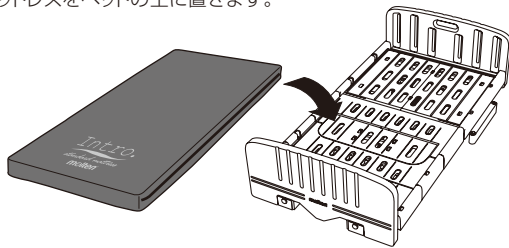

2 シーツを取り付け、ベッドメイキングをします

本体にしっかりとシーツを巻き込んでください。

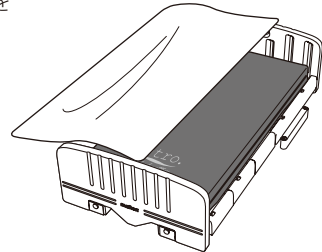


お手入れ方法

❗この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の意味です。


●洗 浄

- ①水またはお湯を染み込ませた布で専用カバーの汚れた部分を拭き取ってください。
- ①汚れがひどい場合は水またはお湯で薄めた家庭用中性洗剤を使用してください。(強塩酸系の洗浄剤や漂白剤は使用しないでください。)
- ①専用カバーは取り外して洗濯してください。(メッシュカバーは外さないでください。)
※専用カバーは、マットレスの凹凸面にロゴ印刷面を合わせて取り付け、使用していただくことをお勧めします。
※メッシュカバーのタグラベルがマットレスの足元側(ロゴ印刷側)になるように設置してください。

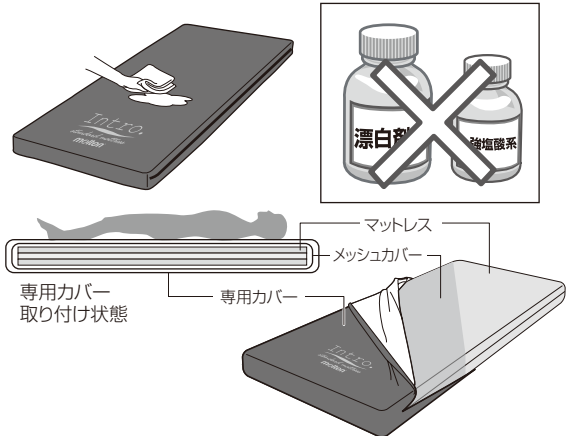

●消 毒

- ①消毒液やアルコールを噴霧または布に染み込ませて拭き取ってください。
※消毒液はメーカー指定の希釈倍率で使用してください。
原液のまま使用するとマット表面が劣化する恐れがあります。
※有機溶剤(シンナー、ベンジンなど)は使用しないでください。
- ①消毒装置を使用する場合は温度100℃×1時間に設定してください。
- ①熱水消毒をする場合は温度80℃×1時間に設定してください。

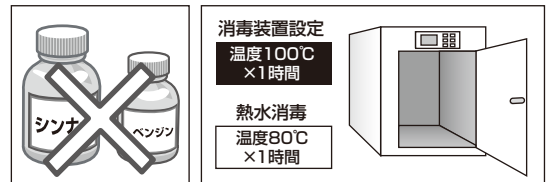

仕 様

イントロ

- イントロ83cm幅 ●サイズ: 幅83×長さ191×厚さ8cm ●重量: 5.0kg
イントロ91cm幅 ●サイズ: 幅91×長さ191×厚さ8cm ●重量: 5.5kg
- 素 材: カバー表面 = 伸縮性ポリウレタンフィルム
 : マットレス = ウレタンフォーム+チップウレタン
 - カラー: ダークグレー

開発・製造元

ISO9001 認証取得

ISO13485 認証取得

※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、製造および付帯サービスにて取得

株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部

www.molten.co.jp/health

東京 札幌 仙台 埼玉 名古屋 大阪 広島 福岡

製品他、各種お問い合わせは

〒739-1794 広島市安佐北区口田南2-18-12

TEL.082-842-9975

FAX.0120-769-123

E-mail:health@molten.co.jp