

ルフラン取扱説明書

- 78cm幅レギュラーサイズ/品番：MRF1078(防水)
- 83cm幅レギュラーサイズ/品番：MRF1083(防水)
- 91cm幅レギュラーサイズ/品番：MRF1091(防水)
- 83cm幅ショートサイズ/品番：MRF1083S(防水)
- 91cm幅ショートサイズ/品番：MRF1091S(防水)

注意事項



- ①最初に製品を使用する前に必ずマットレスを平らな場所に置いてインナー保護フィルムの所定箇所を裂き、マットレスを復元してください。(2020年10月以降)
マットレスが復元していない状態で使用すると、マットレスが硬く適正な体圧分散性能が発揮されません。
- ②長期間(2週間以上)圧縮したまま保管しないでください。(2020年10月以降)
マットレスが復元しにくくなる可能性があります。
- ③インナー保護フィルムは取り外さず、そのままの状態で使用してください。(2020年10月以降)
- ④長期間マットの上に重量物を置かないでください。マット表面には柔らかい素材を使用していますので、跡が残るおそれがあります。
- ⑤汚れが付着したまま使用されるとマット表面が劣化するおそれがありますので、定期的な清拭をお薦めします。
- ⑥直射日光の当たる場所、湿度の高い場所では保管しないでください。変色やカビなどが発生するおそれがあります。
- ⑦マットを折りたたまないでください。へたりや変形・破損の原因となります。
- ⑧火気・高温の近くで使用しないでください。火災・変形の原因となります。


設置方法(2020年10月以降)

※2020年9月以前はそのままの状態で使用できます。

マットレスを平らな場所に置いてインナー保護フィルムの黄枠部分を裂き、マットレスを復元してください。

(マットレスは数十秒で復元されます)
(2020年10月以降)

- ※インナー保護フィルムは取り外さず、そのままの状態で使用してください。
- ※ベッドの上に直接敷いて使用してください。
- ※サイドレールを必ず使用し、シーツを掛けて使用してください。

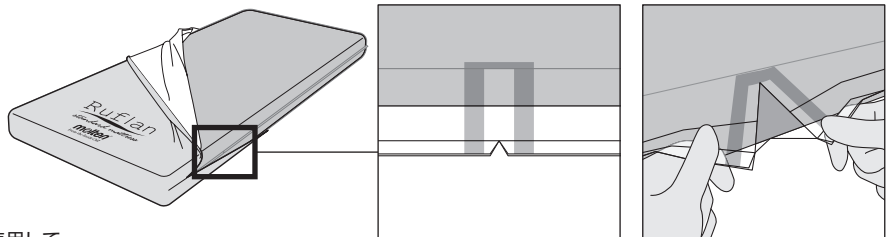


お手入れ方法

❗：必ず実行していただく「強制」を意味します。

洗 浄

- ①水またはお湯を染み込ませた布で専用カバーの汚れた部分を拭き取ってください。
- ①汚れがひどい場合は、水またはお湯で薄めた家庭用中性洗剤を使用してください。
(酸性および強塩酸系の洗浄剤や漂白剤は使用しないでください)
- ①専用カバーは取り外して洗濯してください。(インナー保護フィルムは外さないでください)
※専用カバーは、マットレスの凹凸面にロゴ印刷面を合わせて取り付け使用してください。
- ①インナー保護フィルムは中性洗剤またはアルコールを布などに含ませて汚れを取り除いてください。(2020年10月以降)

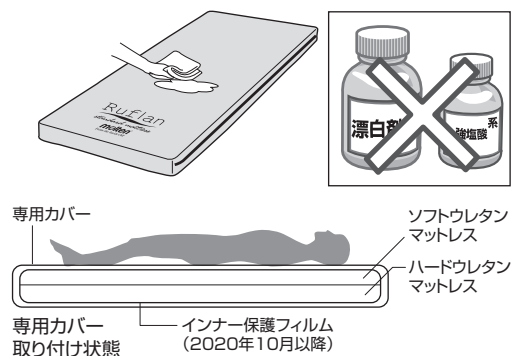

消 毒

- ①消毒液やアルコールを噴霧または布に染み込ませて拭き取ってください。
※消毒液はメーカー指定の希釈倍率で使用してください。
原液のまま使用するとマット表面が劣化するおそれがあります。
※有機溶剤(シンナーやベンジンなど)は使用しないでください。
- ①消毒装置を使用する場合は、温度設定は(80℃)に設定してください。



仕様

ルフラン

- 素材 カバー表面 = ウレタン合皮(防水仕様)※抗菌加工
インナー保護フィルム：ポリエステル
インナーメッシュカバー：ポリエステル
インナーマット：ウレタンフォーム

78cm幅レギュラーサイズ	サイズ：幅78×長さ191×厚さ10cm	重量：5.5kg
83cm幅レギュラーサイズ	サイズ：幅83×長さ191×厚さ10cm	重量：6.0kg
91cm幅レギュラーサイズ	サイズ：幅91×長さ191×厚さ10cm	重量：6.5kg
83cm幅ショートサイズ	サイズ：幅83×長さ180×厚さ10cm	重量：5.5kg
91cm幅ショートサイズ	サイズ：幅91×長さ180×厚さ10cm (ソフトウレタン：3.5cm／ハードウレタン：6.5cm)	重量：6.0kg

- カラー ネイビー

開発・製造元

ISO9001 認証取得

ISO13485 認証取得

※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、製造および付帯サービスにて取得

株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部

www.molten.co.jp/health

東京 札幌 仙台 埼玉 名古屋 大阪 広島 福岡

製品他、各種お問い合わせは

〒733-0036 広島市西区観音新町四丁目10-97-21

TEL.082-578-9226

E-mail:health@molten.co.jp

〈電話による受付時間〉月曜日～金曜日／9:00～17:00

※祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休業日など弊社休業日を除く