


生活動作支援手すり **バディー III** (歩行支援)

取扱説明書

目次

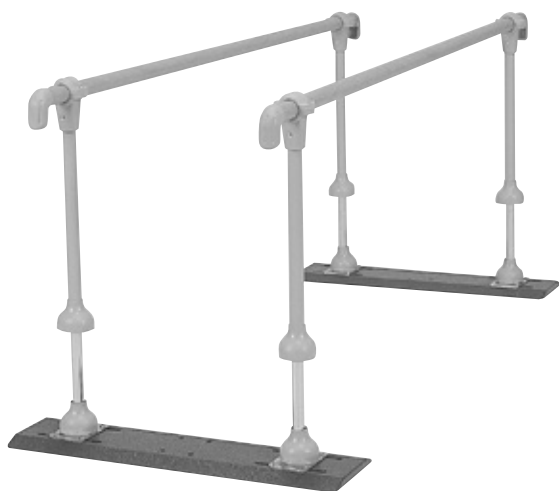

○注意事項	P 1
○各部名称および梱包内容	P 2
○設置方法	P 3
○高さ・幅の調整方法	P 4
○L字型への変更方法	P 5
○お手入れ方法	P 5
○点検項目	P 6
○このようなときには	P 6
○保証書、仕様	P 7

安全にお使いいただくために

この度は当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後もいつでも見られる場所に大切に保管してください。利用者様の健康状態や体調が変化した場合には医師や看護師、福祉用具専門相談員などの専門の方に相談した上でご使用ください。利用者様の身体状態、設置場所を十分確認し、安全であることを確認してからご使用ください。

安全上の注意 必ずお守りください

①利用者様や他の人への危害・財産への損害などを未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

取扱説明書に表示されている記号や用語は、表示内容を見逃し誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次のような表示区分であらわしています。

⚠ 警告：死亡または重傷などを負う可能性を意味します。

⚠ 注意：障害を負うまたは物的損害を発生させる可能性を意味します。

注意：本製品の故障を防止するための注意事項や、より満足に使用していただくためのアドバイスを意味します。

②お守りいただく内容の種類を次の表示区分であらわしています。

⊘：してはいけない「禁止」を意味します。

!：必ず実行していただく「強制」を意味します。




- ① **手すりに座ったり、ぶら下がったり、踏み台にしないでください。**
手すりに座ったり、ぶら下がったり、踏み台にすると本体が外れたり、破損して転倒やケガをするおそれがあります。
- ② **手すりを横から引っ張らないでください。**
手すりを横から引っ張ると本体がかたむいたり、倒れて転倒やケガをするおそれがあります。
- ③ **屋外や風呂場など風雨にさらされたり水気のある場所では使用しないでください。**
バディーⅢは屋内専用です。屋外や風呂場などの水気の多い場所に設置すると水分などで床面が滑ったりし、不安定になり転倒やケガをするおそれがあります。
- ④ **手すりはしっかり固定して使用してください。**
手すりを固定しているクランプストッパーの強度を確認し、簡単にずれたり、外れたりしない事を確認して使用してください。固定が不十分な場合は、使用中に転倒やケガをするおそれがあります。
- ⑤ **クランプカバーを必ず取り付けて使用してください。**
バディーⅢを使用する場合は、クランプカバーを必ず取り付けて使用してください。取り付けないで使用するとクランプストッパーなどに足をぶつけてケガをするおそれがあります。
- ⑥ **マットの上などには設置しないでください。**
マットの上などに設置すると使用中に本体が倒れたり、外れたりし、転倒やケガをするおそれがあります。
- ⑦ **段差や傾斜のある床には設置しないでください。**
部屋の敷居やタタミの継ぎ目などの段差のある場所やスロープなどの傾斜のある床には設置しないでください。使用中に本体が倒れたり、外れたりし、転倒やケガをするおそれがあります。



- ① **バディーⅢ本体にぶつからないように注意してください。**
ご利用者の身の回りのお世話をする時や本体使用中など、バディーⅢ本体にぶつからないように注意してください。バディーⅢは金属製のため、強くぶつかると打撲のおそれがあります。
- ② **バディーⅢを移動したり運搬する場合は、落下などに十分ご注意ください。**
バディーⅢを移動したり運搬する場合は、手すりを持って運搬をしないでください。
手すりを持って移動や運搬を行うとベースプレートから手すりが外れ、足元などに落下しケガをするおそれがあります。
- ③ **ベースプレートと床面との段差でつまづかないように十分ご注意ください。**
ベースプレートと床面の間には段差があります。
段差でつまづいて転倒などしないよう、十分ご注意ください。
- ④ **火気を近づけたり、ストーブやファンヒーターなどのそばで使用しないでください。**
火気やストーブ、ファンヒーターなどの熱により製品を損傷したり、火災の原因につながるおそれがあります。
- ⑤ **お客様による分解・改造・修理はしないでください。**
変形や破損の原因となり、ケガをするおそれがあります。
- ⑥ **本来の目的以外に使用しないでください。**
本来の目的以外に使用すると、製品が外れたり思わぬケガをするおそれがあります。
- ⑦ **有機溶剤やスプレータイプの殺虫剤などを直接噴射しないでください。**
清拭する場合は、中性洗剤を水で薄め柔らかい布に浸し、よく絞ってから清拭してください。その後残った洗剤分を水に浸して、よく絞った布で拭き取ってください。最後に乾いた布で水滴・湿気をしっかり拭き取ってください。

各部名称および梱包内容

各部の名称

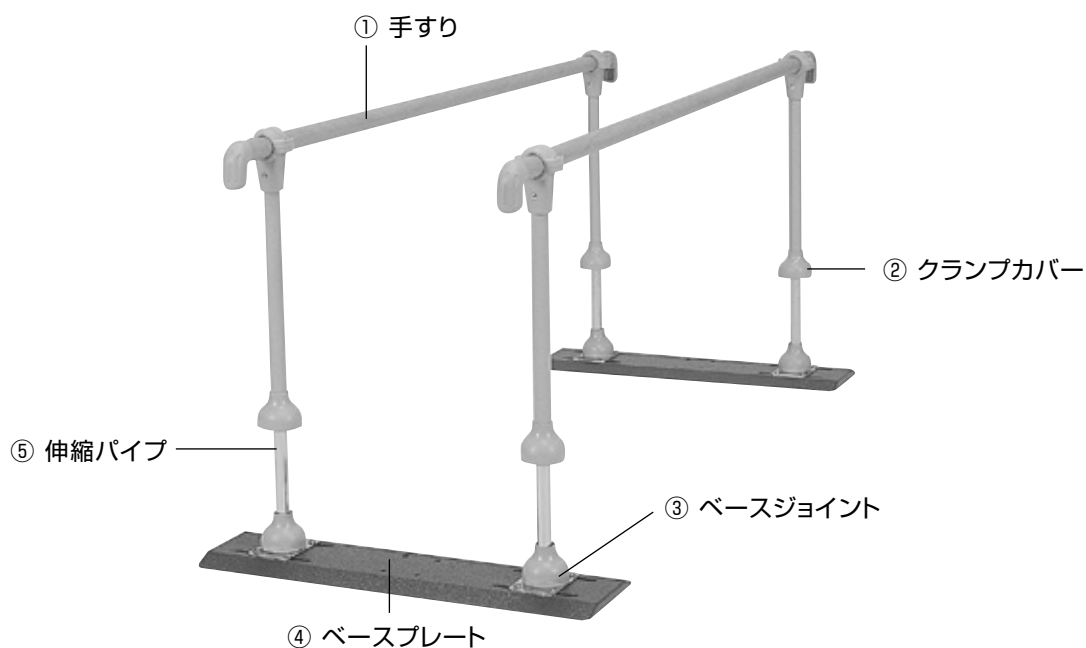


梱包内容

以下の部品が全てそろっているか、破損・変形などしていないかを確認してください。
万が一、部品の不足・破損があった場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。

ベースプレート：3台



手すり：2台

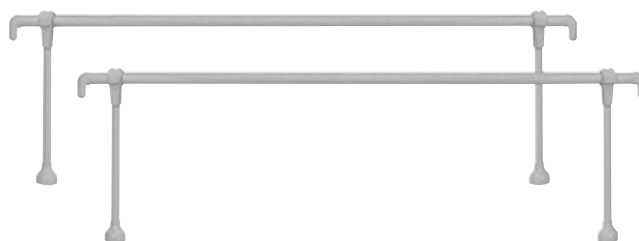

付属品




●取扱説明書兼保証書：1部




●六角レンチ：1ヶ

バディーⅢ(平行型)の設置

- (1) 設置したい場所へベースプレートを置き、手すりを伸縮パイプにしっかり奥まで差し込みます。
この時、伸縮パイプにクランプカバーを通して取り付けてください。

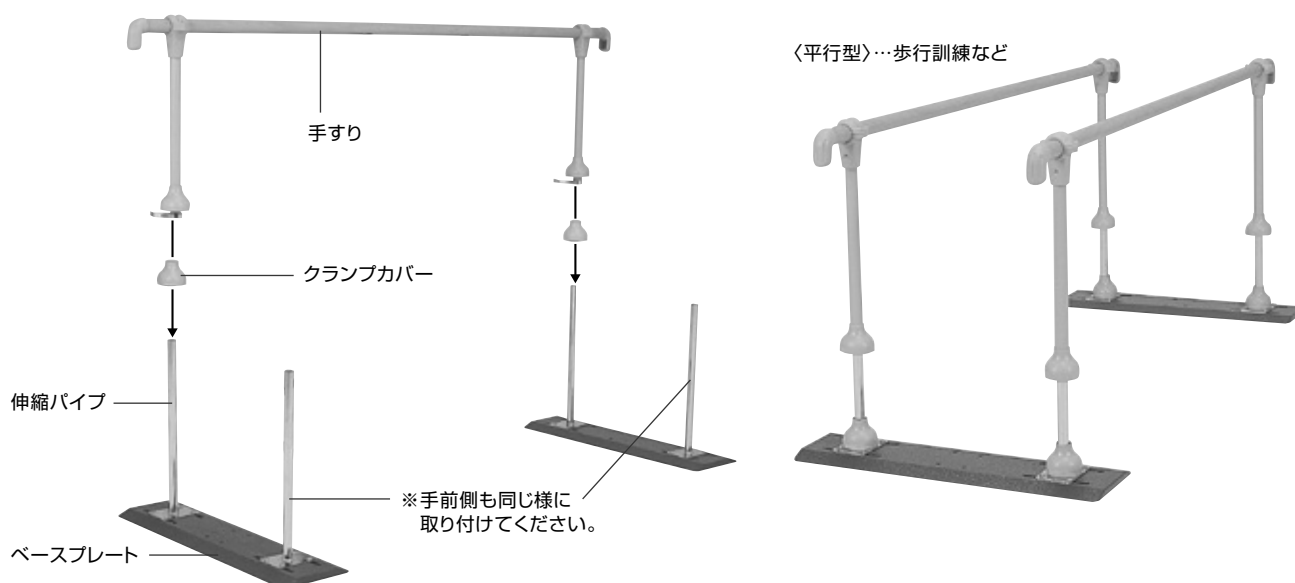

- (2) クランプストッパーをしめ、ぐらつきの無い事を確認してください。

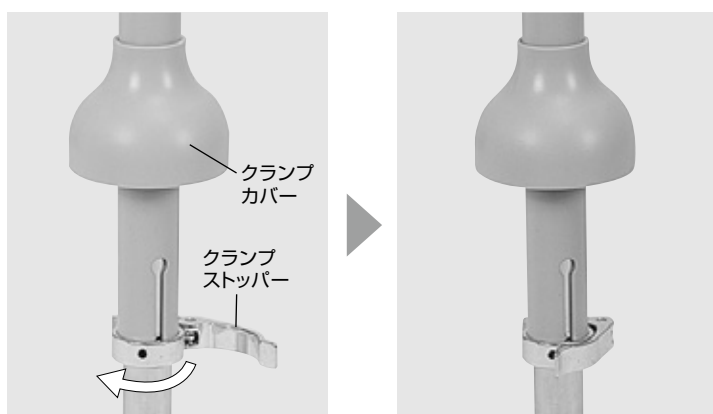

警告

- ① 手すり取り付け後、クランプストッパーは必ずロックしてください。ゆるんだまま使用すると、使用中に手すりが下に下がったり外れたりし、転倒やケガをするおそれがあります。
- ② クランプカバーを必ずかぶせて使用してください。


手すりの高さ・幅の調整方法

(1) 手すりの高さ調整


腰(大転子)と手すりの中心が水平になる高さに調整します。手すりをつかみやすく、力が入れやすい高さなので、安定したつたい歩きをすることができます。




《調整方法》

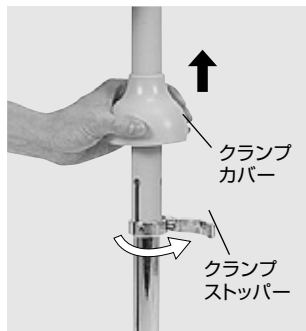

①クランプカバーを上げて、クランプストッパーを開きます。

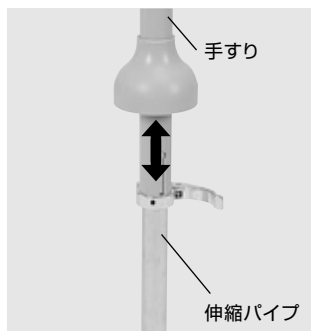

②手すりを上下させて高さを調整します。

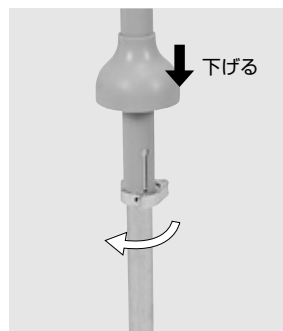

③クランプストッパーをしめて、クランプカバーを下げます。



警告



- ①手すり取り付け後、クランプストッパーは必ずロックしてください。ゆるんだまま使用すると、使用中に手すりが下に下がったり外れたりし、転倒やケガをするおそれがあります。
- ②クランプカバーを必ずかぶせて使用してください。
- ③高さ調整後、必ず各パーツに力をかけて、ぐらつきがないことを確認してください。

(2) 手すりの幅調整

腰(大転子)からこぶしひとつ分間隔をあけた位置に手すりの中心がくるように調整します。これにより、手すりを支えにした時に力が入れやすく、安定したつたい歩きがしやすくなります。



《調整方法》

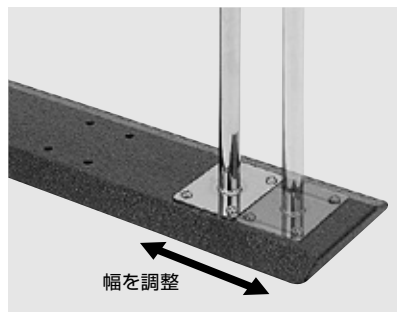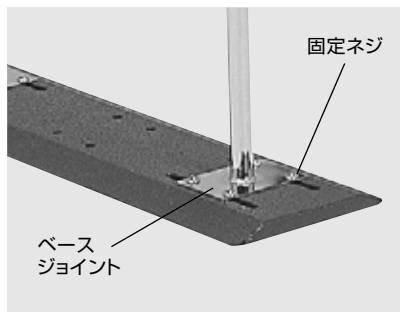

①ベースジョイントの固定ネジ(4ヶ所)を六角レンチとスパナを使用してゆるめ、幅の調整を行ってください。




警告

- 手すり幅調整後、固定ネジ(4ヶ所)を必ずしめてください。ゆるんだまま使用すると、使用中に手すりが外れ転倒し、ケガをするおそれがあります。

L字型への変更方法

バディーⅢ(L字型)への変更方法

もう1枚のベースプレートを利用し、ベースジョイントをベースプレートの真ん中の位置へ変更する事で、L字型で使用する事ができます。

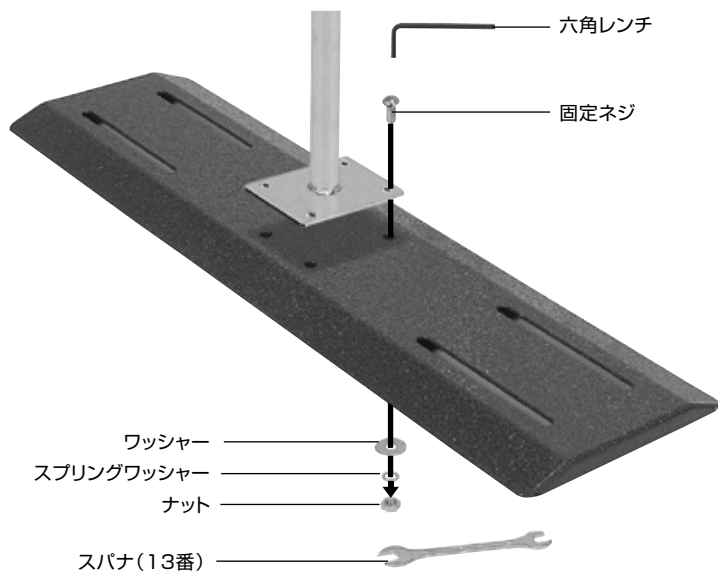


ナット・スプリングワッシャー・ワッシャー・固定ネジを左記の順番通りに締め付け、ベースプレートとベースジョイントを取り付けます。

L字型で使用するためには、ベースジョイントを取り外し、真ん中の位置へ取り付け直す必要があります。

作業には六角レンチとスパナ(13番)が必要です。

※スパナは付属していません。

〈L字型〉…歩行支援など

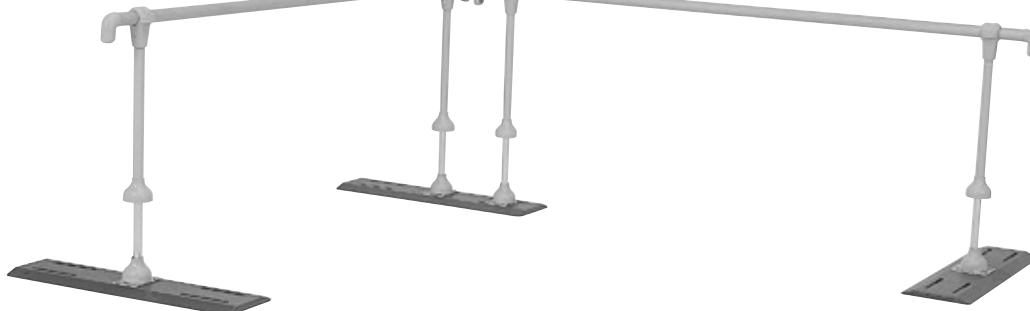

お手入れ方法

ベースプレート、手すり

清拭する場合は、中性洗剤を水で薄め柔らかい布に浸し、よく絞ってから清拭してください。

その後残った洗剤分を水に浸して、よく絞った布で拭き取ってください。

最後に乾いた布で水滴・湿気をしっかり拭き取ってください。

※有機溶剤(シンナー、ベンジンなど)やスプレータイプの殺虫剤などを本体に直接噴射しないでください。



点検項目

バディーⅢ組み立て後の確認事項

組み立てが完了しましたら、下記の点検項目を確認してください。
またこの点検項目は日常の点検にもお使いください。

点検項目		確認	
1	ベースプレートと手すりの連結 ・ベースプレートと手すりはベースジョイントにしっかり奥まで差し込まれていますか？ ・ベースプレートと手すりはクランプストッパーでロックされていますか？ ・固定ネジは順番通りに取り付けられていますか？	YES <input type="checkbox"/>	NO P3、P5参照
2	伸縮パイプのロック確認 ・高さ調整後、クランプストッパーをロックしていますか？ ・手すりに体重をかけて下にさがりませんか？	YES <input type="checkbox"/>	NO P4参照
3	バディーⅢのガタつき確認 ・バディーⅢにガタつきはありませんか？ ・平らな場所に設置していますか？	YES <input type="checkbox"/>	NO P3、P4参照
4	クランプカバーの取り付け確認 ・クランプストッパー部分にクランプカバーを取り付けクランプストッパーにかぶせていますか？(合計4ヶ所)	YES <input type="checkbox"/>	NO P3、P4参照

このようなときには

症状	確認	処置
バディーⅢがグラグラして不安定	クランプストッパーをロックしていますか？	クランプストッパーをロックしてください。(P4参照)
	ベースジョイント固定ネジがゆるんでいませんか？	ベースジョイント固定ネジを増し締めしてください。(P4参照)
手すりに体重をかけると下にさがる	クランプストッパー固定ネジがゆるんでいませんか？	クランプストッパー固定ネジをしめてください。(P4参照) 
高さ調整ができない	クランプストッパーロックを解除していますか？	クランプストッパーロックを解除し高さ調整をしてください。(P4参照)

上記の処置で直らなかった場合、またはその他の現象の場合は、お求めの販売店または
(株)モルテン 健康用品事業本部 お客様窓口までご相談ください。

【お客様窓口】株式会社 モルテン 健康用品事業本部
TEL(082)842-9975

仕様

バディーⅢ (歩行支援用手すり 1.0mタイプ)

品番 MNTEC

- 手すり長さ：1.0m 高さ：56～85cm(無段階調整可能)
 - 手すり幅：44～58cm(無段階調整可能)
 - 手すり直径：3.5cm ●重量：15kg
- 素材：主材：スチールパイプ
表面：木目調樹脂
ベースプレート：スチール

■1年保証

バディーⅢ (歩行支援用手すり 1.4mタイプ)

品番 MNTEB

- 手すり長さ：1.4m 高さ：56～85cm(無段階調整可能)
 - 手すり幅：44～58cm(無段階調整可能)
 - 手すり直径：3.5cm ●重量：15.5kg
- 素材：主材：スチールパイプ
表面：木目調樹脂
ベースプレート：スチール

■1年保証

バディーⅢ (歩行支援用手すり 1.8mタイプ)

品番 MNTEA

- 手すり長さ：1.8m 高さ：56～85cm(無段階調整可能)
 - 手すり幅：44～58cm(無段階調整可能)
 - 手すり直径：3.5cm ●重量：16kg
- 素材：主材：スチールパイプ
表面：木目調樹脂
ベースプレート：スチール

■1年保証

開発・製造元

株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部

www.molten.co.jp/health

東京 札幌 仙台 埼玉 名古屋 大阪 広島 福岡

製品他、各種お問い合わせは

〒739-1794 広島市安佐北区口田南2-18-12

TEL.082-842-9975

FAX 0120-769-123

E-mail:health@molten.co.jp

ISO9001 認証取得

ISO13485 認証取得

※床ずれ防止マットレスの設計、製造
および付帯サービスにて取得