

床置き型手すり バディー V

取扱説明書



目次

○注意事項	・ ・ ・ ・ ・	P1
○各部名称および梱包内容	・ ・ ・ ・ ・	P2
○組み立て方法	・ ・ ・ ・ ・	P3
○設置方法	・ ・ ・ ・ ・	P4
○高さ調整方法およびフィッティング		P5
○お手入れ方法	・ ・ ・ ・ ・	P5
○点検項目	・ ・ ・ ・ ・	P6
○このようなときには	・ ・ ・ ・ ・	P6
○仕様	・ ・ ・ ・ ・	P7

安全にお使いいただくために

この度は当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後もいつでも見られる場所に大切に保管してください。利用者様の健康状態や体調が変化した場合には医師や看護師、福祉用具専門相談員などの専門の方に相談した上でご使用ください。利用者様の身体状態、設置場所を十分確認し、安全であることを確認してからご使用ください。

安全上の注意 必ずお守りください

- ①利用者様や他の人への危害・財産への損害などを未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
取扱説明書に表示されている記号や用語は、表示内容を見逃し誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次のような表示区分であらわしています。

⚠ 警告：死亡または重傷などを負う可能性を意味します。

⚠ 注意：障害を負うまたは物的損害を発生させる可能性を意味します。

注意：本製品の故障を防止するための注意事項や、より満足に使用していただくためのアドバイスを意味します。

- ②お守りいただく内容の種類を次の表示区分であらわしています。

⊘：してはいけない「禁止」を意味します。

Ⓜ：必ず実行していただく「強制」を意味します。



警告

- ① **手すりに座ったり、ぶら下がったり、踏み台にしないでください。**
手すりに座ったり、ぶら下がったり、踏み台にすると本体が外れたり、破損して転倒やケガをするおそれがあります。
- ② **手すりを横から引っ張らないでください。**
手すりを横から引っ張ると本体がかたむいたり、倒れて転倒やケガをするおそれがあります。
また、ベースプレートが持ち上がり、床面とのすき間に足の指などはさみ込み、ケガをするおそれがあります。
- ③ **屋外や風呂場など風雨にさらされたり水気のある場所では使用しないでください。**
パディーVは屋内専用です。屋外や風呂場などの水気の多い場所に設置すると水分などで床面が滑ったりし、不安定になり転倒やケガをするおそれがあります。
- ④ **手すりはしっかり固定して使用してください。**
手すりを固定しているクランプストッパーの強度を確認し、簡単にずれたり、外れたりしないことを確認して使用してください。
固定が不十分な場合は、使用中に転倒やケガをするおそれがあります。
- ⑤ **クランプカバーを必ず取り付けて使用してください。**
パディーVを使用するときはクランプカバーを必ず取り付けて使用してください。
取り付けないで使用するとクランプストッパーやベースジョイントに足などをぶつけてケガをするおそれがあります。
- ⑥ **マットの上などには設置しないでください。**
マットの上などに設置すると使用中に本体が倒れたり、外れたりし、転倒やケガをするおそれがあります。
- ⑦ **段差や傾斜のある床には設置しないでください。**
部屋の敷居や畳の継ぎ目などの段差のある場所やスロープなどの傾斜のある床には設置しないでください。
使用中に本体が倒れたり、外れたりし、転倒やケガをするおそれがあります。
- ⑧ **パディーVを3台以上連結しないでください。**
パディーVを3台以上連結すると不安定になり転倒やケガをするおそれがあります。





注意

- ① **パディーV本体にぶつからないように注意してください。**
利用者様の身の回りのお世話をするときや本体使用中など、パディーV本体にぶつからないように注意してください。
強くぶつかると打撲のおそれがあります。
- ② **パディーVを移動したり運搬する場合は、落下などに十分ご注意ください。**
パディーVを移動したり運搬する場合は、手すりを持って運搬をしないでください。
ベースプレートから手すりが外れ、足元などに落下しケガをするおそれがあります。
- ③ **ベースプレートと床面との段差でつまづかないように十分ご注意ください。**
ベースプレートと床面の間には段差があります。段差でつまづいて転倒などしないよう、十分ご注意ください。
また、すり足などで歩行される方が使用する場合は、十分ご注意ください。
- ④ **ベースプレート表面ですべらないように十分ご注意ください。**
濡れた手足や、靴下をはいたままで使用すると、ベースプレートですべるおそれがありますので、十分ご注意ください。
- ⑤ **介護者などの付き添いが必要な方が使用する場合は、十分ご注意ください。**
介護者などの付き添いが必要な方が使用する場合は、必ず付き添いの方と一緒に使用してください。
- ⑥ **火気を近づけたり、ストーブやファンヒーターなどのそばで使用しないでください。**
火気やストーブ、ファンヒーターなどの熱により製品を損傷したり、火災につながるおそれがあります。
- ⑦ **お客様による分解・改造・修理はしないでください。**
変形や破損の原因となり、ケガをするおそれがあります。
- ⑧ **本来の目的以外に使用しないでください。**
本来の目的以外に使用すると、製品が外れたり思わぬケガをするおそれがあります。
- ⑨ **有機溶剤やスプレータイプの殺虫剤などを直接噴射しないでください。**
お手入れは本取扱説明書のお手入れ方法以外のやり方では行わないようにしてください。
消毒する場合は、柔らかい布などに消毒剤を付けてから清拭し、必ず仕上げに水拭きしてください。
有機溶剤などお手入れに適さない物は、使用しないでください。

各部名称および梱包内容


各部の名称

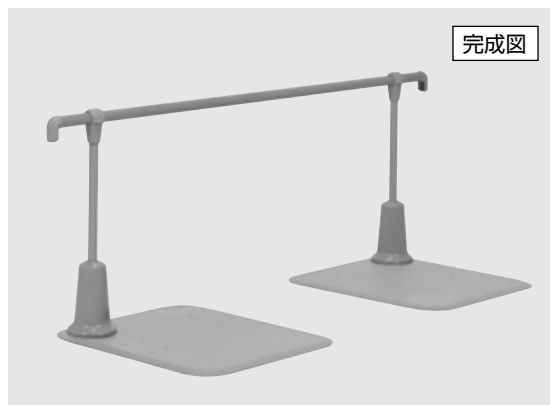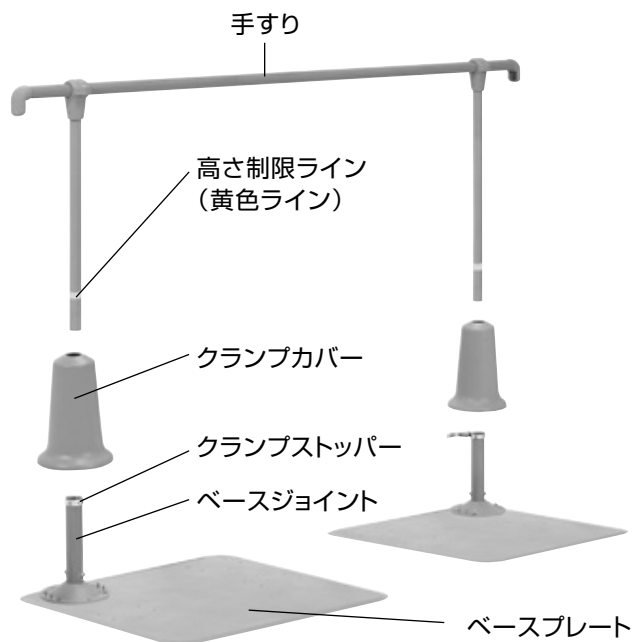

梱包内容

以下の部品が全てそろっているか、破損・変形などしていないかを確認してください。
万が一、部品の不足・破損があった場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。

手すり本体: 1台
(手すり、クランプカバー、ベースジョイント)
※出荷時には、組み立てられた状態になっています。

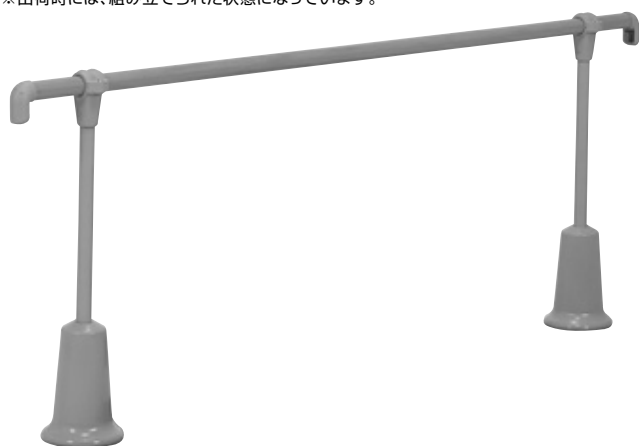

固定ネジ: 8ヶ



ナット: 8ヶ



ワッシャー: 16ヶ



ベースプレート: 2台



付属品




●取扱説明書 兼 保証書: 1部


組み立て方法

1 手すりとベースジョイントの取り外し

① クランプカバーを上げて、クランプストッパーを開きます。

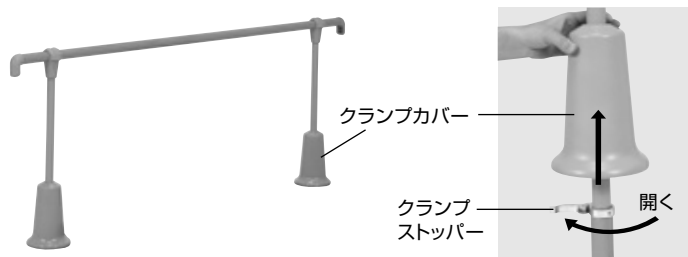

② 手すりとベースジョイントを外します。

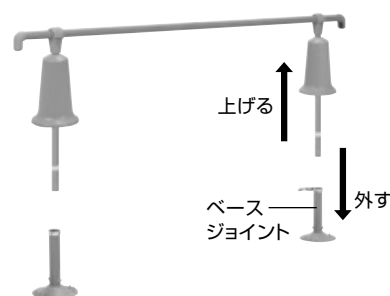


2 ベースジョイントとベースプレートの組み立て

① 手すりを取り付ける位置を決めます。


部屋の壁際で使う場合は、ベースプレートの端に手すりを取り付け、部屋の中央で使う場合は、ベースプレートの真ん中に取り付けます。

※詳しくは、設置方法をご参照ください。

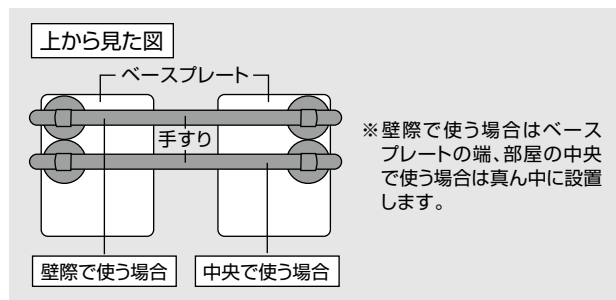

② 取り付け位置を決めたら、ナット・ワッシャー・固定ネジを右図の順番通りに締め付け、ベースプレートにベースジョイントを取り付けます。

※スパナ(13番)と六角レンチ(5mm)が必要です。工具は付属していません。

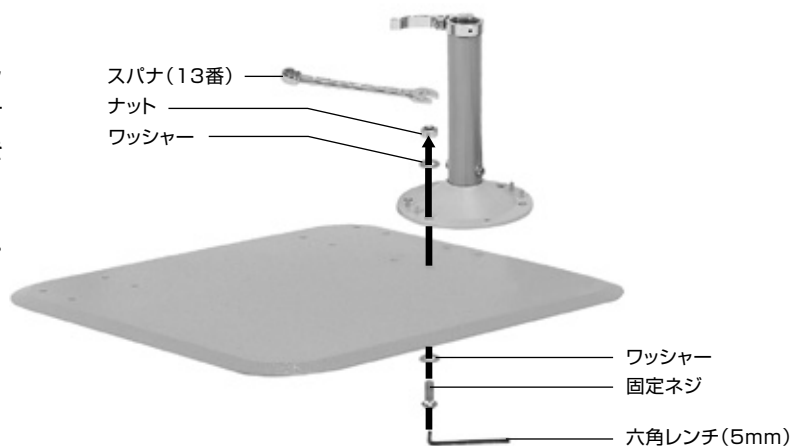


警告

- ① ベースジョイント取り付け後、固定ネジ(8ヶ所)を必ず締めてください。ゆるんだまま使用すると、使用中に手すりが外れ転倒し、ケガをするおそれがあります。
- ② 固定ネジを逆向き(ナットがベースプレート裏面)に取り付けしないでください。床面を傷付けるおそれがあります。

3 手すりの組み立て

① 手すりをベースジョイントに取り付けます。


② クランプストッパーを閉じ、クランプカバーを下げます。

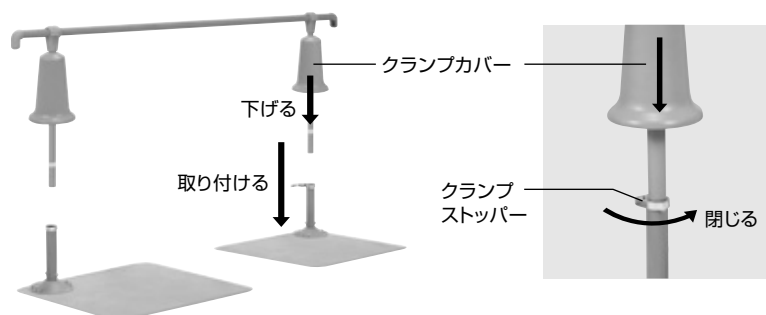

設置方法

バディーVの設置方法


部屋の壁際で使う場合は、手すりをベースプレートの端に取り付け、右図のように設置します。

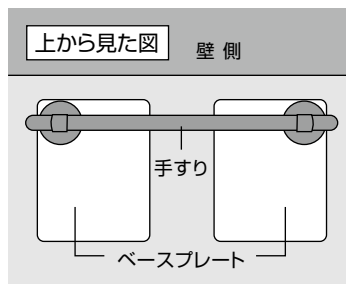

《設置例》



部屋の中央で使う場合は、手すりをベースプレートの真ん中に取り付け、右図のように設置します。

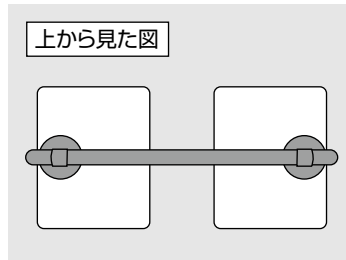

《設置例》




2台を組み合わせて使用する場合の設置方法


L字型



《設置例》

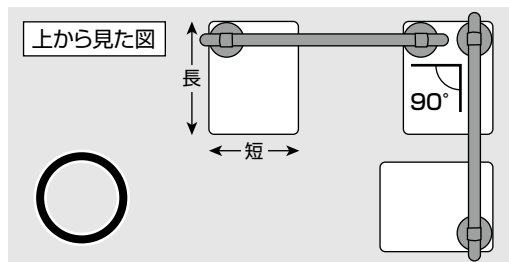


《不適切な設置例》

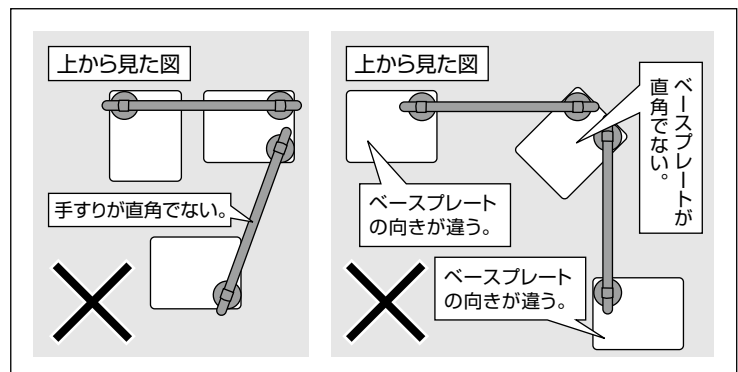


手すりおよびベースプレートが直角になるように設置してください。手すりおよびベースプレートを斜めに設置しないでください。

直線型

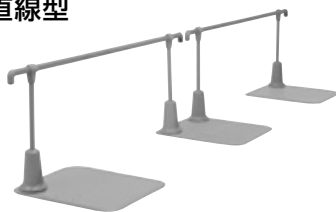


《設置例》

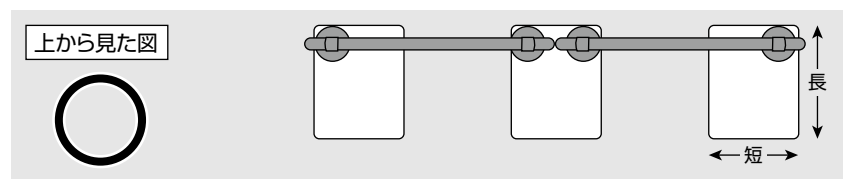

手すりはまっすぐ一列に、また、ベースプレートの短い辺を手すりに対して平行に設置してください。

《不適切な設置例》

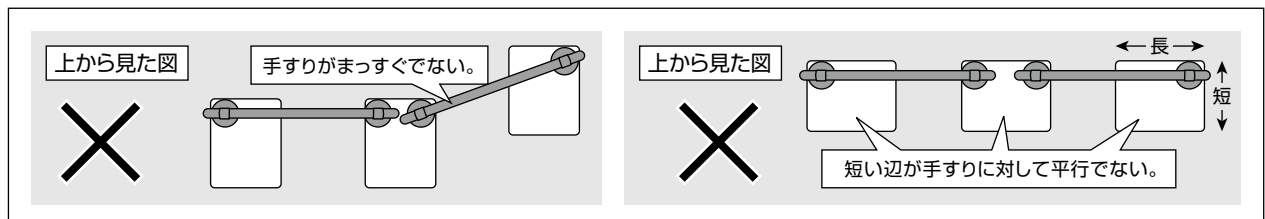


手すりを曲げて連結、また、長い辺を手すりに対して平行に設置しないでください。

警告 バディーVを3台以上連結しないでください。

※L字型・直線型で使用する場合は、ベースプレートに穴加工が必要になります。ベースプレート裏面の凹んでいる部分を穴加工してください。

高さ調整方法およびフィッティング


高さ調整方法

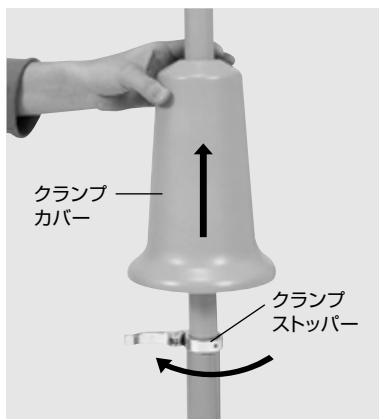

①クランプカバーを上げてクランプストッパーを開きます。



②手すりの高さを調整します。

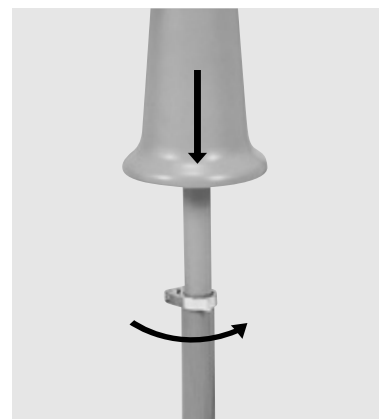

③クランプストッパーを閉じて、クランプカバーを下げます。



警告

- ①高さ調整後、クランプストッパーは必ずロックしてください。
ゆるんだまま使用すると、つかまったときに転倒・転落やケガをするおそれがあります。
- ②クランプカバーを必ずかぶせて使用してください。
- ③高さ調整後、必ず各パーツに力をかけて、ぐらつきがないことを確認してください。
- ④高さ調整ライン(黄色ライン)が見えていないことを必ず確認してください。

フィッティング方法

腰(大転子)と手すりの中心が水平になる高さに調整します。
手すりをつかみやすく、力が入りやすい高さなので、安定したつたい歩きをすることができます。



お手入れ方法

●ベースプレート、手すり

清拭する場合は、中性洗剤を水で薄め柔らかい布に浸し、よく絞ってから清拭してください。

その後残った洗剤分を、水に浸してよく絞った布で拭き取ってください。

最後に乾いた布で水滴・湿気をしっかり拭き取ってください。

※有機溶剤(シンナー、ベンジンなど)やスプレータイプの殺虫剤、
強塩酸洗浄剤などを使用しないでください。




点検項目

●バディーV組み立て後の確認事項

組み立てが完了しましたら、下記の点検項目を確認してください。
またこの点検項目は日常の点検にもお使いください。

点検項目		確認	
1	ベースジョイントとベースプレートの連結 ・ベースジョイントはベースプレートにしっかり固定していますか？ ・固定ネジは順番通りに取り付けられていますか？	YES <input type="checkbox"/>	NO P3参照
2	ベースジョイントと手すりの連結 ・高さ調整後、クランプストッパーをロックしていますか？ ・手すりに体重をかけて下にさがりませんか？ ・高さ制限ライン(黄色ライン)は見えていませんか？	YES <input type="checkbox"/>	NO P3、P4、P5参照
3	バディーVのガタつき確認 ・バディーVにガタつきはありませんか？ ・平らな場所に設置していますか？	YES <input type="checkbox"/>	NO P3、P4、P5参照
4	クランプカバーの取り付け確認 ・クランプストッパー部分にクランプカバーを取り付け、クランプストッパーにかぶせていますか？(2ヶ所)	YES <input type="checkbox"/>	NO P3、P5参照

このようなときには

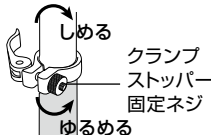症状	確認	処置
バディーVがグラグラして不安定	クランプストッパーをロックしていますか？	クランプストッパーをロックしてください。(P3、P5参照)
	ベースジョイント固定ネジがゆるんでいませんか？	ベースジョイント固定ネジを増し締めしてください。(P3参照)
	高さ制限ライン(黄色ライン)は見えていませんか？	高さ制限ライン(黄色ライン)が見えないように手すりを下げてください。(P5参照)
手すりに体重をかけると下にさがる	クランプストッパー固定ネジがゆるんでいませんか？	クランプストッパー固定ネジをしめてください。(P5参照) 
高さ調整ができない	クランプストッパーロックを解除していますか？	クランプストッパーロックを解除し高さ調整をしてください。(P5参照)

上記の処置で直らなかった場合、またはその他の現象の場合は、お求めの販売店または
(株)モルテン 健康用品事業本部 お客様窓口までご相談ください。

株式会社 モルテン 健康用品事業本部 お客様窓口
TEL (082) 842-9975

仕様

バディーV【1.8mタイプ】

品番 MNTGA

- サイズ：全長180×全幅70×高さ70～80cm(無段階調整可能)
- 手すりサイズ：長さ180cm、直径3.5cm
- 重量：26.5kg
- 素材：主材=スチールパイプ、表面=木目調樹脂、ベースプレート=スチール

■1年保証

バディーV【1.4mタイプ】

品番 MNTGB

- サイズ：全長140×全幅70×高さ70～80cm(無段階調整可能)
- 手すりサイズ：長さ140cm、直径3.5cm
- 重量：26.0kg
- 素材：主材=スチールパイプ、表面=木目調樹脂、ベースプレート=スチール

■1年保証

開発・製造元

株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部

www.molten.co.jp/health

東京 札幌 仙台 埼玉 名古屋 大阪 広島 福岡

製品他、各種お問い合わせは

〒739-1794 広島市安佐北区口田南2-18-12

TEL.082-842-9975

FAX ☎0120-769-123

E-mail:health@molten.co.jp

ISO9001 認証取得

ISO13485 認証取得

※床ずれ防止マットレスの設計、製造
および付帯サービスにて取得