

生活機能支援手すり **バディー VI**
(昇降支援:トイレ用)

取扱説明書



目次

○注意事項・・・・・・・・・・ P1
○各部名称および梱包内容・・・・ P2
○組み立て方法・・・・・・・・・・ P3
○設置方法・・・・・・・・・・ P4
○高さ調整方法およびフィッティング P5
○お手入れ方法・・・・・・・・・・ P5
○点検項目・・・・・・・・・・ P6
○このようなときには・・・・・・・・ P6
○保証書、仕様・・・・・・・・・・ P7

安全にお使いいただくために

この度は当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後もいつでも見られる場所に大切に保管してください。
ご本人の健康状態や体調が変化した場合には医師や看護師などの専門員に相談し、適切な処置を受けてください。

安全上のご注意 必ずお守りください

- ご本人や他の方への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。
取扱説明書に表示されている記号および言葉は、表示内容を無視した誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次のような表示区分で表しています。

⚠ 警告：死亡または重傷などを負う可能性がある場合。

⚠ 注意：障害を負う可能性または物的損害を発生させる可能性がある場合。

注意：本製品の故障を防止するための注意事項や、より快適にご使用いただくためのアドバイスが書かれていることを意味します。

- お守りいただく内容の種類を次の表示で区分して表しています。

⊘ この絵表示は、してはいけない「禁止」の意味です。

Ⓢ この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の意味です。

警告


- **手すりに座ったり、ぶら下がったり、踏み台にしないでください。**
手すりに座ったり、ぶら下がったり、踏み台にすると本体が外れたり、破損して転倒やケガをする恐れがあります。
- **手すりを横から引っ張らないでください。**
手すりを横から引っ張ると本体が傾いたり、倒れて転倒やケガをする恐れがあります。
- **必ずベースフレームを踏み付けて使用してください。**
- **手すりはしっかり固定して使用してください。**
手すりを固定しているクランプストッパーの強度を確認し、簡単にずれたり、外れたりしない事を確認して使用してください。固定が不十分な場合、使用中に転倒やケガをする恐れがあります。
- **クランプカバーを必ず取り付けて使用してください。**
バディーⅥを使用するときはクランプカバーを必ず取り付けて使用してください。
取り付けないで使用するとクランプストッパーなどに足などをぶつけてケガをする恐れがあります。
- **マットの上などには設置しないでください。**
マットの上などに設置すると使用中に本体が倒れたり、外れたりし、転倒やケガをする恐れがあります。
- **段差や傾斜のある床には設置しないでください。**
トイレの床面に段差や傾斜などがある場合は設置しないでください。
- **本製品は日本国内専用です。**
海外では使用できません。

注意

- **バディーⅥ本体にぶつからないように注意してください。**
ご本人の身の回りのお世話をする時や本体使用中など、バディーⅥ本体にぶつからないように注意してください。
強くぶつくと打撲の恐れがあります。
- **バディーⅥを移動したり運搬する場合、落下などに十分ご注意ください。**
バディーⅥを移動したり運搬する場合は手すりを持って運搬をしないでください。
ベースフレームから手すりが外れ、足元などに落下しケガをする恐れがあります。
- **ベースフレームと床面との段差でつまづかないように十分ご注意ください。**
ベースフレームと床面の間には段差があります。
段差でつまづいて転倒などしないよう、十分ご注意ください。
- **火気を近づけたり、ストーブやファンヒーターなどのそばで使用しないでください。**
火気やストーブ、ファンヒーターなどの熱により製品を損傷したり、火災の原因につながる恐れがあります。
- **お客様による分解・改造・修理はしないでください。**
変形・破損の原因となり、ケガをする恐れがあります。
- **本来の目的以外に使用しないでください。**
バディーⅥはトイレ専用です。本来の目的以外に使用すると、製品が外れたり思わぬケガをする恐れがあります。
- **有機溶剤やスプレータイプの殺虫剤などを直接噴射しないでください。**
清拭する場合は、中性洗剤を水で薄め柔らかい布に浸し、よく絞ってから清拭してください。
その後残った洗剤分を水に浸して、よく絞った布で拭き取ってください。
最後に乾いた布で水滴・湿気をしっかり拭き取ってください。

各部名称および梱包内容

●各部の名称

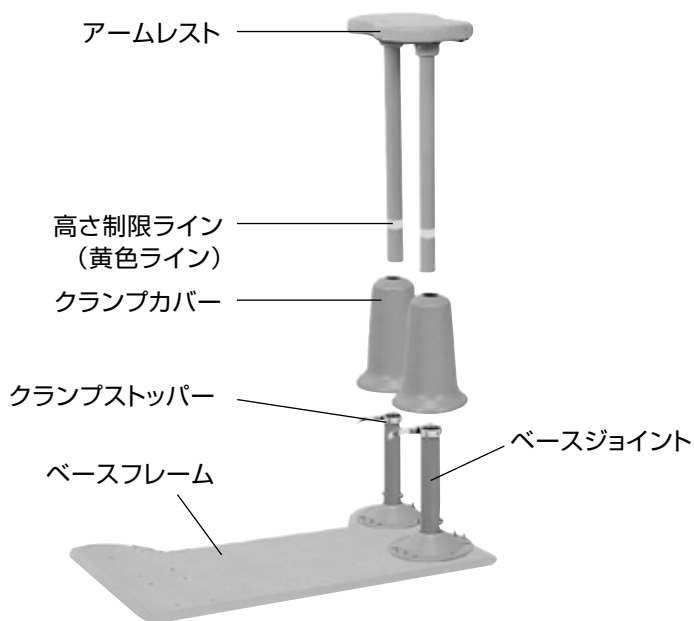


●梱包内容

記載部品が全て揃っているか、また破損・変形などしていないか確認してください。
万が一、部品の不足・破損があった場合はお買い求めの販売店にご連絡ください。

手すり本体：1台

(アームレスト、クランプカバー、ベースジョイント)

※出荷時には、組み立てられた状態になっています。

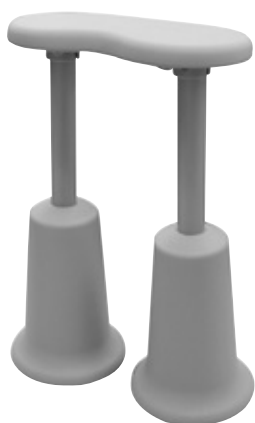

ベースフレーム：1台



固定ネジ：8ヶ



ナット：8ヶ



ワッシャー：16ヶ



付属品




●取扱説明書：1部


組み立て方法

●バディーVIの組み立て方法

- ① クランプカバーを上げて、クランプ
ストッパーを開きます。

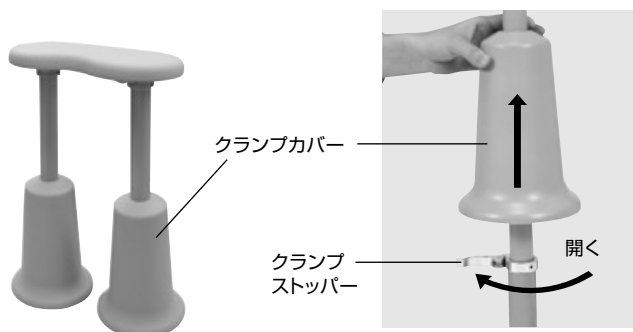


- ② 手すりとベースジョイントを外します。

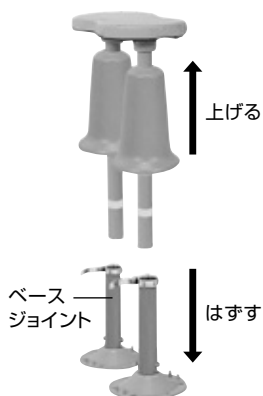


- ③ トイレ内の環境に合わせて、ベース
フレームの左右どちらに手すりを
取り付けるかを決めます。

※ベースフレームを右図のように設置します。

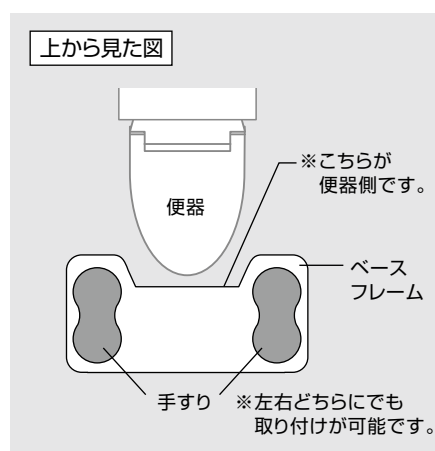

- ④ 取り付け位置を決めたら、ナット・ワッシャー・固定ネジを下図の順番通りにしめ付け、ベースフレームにベースジョイントを取り付けます。

※スパナ(13番)と六角レンチ(5mm)が必要です。工具は付属していません。

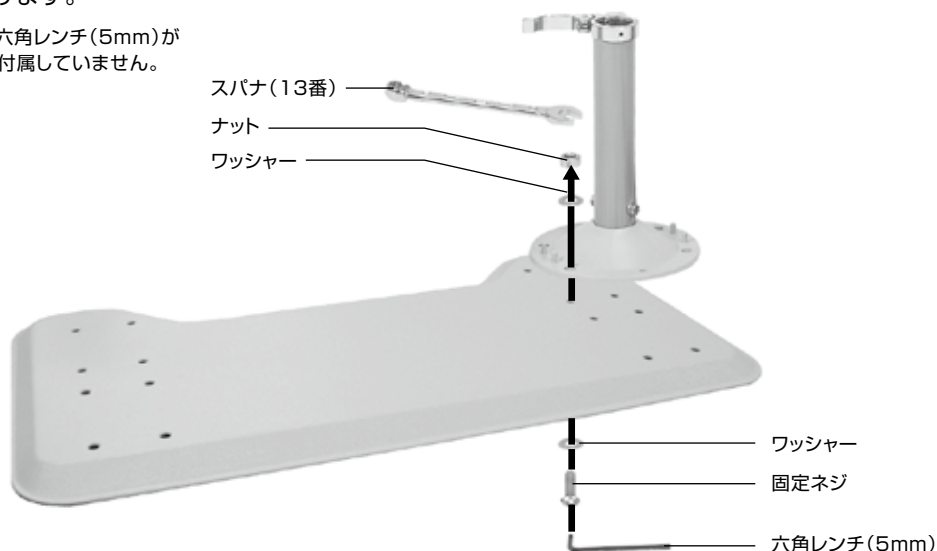


- ベースジョイント取り付け後、固定ネジ(8ヶ所)を必ずしめてください。ゆるんだまま使用すると、使用中に手すりが外れ転倒し、ケガをする恐れがあります。
- 固定ネジを逆向き(ナットがベースフレーム裏面)に取り付けしないでください。床面を傷付ける恐れがあります。

組み立て方法

⑤手すりをベースジョイントに取り付けます。

⑥クランプストッパーを閉じ、クランプカバーを下げます。

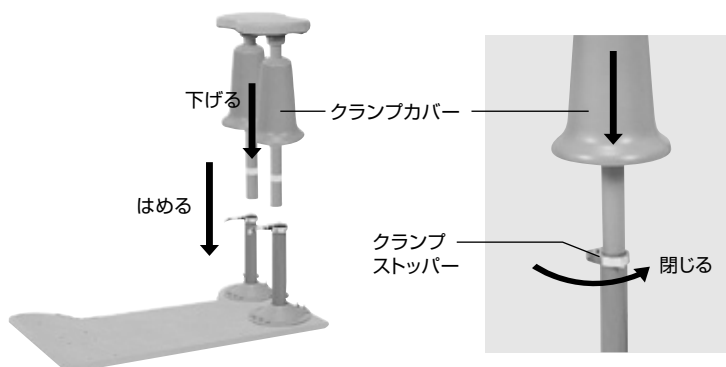

設置方法


●バディーVIの設置方法

ベースフレームを右図のようにトイレ内へ設置してください。



警告

●転倒防止のため、トイレ幅が半間(90cm)以上の場合は使用しないでください。

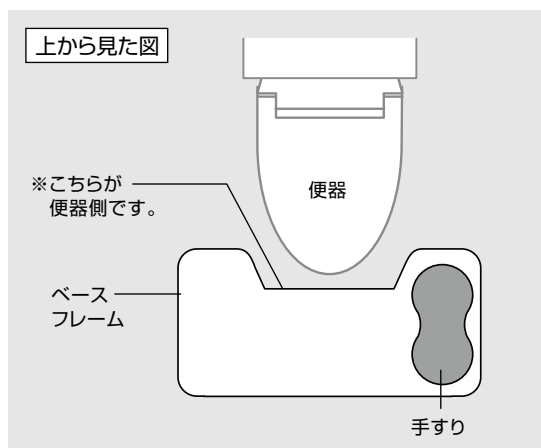

《設置例》



手すりは、左右両側に取り付けることもできます。


※追加の手すりは、オプション(別売)となります。



▲オプション装着例

高さ調整方法およびフィッティング


●高さ調整方法

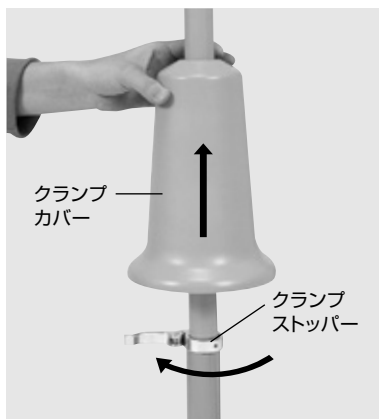

①クランプカバーを上げてクランプストッパーを開きます。



②手すりの高さを調整します。

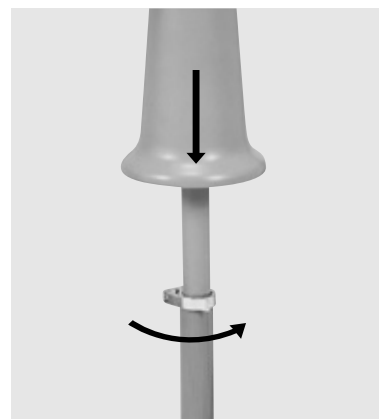

③クランプストッパーをしめて、クランプカバーを下げます。




警告

- 高さ調整後、クランプストッパーは必ずロックしてください。
ゆるんだまま使用すると、つかまった時に転倒・転落し、ケガをする恐れがあります。
- クランプカバーを必ず被せて使用してください。
- 高さ調整後、必ず各パーツに力をかけて、ぐらつきがないことを確認してください。
- 高さ調整ライン(黄色ライン)が見えていないことを必ず確認してください。

●フィッティング方法

腕を90°に曲げて、こぶしとアームレストの上面が水平になる高さにし、アームレスト先端と膝の位置を合わせます。手すり位置を前方にすることで前傾姿勢になり、立ち上がり動作が容易になります。

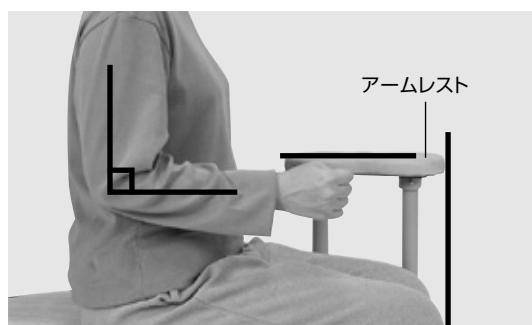

お手入れ方法

●ベースフレーム、手すり

清拭する場合は、中性洗剤を水で薄め柔らかい布に浸し、よく絞ってから清拭してください。

その後残った洗剤分を水に浸して、よく絞った布で拭き取ってください。

最後に乾いた布で水滴・湿気をしっかり拭き取ってください。

※有機溶剤(シンナー、ベンジンなど)やスプレータイプの殺虫剤、強塩酸洗浄剤などを使用しないでください。



点検項目

●バディーVI組み立て後の確認事項

組み立てが完了しましたら、下記の点検項目を確認してください。
またこの点検項目は日常の点検にもお使いください。

点検項目		確認	
1	ベースジョイントとベースフレームの連結 ・ベースジョイントはベースフレームにしっかり固定していますか？ ・固定ネジは順番通りに取り付けられていますか？	YES <input type="checkbox"/>	NO P3参照
2	ベースジョイントと手すりの連結 ・ベースジョイントと手すりはクランプストッパーでロックされていますか？ ・高さ制限ライン(黄色ライン)は見えていませんか？	YES <input type="checkbox"/>	NO P2、P4、P5参照
3	手すりのロック確認 ・高さ調整後、クランプストッパーをロックしていますか？ ・手すりに体重を掛けて下にさがりませんか？	YES <input type="checkbox"/>	NO P5参照
4	バディーVIのガタつき確認 ・バディーVIにガタつきはありませんか？ ・平らな場所に設置していますか？	YES <input type="checkbox"/>	NO P3、P4、P5参照
5	クランプカバーの取り付け確認 ・クランプストッパー部分にクランプカバーを取り付け、クランプストッパーに被せていますか？(2ヶ所)	YES <input type="checkbox"/>	NO P3、P4参照

このようなときには

症状	確認	処置
バディーVIがグラグラして不安定	クランプストッパーをロックしていますか？	クランプストッパーをロックしてください。(P4参照)
	ベースジョイント固定ネジがゆるんでいませんか？	ベースジョイント固定ネジを増し締めしてください。(P3参照)
	高さ制限ライン(黄色ライン)は見えていませんか？	高さ制限ライン(黄色ライン)が見えないように手すりを下げてください。(P4、P5参照)
手すりに体重をかけると下にさがる	クランプストッパー固定ネジがゆるんでいませんか？	クランプストッパー固定ネジをしめてください。(P5参照) 
高さ調整ができない	クランプストッパーロックを解除していますか？	クランプストッパーロックを解除し高さ調整をしてください。(P5参照)

上記の処置で直らなかった場合、またはその他の症状の場合はお求めの販売店または
(株)モルテン 健康用品事業部までご相談ください。

【お客様窓口】株式会社 モルテン 健康用品事業本部
TEL(082)842-9975

仕様

バディー VI (昇降支援：トイレ用) 品番 MNTH

- サイズ：全長41×全幅77×高さ50～60cm(無段階調整可能)
- アームレストサイズ：長さ28×幅15cm
- 重量：8.2kg
- 素材：ベースフレーム=スチール、パイプ部=スチール+木目調樹脂、アームレスト部=オレフィン系エラストマー

■1年保証

開発・製造元

株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部

ISO9001 認証取得

www.molten.co.jp/health

東京 札幌 仙台 埼玉 名古屋 大阪 広島 福岡

製品他、各種お問い合わせは

〒739-1794 広島市安佐北区口田南2-18-12

ISO13485 認証取得

※床ずれ防止マットレスの設計、製造および付帯サービスにて取得

TEL.082-842-9975

FAX ☎0120-769-123

E-mail:health@molten.co.jp