

# サイドレール サイドガードP

## 取扱説明書



### 安全にご使用いただくために

**必ず医師や看護師などの専門員とご相談の上で使用ください。**

この度は当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後もいつでも見られる場所に大切に保管してください。ご本人の健康状態や床ずれが変化した場合には医師や看護師などの専門員に相談し、適切な処置を受けてください。

### 安全上のご注意 必ずお守りください

- ご本人や他の方への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

取扱説明書に表示されている記号および言葉は、表示内容を見逃した誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次のような表示区分で表しています。

**⚠ 警告：**死亡または重傷などを負う可能性がある場合。

**⚠ 注意：**障害を負う可能性または物的損害を発生させる可能性がある場合。

**注意：**本製品の故障を防止するための注意事項や、より快適にご使用いただくためのアドバイスが書かれていることを意味します。

- お守りいただく内容の種類を次の表示で区分して表しています。

**⊘** この絵表示は、してはいけない「禁止」の意味です。

**Ⓢ** この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の意味です。

## 注意事項




### 警告


- **本製品はインプレス専用です。**  
本製品はモルテン電動式介護ベッド・インプレス専用です。インプレス以外の製品(ベッド)に使用しないでください。
- **サイドガードP使用時もベッドからの転落に十分注意してください。**  
サイドガードPの上から身を乗り出して落下し、ケガをする恐れがあります。  
寝返り・起き上がり・立ち上がりは十分注意して行ってください。
- **サイドガードP使用時の背上げ動作には十分注意してください。**  
サイドガードP使用時に背上げ動作をする場合は頭・腕・足などがサイドガードPの外に出ていないことを十分確認し、背上げ動作時にはさまれてのケガや抜けなくなるなどの事故に十分気を付けてください。
- **サイドガードPのすき間に頭や首が入らないように十分注意してください。**  
サイドガードPやウイングガードとのすき間に、頭や首が入らないようにしてください。  
頭や首がすき間に入ると抜けなくなり、ケガをする恐れがあります。
- **サイドガードPは必ず指定の位置・向きで取り付けて使用してください。**  
サイドガードPLはスライド式サイドレール受けに、サイドガードPSは足元側に取り付けます。
- **サイドガードPに座らないでください。**  
サイドガードPに座ったりぶら下がったりすると、転倒やケガの恐れがあります。
- **サイドガードPと他のサイドレール製品を組み合わせて使用しないでください。**  
他の製品と組み合わせた場合、ケガや破損する恐れがありますので、指定製品以外は使用しないでください。  
(P3『組み合わせ例』をご参照ください)
- **サイドガードPを持ってベッドを動かさないでください。**  
変形・破損の原因となり、ケガをする恐れがあります。
- **お客様による改造・修理はしないでください。**  
変形・破損の原因となり、ケガをする恐れがあります。
- **サイドガードPを手すり代わりに使用しないでください。**
- **透明プレートがついているヘッド側サイドガードPLは、ヘッド側サイドレールへの取り付けをお勧めします。**  
頭側・足元側を確認し、正しい向きで設置してください。透明プレートのある側が頭側になります。逆向きに取り付けることはできません。
- **本来の目的以外に使用しないでください。**  
本来の目的以外に使用すると、ベッドの破損や思わぬケガをする恐れがあります。
- **有機溶剤やスプレータイプの殺虫剤などをサイドガードPに直接噴射しないでください。**  
シンナー、ベンジンなどの有機溶剤や殺虫剤に含まれる溶剤によってサイドガードPが破損・変色・溶解する恐れがあります。  
また、破損・溶解した部分で思わぬケガをする恐れがあります。清拭する場合は、中性洗剤を水で薄め柔らかい布に浸し、よく絞ってから清拭してください。その後残った洗剤分を水に浸した柔らかい布で拭き取ってください。
- **本製品は日本国内専用です。**  
海外では使用できません。

## 各部名称および梱包内容

### ● サイドガードPL

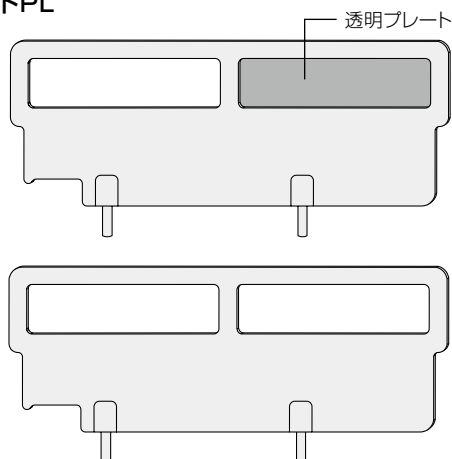

### ● サイドガードPS

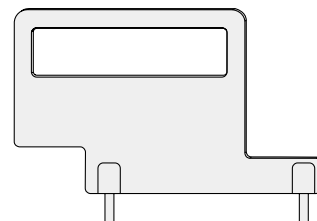


付属品



● 取扱説明書: 1部


# ベッドへの取り付け方法

## ●スライド式サイドレール受けの調整方法

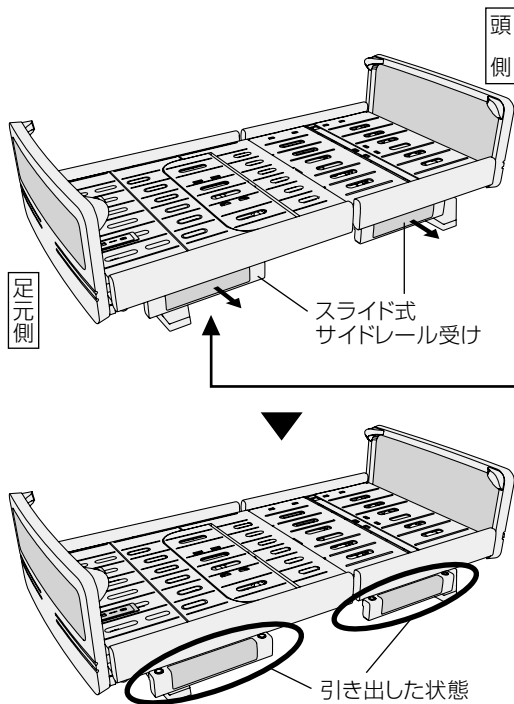


ベッドを組み立てた後でサイドレール(付属品)を取り付ける場合は、以下の手順でスライド式サイドレール受けを引き出してください。  
スライド式サイドレール受けを固定している蝶ナット(2ヶ所)をゆるめ、手前に引き出してください。

【ベッドの下から見た図】

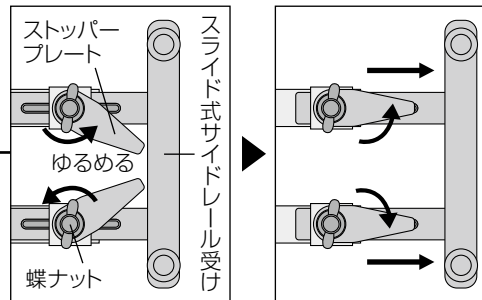



いっぱいまで引き出したら、ストッパープレートの返しを溝にはめ、先ほどゆるめた蝶ナット(2ヶ所)をしめ、スライド式サイドレール受けが動かないように固定してください。

【ベッドを上からみた図】

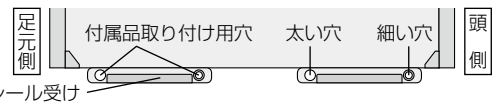

付属品取り付け用の、細い穴が頭側となっていることを確認してください。

## ●サイドガードPL、サイドガードPSの取り付け方法

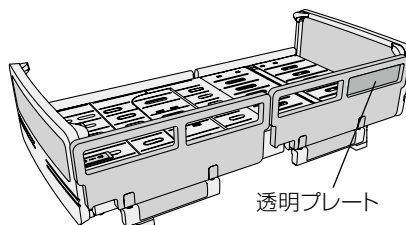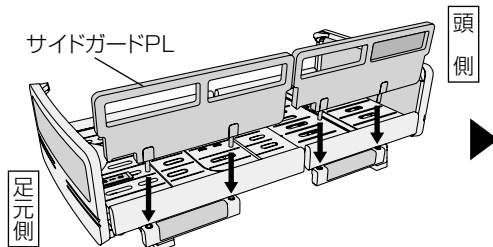


引き出したスライド式サイドレール受けに、サイドガードPLを差し込みます。  
図のように差し込んで完成です。

※サイドガードPSの場合も同様に差し込んでください。

### サイドガードPL取り付け時の注意点

- 頭側・足元側を確認し、正しい向きで設置してください。  
スライド式サイドレール受けの穴のサイズが左右で異なるため、逆向きに取り付けることはできません。

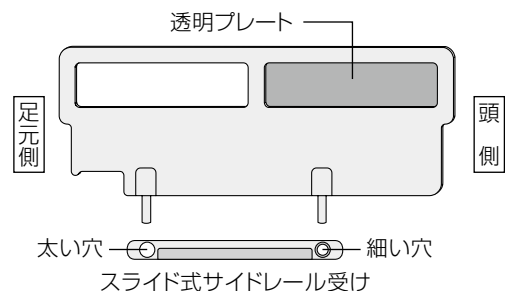

## 日常のお手入れ方法

清拭する場合は、中性洗剤を水で薄め柔らかい布に浸し、よく絞ってから清拭してください。  
その後残った洗剤分を、水に浸してよく絞った布で拭き取ってください。  
最後に乾いた布で水滴・湿気をしっかり拭き取ってください。

※有機溶剤(シンナー、ベンジンなど)やスプレータイプの殺虫剤、強塩酸洗浄剤などを使用しないでください。




## 付属品の適合


### ●より安全に使用するためのインプレスと付属品の組み合わせ

#### 付属品の組み合わせ例


付属品であるサイドレールやベッド用グリップ(手すり)は、ベッド本体(インプレス)の専用として使用してください。

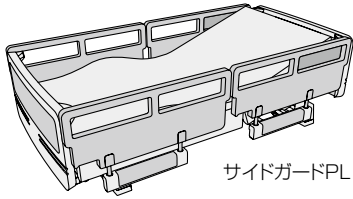

サイドガードPL 4本

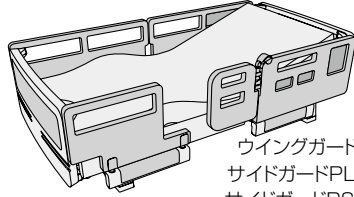

ウイングガード1本  
サイドガードPL 2本  
サイドガードPS 1本

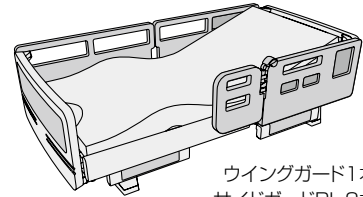


ウイングガード1本  
サイドガードPL 2本


上記3パターンは代表的な例です。

#### マットレス使用時の注意点


圧切替型マットレスを使用する場合は、マットレスとポンプをつなぐカブラがサイドレールにはさまれないよう、注意して設置してください。

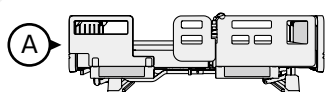


右図はAの視点から見た説明です。

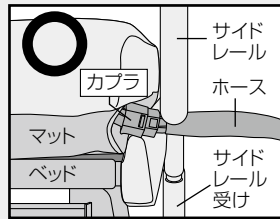

▲カブラがサイドレールより内側に入っている。

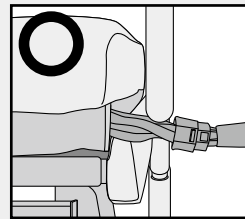

▲カブラがサイドレールより外側に出ている。

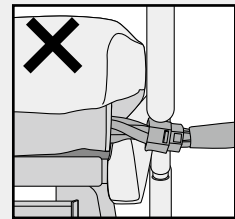

▲カブラがサイドレールの真下にはさまっている。

※インプレスはベッドの長さを〈レギュラー〉〈ショート〉〈ロング〉の3サイズに調整ができます。(部品交換や工具は一切不要)

※安全規格上、『ベッド本体』、『サイドレール』、『ベッド用グリップ(手すり)』との組み合わせで発生するすき間を全て対策しなくてはなりません。

※サイドガードP、ウイングガードの『ノーマルタイプ』と『Hタイプ』を組み合わせ使用しないでください。ケガをする恐れがあります。



**警告**

●上記以外の付属品は使用しないでください。

## ■適応機種=モルテン電動式介護ベッド インプレス

## 仕様

### サイドガードP

品番

PL	MMPRO1BE (ノーマルタイプ 2本組)	MMPRO1HBE(ノーマルタイプ ヘッド側)
		MMPRO1FBE(ノーマルタイプ フット側)
	MMPRO1BEH (Hタイプ 2本組)	MMPRO1HBEH(Hタイプ ヘッド側)
		MMPRO1FBEH(Hタイプ フット側)
	MMPRO1HHBE(ノーマルタイプ 透明プレート付 2本組)	
	MMPRO1FFBE(ノーマルタイプ 透明プレート無 2本組)	
PS	MMPRO1HHBEH(Hタイプ 透明プレート付 2本組)	
	MMPRO1FFBEH(Hタイプ 透明プレート無 2本組)	
	MMPRO2BE(ノーマルタイプ)	
	MMPRO2BEH(Hタイプ)	

#### サイドガードP

●素材: ポリプロピレン

●対応するマットレスの厚さ: サイドガードP、ウイングガード【ノーマルタイプ】使用状態で14cm以下、【Hタイプ】使用状態で20cm以下  
※最大マットレス厚さを超える厚さのマットレスを使用した場合、ベッドから転落する恐れがあります。

適合するマットレスについては、インプレス取扱説明書P32、P33「マットレスの適合」をご参照ください。

PL

ノーマルタイプ

●サイズ: 幅97.5cm、ボトム面からの高さ36cm

●重量: 3.5kg

Hタイプ

●サイズ: 幅97.5cm、ボトム面からの高さ42cm

●重量: 3.7kg

PS

ノーマルタイプ

●サイズ: 幅69cm、ボトム面からの高さ36cm

●重量: 2.5kg

Hタイプ

●サイズ: 幅69cm、ボトム面からの高さ42cm

●重量: 2.7kg

#### ■インプレス専用

開発・製造元

株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部

[www.molten.co.jp/health](http://www.molten.co.jp/health)

東京 札幌 仙台 埼玉 名古屋 大阪 広島 福岡

製品他、各種お問い合わせは

〒739-1794 広島市安佐北区口田南2-18-12

TEL.082-842-9975

FAX ☎0120-769-123

E-mail:health@molten.co.jp

ISO9001 認証取得

ISO13485 認証取得

※床ずれ防止マットレスの設計、製造および付帯サービスにて取得