


標準マットレス テルサ

取扱説明書

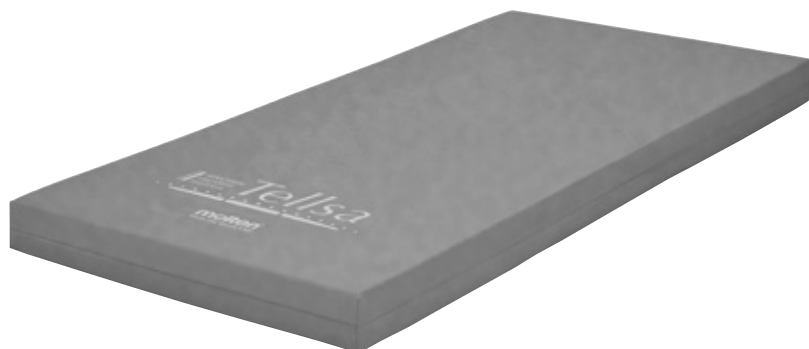

目次

| | | |
|---------|-----------|-----|
| ○注意事項 | ・ ・ ・ ・ ・ | P 1 |
| ○各部名称 | ・ ・ ・ ・ ・ | P 2 |
| ○設置方法 | ・ ・ ・ ・ ・ | P 2 |
| ○お手入れ方法 | ・ ・ ・ ・ ・ | P 3 |
| ○仕様 | ・ ・ ・ ・ ・ | P 4 |

安全上の注意 必ずお守りください



警告：死亡または重傷などを負う可能性を意味します。



：してはいけない「禁止」を意味します。

注意：本製品の故障を防止するための注意事項や、より満足に使用していただくためのアドバイスを意味します。



！：必ず実行していただく「強制」を意味します。

注意事項



警告

- ①【防水・清拭消毒タイプ】(2020年10月以降)は最初に製品を使用する前に必ずマットレスを平らな場所に置いてインナー保護フィルムの所定箇所を裂き、マットレスを復元してください。
マットレスが復元していない状態で使用すると、マットレスが硬く適正な体圧分散性能が発揮されません。
- ②【防水・清拭消毒タイプ】(2020年10月以降)は長期間(2週間以上)圧縮したまま保管しないでください。
マットレスが復元しにくくなる可能性があります。
- ③【防水・清拭消毒タイプ】(2020年10月以降)はインナー保護フィルムは取り外さず、そのままの状態で使用してください。
- ④使用中、体に異常を感じたり、不安を感じた場合には直ちに使用をやめ、医師や看護師、福祉用具専門相談員などの専門の方に相談してください。
- ⑤本来の目的以外に使用しないでください。
思わぬ事故やケガをまねくおそれがあります。
- ⑥熱い物の近くに置かないでください。
火災・変形・破損につながるおそれがあります。

注意

- ①長期間マットレスの上に重量物を置いて保管しないでください。
マットレス表面に跡が残るおそれがあります。
- ②直射日光のあたる場所、湿度の高い場所では保管しないでください。
変色やカビなどの発生の原因になります。
- ③マットレスを折り曲げた状態で保管しないでください。
へたりや変形・破損の原因になります。
- ④マットレスの上や下に突起物を置かないでください。
マットカバーの破れなどの原因になります。



各部名称

以下の部品が全てそろっているか、破損・変形などしていないかを確認してください。
万が一、部品の不足・破損があった場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。


【インナー保護フィルム仕様】

■取っ手(片側2ヶ所)

※防水・清拭消毒タイプのみ。
通気・洗浄消毒タイプには
ありません。

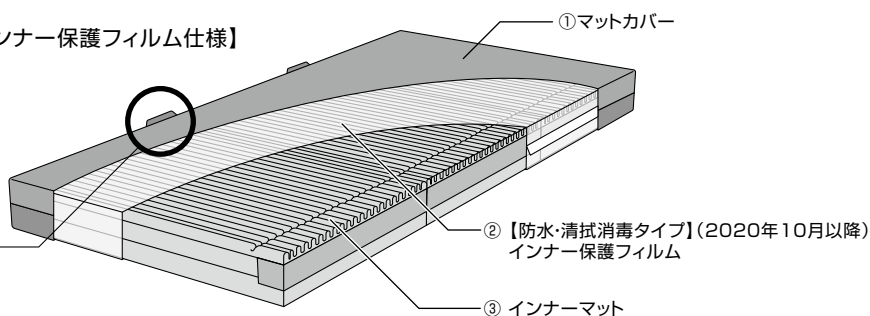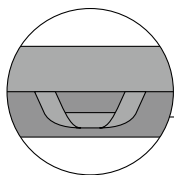

【インナーメッシュ仕様】

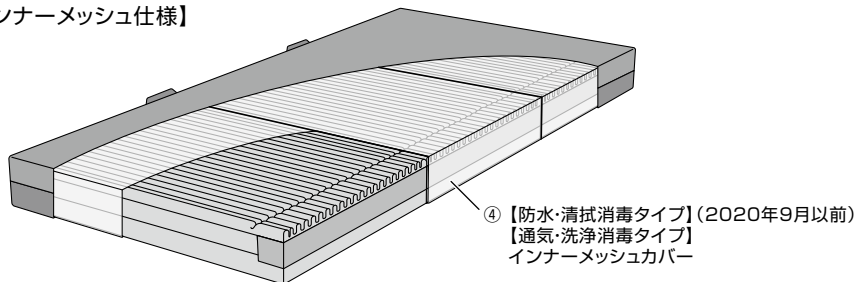

付属品






●取扱説明書
: 1部

設置方法

【防水・清拭消毒タイプ】(2020年10月以降)
マットレスを平らな場所に置いてインナー保護
フィルムの黄枠部分を裂き、マットレスを復元
してください。

マットレスは数十秒で使用可能な程度まで復元
します。

復元後もマットレスの角が丸まっている場合が
あります。その場合は、角を引っ張って整えて
ください。

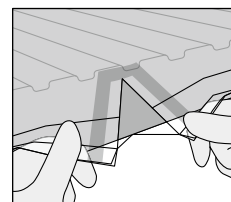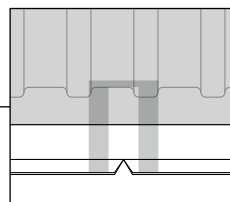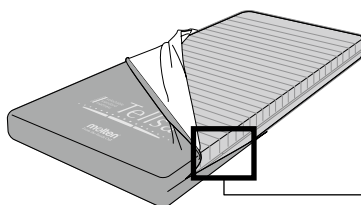

【防水・清拭消毒タイプ】(2020年9月以前) / 【通気・洗浄消毒タイプ】
そのままの状態で使用できます。(復元の必要はありません)

※インナー保護フィルムは取り外さず、そのままの状態で使用してください。
※ベッドの上に直接敷いて使用してください。
※サイドレールを必ず使用し、シーツを掛けて使用してください。


選べる質感

〈リバーシブルによる選択〉


体全体を優しくつつみ込む【やわらか面】と、体の沈み込みをおさえ寝返りのしやすい【しっかり面】の異なる質感を選ぶことができます。

※【やわらか面】と【しっかり面】の判別は、カバーのタグに記載してあります。

【やわらか面】

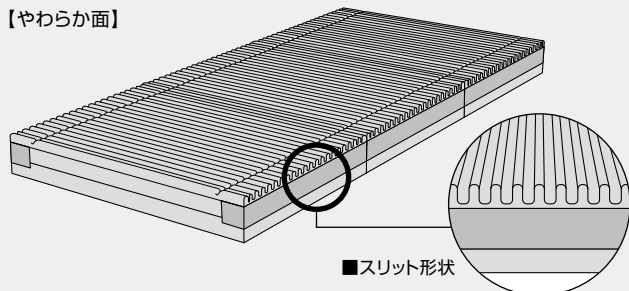


【しっかり面】

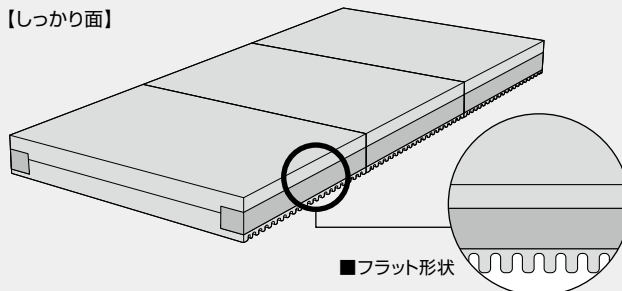


設置方法

〈部分交換による選択〉

マットレス内部は3つのインナーマットから構成されており、【やわらか面】と【しっかり面】を部分的に組み合わせ、異なる質感を選ぶことができます。

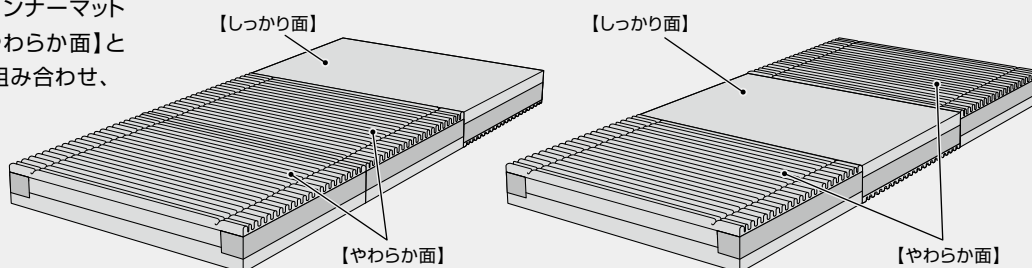

※【防水・清拭消毒タイプ】で部分交換する場合は、インナー保護フィルムの側面を大きく切り開いて作業してください。

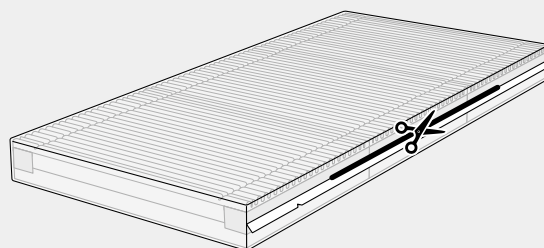

お手入れ方法

汚れの落としかた

【防水・清拭消毒タイプ】

汚れが少ない場合は、マットカバー表面を水またはお湯を染み込ませた布で汚れた部分を拭き取ってください。

もしくは市販の中性洗剤やアルコールを布に含ませて清拭してください。

汚れがひどい場合は、マットカバーを取り外し、洗濯機などで丸洗い洗浄してください。

洗浄後は乾燥機による乾燥または陰干ししてください。

インナー保護フィルム(2020年10月以降)は中性洗剤、またはアルコールを布などに含ませて汚れを取り除いてください。


※マットカバーはマットレスの凹凸面にロゴ印刷面を合わせて取り付けてください。

【通気・洗浄消毒タイプ】


マットカバーを取りはずし、洗濯機などで洗浄してください。

洗浄後は乾燥機による乾燥または陰干ししてください。

※マットカバーはマットレスの凹凸面にロゴ印刷面を合わせて取り付けてください。

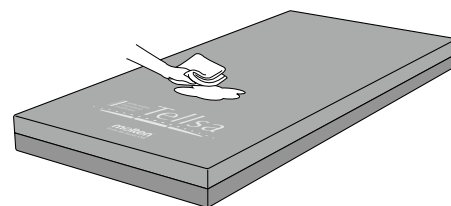

- ⊗ シンナーやベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
- ⊗ 酸性洗剤は素材を傷めるおそれがあるので使用しないでください。
- ⊗ 漂白剤は色落ちや変色の原因になるので使用しないでください。
- ⊗ マットカバーが縮むおそれがあるのでドライクリーニングはしないでください。
- ① マットカバーを洗濯機で洗う場合は、キズが付くおそれがあるのでネットを使用してください。
- ① マットカバーを洗浄・乾燥する場合は、縮むおそれがあるので洗浄水温は40℃以下、乾燥温度は80℃以下で行ってください。
- ① 塩素系洗剤を使用する場合は、変色するおそれがあるので200～300倍に薄めて使用してください。

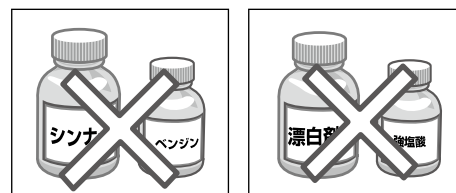

お手入れ方法


消毒のしかた

【防水・清拭消毒タイプ】

消毒薬やアルコールを噴霧または布に染み込ませて清拭してください。
消毒装置を使用する場合は、分解せず平置きの状態または横向きに立てた状態で
曲げずに装置に入れてください。温度設定は《80℃》に設定してください。

【通気・洗浄消毒タイプ】

消毒装置を使用する場合は、分解せず平置きの状態または横向きに立てた状態で
曲げずに装置に入れてください。温度設定は《80℃》に設定してください。

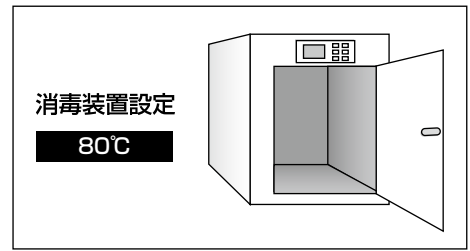


- ⊗ マットレスを消毒装置に入れる場合は、変形や破損のおそれがあるので、80℃以上の温度にしないでください。
- ⊗ マットレスをオゾン消毒する場合は、ウレタン層が劣化するおそれがあるので、高濃度(5ppm以上)で長時間の消毒は行わないでください。

お手入れ後の保管

- ⊗ 変形や破損のおそれがあるので、重量物を上に置いたまま保管しないでください。
- ⊗ 折りたたんだり、丸めたりしないでください。
- ⊕ カビなどが発生するおそれがあるので、汚れを取り除き、よく乾燥させてから保管してください。
- ⊕ 材質や色が変わるおそれがあるので、直射日光に当たらない場所で保管してください。

長くお使いいただくために

特殊な高反発系のウレタンフォームと3分割構造により、一定期間使用
した後、3つのインナーマットの位置を入れ替えることで、同一部位の
“へたり(凹)”を対策できます。
入れ替え作業をする場合は、インナー保護フィルム側面を大きく切り
開いて作業してください。

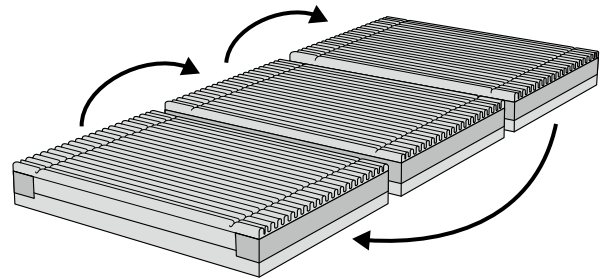

仕様

テルサ

品番 防水・清拭消毒タイプ MTLS1283(83cm幅)／MTLS1291(91cm幅)
通気・洗浄消毒タイプ MTL SV1283(83cm幅)／MTL SV1291(91cm幅)

- 素材 アウターカバー部：ウレタン合皮(防水・清拭消毒タイプ、制菌加工)、ポリエステル(通気・洗浄消毒タイプ)
インナー保護フィルム：EVA
インナーメッシュカバー：ポリエステル
インナーマット：ウレタンフォーム

83cm幅 サイズ：幅83×長さ191×厚さ12cm 重量：6.8kg
91cm幅 サイズ：幅91×長さ191×厚さ12cm 重量：7.3kg

標準マットレス

| | |
|--|--|
| 開発・製造元 | 株式会社 モルテン |
| ISO9001 認証取得 ISO13485 認証取得 ※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、 製造および付帯サービスにて取得 | 健康用品事業本部 www.molten.co.jp/health |
| 本製品の取扱説明書は下記QRコード からダウンロードいただけます。 | 東京 札幌 仙台 埼玉 名古屋 大阪 広島 福岡 製品他、各種お問い合わせは 〒733-0036 広島市西区観音新町四丁目10-97-21 TEL.082-578-9226 E-mail:health@molten.co.jp |
|  取扱説明書 | 〈電話による受付時間〉月曜日～金曜日/9:00～17:00 ※祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休業日など弊社休業日を除く |