


注意事項




- ①火気・高温の近くで使用しないでください。火災・変形の原因となります。
- ②直射日光の当たる場所、湿度の高い場所では保管しないでください。
- ③本来の目的以外で使用しないでください。
- ④ファスナーの開閉は、肌をはさまないようにファスナーを体から浮かせて行ってください。

着方・おむつ交換方法

着方 ※全介助(完全な寝たきり)の方でも簡単に着用できます。

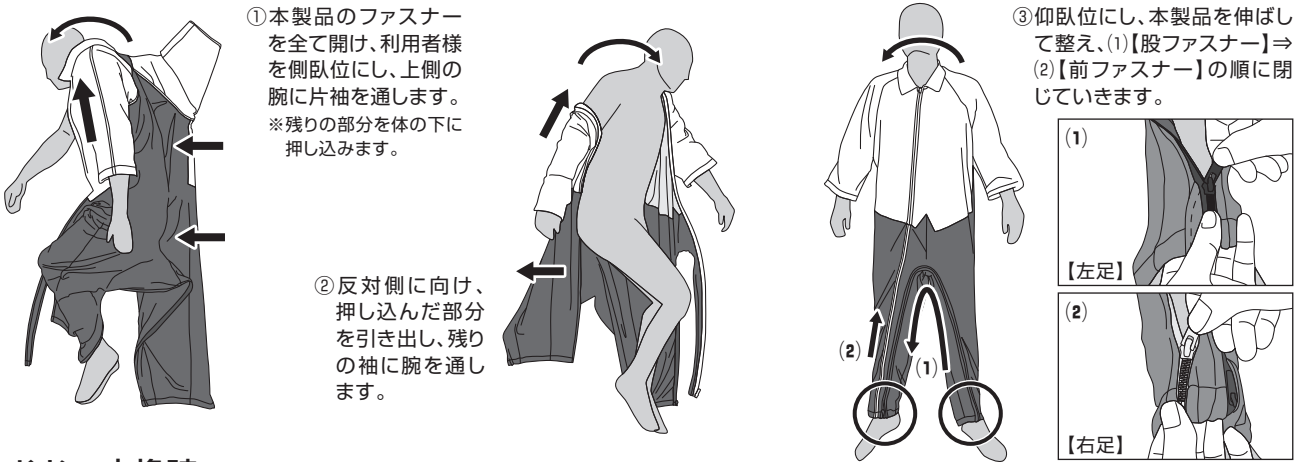

おむつ交換時

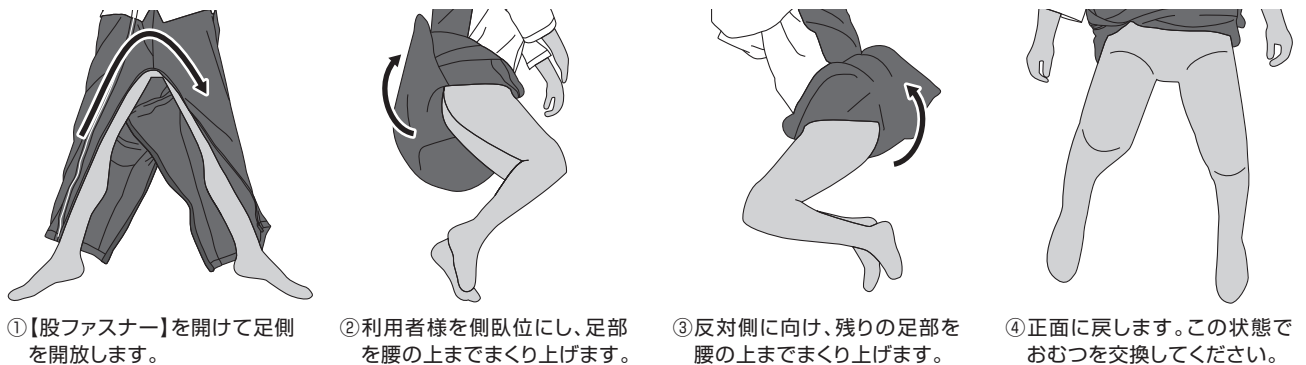

お手入れ方法

❗：必ず実行していただく「強制」を意味します。

洗 浄

- 家庭用洗濯機による丸洗いが可能です。
- ①温水で洗濯する場合は、《30℃以下》で行ってください。
 - ①ファスナーは完全に閉めて洗濯してください。
 - ①洗濯ネットに入れて洗濯してください。
- 乾燥機による乾燥が可能です。
- ①乾燥は《80℃以下》で行ってください。
 - ①ファスナーは完全に閉めて乾燥してください。

消 毒

- ①塩素系洗剤(次亜塩素酸ナトリウム)は使用方法および注意事項をよくお読みの上、常温で使用してください。
※80℃以上の熱水で行うと、機能を損なうおそれがありますので、必ず指定の温度をお守りください。
- ①消毒装置を使用する場合は、温度80℃×1時間に設定してください。

開発・製造元

ISO9001認証取得
ISO13485認証取得
※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、製造および付帯サービスにて取得
本製品の取扱説明書は下記QRコードからダウンロードいただけます。



取扱説明書

株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部

www.molten.co.jp/health

東京 札幌 仙台 埼玉 名古屋 大阪 広島 福岡

製品他、各種お問い合わせは

〒733-0036 広島市西区観音新町四丁目10-97-21

TEL.082-578-9226

E-mail:health@molten.co.jp

〈電話による受付時間〉月曜日～金曜日/9:00～17:00
※祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休業日など弊社休業日を除く