

取扱説明書

注意事項

❗ : 必ず実行していただく「強制」を意味します。




注意

- ① 中身のクッションビーズを食べないでください。
- ② 火気・高温の近くで使用しないでください。火災・変形の原因になります。
- ③ 長期間クッションの上に重量物を置かないでください。変形の原因になります。
- ④ 直射日光の当たるところで保管しないでください。変形・変色の原因になります。

高さの調整方法

※2015年3月より

- ① 外カバーから本体を取り出します。
- ② ファスナーの取っ手を二重になっているゴムバンドの間から外してファスナーを開きます。
- ③ 中身(クッションビーズ)を調整します。
- ④ ファスナーを閉め、ファスナーの取っ手をゴムバンドの間に入れ込んでください。
- ⑤ ファスナーの取っ手は必ずゴムバンドの間に入れ込んでください。洗濯時にファスナーが開いてしまうおそれがあります。

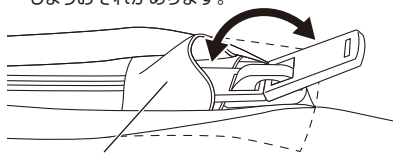

ゴムバンド(二重)

お手入れ方法

汚れの落とし方

汚れが少ない場合は、外カバーのみを洗濯してください。汚れがひどい場合は、外カバーから本体を取り出し、両方とも洗濯機などで丸洗い洗浄してください。洗浄後は、乾燥機または天日干ししてください。

- ① 洗濯する場合は、カバーが縮むおそれがあるので水温40℃以下で洗濯してください。
- ② 乾燥機の設定は、クッションビーズが変形するおそれがあるので《80℃で10分以内》に設定してください。

消毒のしかた

- ① 塩素系洗剤(次亜塩素酸ナトリウム)を使用する場合は、カバーやクッションビーズが劣化するおそれがあるので200~300倍に薄めて使用してください。
- ② オートクレープなどの高温消毒装置は、クッションビーズが変形するおそれがあるので使用しないでください。

仕様

ピーチ

品番 MPHMCV(ピーチ・ノーマル) / MPHLCV(ピーチ・ラージ) / MPHXCVC(ピーチ・ワイド) / MPHSLCV(ピーチ・スリム)

●素材 クッションビーズ: オレフィン系エラストマー カバー: ポリエステル

ピーチ・ノーマル サイズ: 41×31cm 重量: 1.2kg

ピーチ・ワイド サイズ: 63×43cm 重量: 2.4kg

ピーチ・ラージ サイズ: 53×33cm 重量: 1.7kg

ピーチ・スリム サイズ: 70×28cm 重量: 1.5kg

オプション

外カバー単体

品番 MPHMCV(ピーチノーマル・外カバー)
MPHLCV(ピーチラージ・外カバー)
MPHXCVC(ピーチワイド・外カバー)
MPHSLCV(ピーチスリム・外カバー)

オプションカバー ※外カバーにかぶせる綿のカバー(ピローケース)

品番 MPHOPM(ピーチオプション・ノーマル用)
MPHOPL(ピーチオプション・ラージ用)
MPHOPX(ピーチオプション・ワイド用)
MPHOPSL(ピーチオプション・スリム用)

株式会社 モルテン 健康用品事業本部 お客様窓口
TEL(082)842-9975

開発・製造元

株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部

www.molten.co.jp/health

東京 札幌 仙台 埼玉 名古屋 大阪 広島 福岡
製造所: 各種お問い合わせ
〒739-1794 広島市安佐北区口田南2-18-12

ISO13485認証取得
※床ずれ防止マッテレス・体動センサの設計・製造および付帯サービスにて取得

TEL.082-842-9975
FAX 0120-769-123
E-mail:health@molten.co.jp