

取扱説明書

注意事項

①：必ず実行していただく「強制」を意味します。




注意

- ① 中身のクッションビーズを食べないでください。
 - ② 火気・高温の近くで使用しないでください。
 - ③ 長期間クッションの上に重量物を置かないでください。
 - ④ 直射日光の当たる場所で保管しないでください。
- 火災・変形の原因になります。
- 変形の原因になります。
- 変形・変色の原因になります。

外カバーのファスナータグについて

クッションの中身を誤飲するおそれのある利用者様に使用するなど、ファスナーを簡単に開けたくない場合は、タグを切り取りスライダーの取っ手をゴムバンドの内側に入れてください。

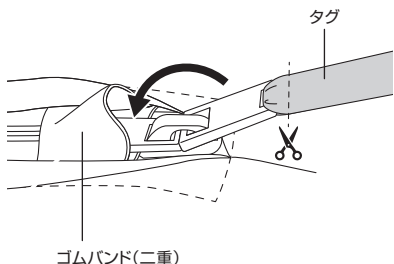

お手入れ方法

汚れの落としかた

汚れが少ない場合は、外カバーのみを洗濯してください。汚れがひどい場合は、外カバーから本体を取り出し、両方とも洗濯機などで丸洗い洗浄してください。洗浄後は、乾燥機または天日干ししてください。

- ① 洗濯する場合は、カバーが縮むおそれがあるので水温40℃以下で洗濯してください。
- ① 乾燥機の設定は、クッションビーズが変形するおそれがあるので《80℃で10分以内》に設定してください。

消毒のしかた

- ① 塩素系洗剤(次亜塩素酸ナトリウム)を使用する場合は、カバーやクッションビーズが劣化するおそれがあるので200~300倍に薄めて使用してください。
- ① オートクレープなどの高温消毒装置は、クッションビーズが変形するおそれがあるので使用しないでください。

仕様

ピーチ

品番 MPHMCV(ピーチ・ノーマル) / MPHLCV(ピーチ・ラージ) / MPHXCX(ピーチ・ワイド) / MPHSLC(ピーチ・スリム)

●素材：クッションビーズ=オレフィン系エラストマー、中メッシュ=ポリエステル、外カバー=ポリエステル

〔ピーチ・ノーマル〕 サイズ：41×31cm 重量：1.2kg

〔ピーチ・ワイド〕 サイズ：63×43cm 重量：2.4kg

〔ピーチ・ラージ〕 サイズ：53×33cm 重量：1.7kg

〔ピーチ・スリム〕 サイズ：70×28cm 重量：1.5kg

オプション

外カバー単体

品番 MPHMCV(ピーチノーマル・外カバー)
MPHLCV(ピーチラージ・外カバー)
MPHXCX(ピーチワイド・外カバー)
MPHSLC(ピーチスリム・外カバー)

〔オプションカバー〕 ※外カバーにかぶせる専用カバー(ピローケース)

品番 MPHOPM(ピーチオプション・ノーマル用)
MPHOPL(ピーチオプション・ラージ用)
MPHOPX(ピーチオプション・ワイド用)
MPHOPSL(ピーチオプション・スリム用)

●素材：ポリエステル65%・綿35%

開発・製造元

ISO9001 認証取得
ISO13485 認証取得
※床ずれ防止マットレス・体動センサーの設計、製造および付帯サービスにて取得

本製品の取扱説明書は下記QRコードからダウンロードいただけます。



取扱説明書

株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部

www.molten.co.jp/health

東京 札幌 仙台 埼玉 名古屋 大阪 広島 福岡

製品部 各社お問い合わせ

〒773-0036 広島市西区観音新町四丁目10-97-21

TEL.082-578-9226

E-mail:health@molten.co.jp

〈電話による受付時間〉月曜日～金曜日 9:00～17:00
※祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休業日など弊社休業日を除く