

# ポジションクッション ピーチ クリーン

## 取扱説明書

### 注意事項

①：必ず実行していただく「強制」を意味します。



### 注意

- ① 中身のクッションビーズを食べないでください。
- ② 火気・高温の近くで使用しないでください。  
火災・変形・変色の原因になります。
- ③ 長期間クッションの上に重量物を置かないでください。  
変形の原因になります。
- ④ 直射日光の当たる場所で保管しないでください。  
変形・変色の原因になります。
- ⑤ クッション本体は洗濯、乾燥しないでください。

### お手入れ方法

#### 汚れの落とし方

カバーは洗濯機などで丸洗い洗浄してください。  
カバー洗浄後は、乾燥機または天日干してください。

- ① 水温40℃以上での洗浄は、カバーが縮むおそれがあります。
- ① カバーを繰り返し洗浄すると、ポリエステル繊維表面に傷がつき黒い汚れが付着することがあります。
- ① 乾燥機の設定は《80℃で20分以内》に設定してください。

#### 消毒のしかた

- ① 消毒剤をインナーフィルム全体に噴霧または布に染み込ませて清拭してください。
- ① オートクレープなどの高温消毒装置は、クッションビーズが変形するおそれがあるので使用しないでください。
- ① 塩素系洗剤(次亜塩素酸ナトリウム)を使用する場合は、カバーやクッションビーズが劣化するおそれがあるので200~300倍に薄めて使用してください。

株式会社 モルテン 健康用品事業本部 お客様窓口 TEL(082)842-9975

〈電話による受付時間〉月曜日~金曜日/9:00~17:00 ※祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休業日など弊社休業日を除く

## 仕様

### ピーチ クリーン

品番 MPHCM(ピーチクリーン・ノーマル)/MPHCL(ピーチクリーン・ラージ)/MPHCX(ピーチクリーン・ワイド)/MPHCSL(ピーチクリーン・スリム)

●素 材：クッションビーズ=オレフィン系エラストマー、インナーフィルム=ポリウレタン、外カバー=ポリエステル

ピーチクリーン・ノーマル サイズ：41×31cm 重量：0.9kg    ピーチクリーン・ラージ サイズ：53×33cm 重量：1.5kg  
ピーチクリーン・ワイド サイズ：63×43cm 重量：2.3kg    ピーチクリーン・スリム サイズ：70×28cm 重量：1.5kg

#### オプション

##### 外カバー単体

品番 MPHCMCV(ピーチクリーン・ノーマル・外カバー)  
品番 MPHCLCV(ピーチクリーン・ラージ・外カバー)  
品番 MPHXCVCV(ピーチクリーン・ワイド・外カバー)  
品番 MPHCSLVCV(ピーチクリーン・スリム・外カバー)

オプションカバー ※外カバーにかぶせる綿のカバー(ピローケース)

品番 MPHOPM(ピーチオプション・ノーマル用)  
品番 MPHOPL(ピーチオプション・ラージ用)  
品番 MPHOPX(ピーチオプション・ワイド用)  
品番 MPHOPSL(ピーチオプション・スリム用)

#### 開発・製造元

ISO9001 認証取得

ISO13485 認証取得

※床ずれ防止マットレス・体動センサーの設計・製造および付帯サービスにて取得

株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部

[www.molten.co.jp/health](http://www.molten.co.jp/health)

東京 札幌 仙台 埼玉 名古屋 大阪 広島 福岡

新潟 徳島 香川 高松 愛媛 佐賀 熊本 鹿児島

〒739-1794 広島市安佐北区口田南2-18-12

TEL.082-842-9975

E-mail:health@molten.co.jp

〈電話による受付時間〉月曜日~金曜日/9:00~17:00

※祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休業日など弊社休業日を除く