

# ポジションクッション ピーチ クリーン

## 取扱説明書

### 注意事項



#### 注意

- ① 中身のクッションビーズを食べないでください。
- ② 火気・高温の近くで使用しないでください。  
火災・変形の原因になります。
- ③ 長期間クッションの上に重量物を置かないでください。  
変形の原因になります。
- ④ 直射日光の当たる場所で保管しないでください。  
変形・変色の原因になります。
- ⑤ クッション本体は洗濯、乾燥しないでください。

### お手入れ方法

#### 外カバーの汚れの落とし方

カバーは洗濯機などで丸洗い洗浄してください。  
カバー洗浄後は、乾燥機または天日干してください。


- ① 外カバーを着脱する場合、インナーバッグのファスナーへの巻き込みや傷つきに注意してください。  
インナーバッグが破損するおそれがあります。
- ① 水温40℃以上での洗浄は、カバーが縮むおそれがあります。
- ① カバーを繰り返し洗浄すると、ポリエステル繊維表面に傷が付き黒い汚れが付着することがあります。
- ① 乾燥機の設定は「80℃で20分以内」に設定してください。

#### インナーバッグ・インナークッションの消毒のしかた

- ① 消毒剤をインナーバッグ全体に噴霧または布に染み込ませて清拭してください。
- ① オートクレープなどの高温消毒装置は、インナーバッグ・インナークッションが変形するおそれがあるので使用しないでください。
- ① 塩素系洗剤（次亜塩素酸ナトリウム）を使用する場合は、カバーやクッションビーズが劣化するおそれがあるので200～300倍に薄めて使用してください。

### 外カバーのファスナータグについて

クッションの中身を誤飲するおそれのある利用者様に使用するなど、ファスナーを簡単に開けたくない場合は、タグを切り取りスライダーの取っ手をゴムバンドの内側に入れてください。

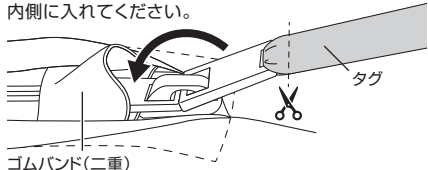

❗ : 必ず実行していただく「強制」を意味します。

## 仕様

### ピーチ クリーン

品番 MPHCM(ピーチクリーン・ノーマル) / MPHCL(ピーチクリーン・ラージ) / MPHXC(ピーチクリーン・ワイド) / MPHCSL(ピーチクリーン・スリム)

- 素材 : クッションビーズ=ポリエチレン、インナーバッグ=ウレタンフィルム、中メッシュ=ポリエステル65%・綿35%
- (ピーチクリーン・ノーマル) サイズ : 41×31cm 重量 : 0.75kg (ピーチクリーン・ラージ) サイズ : 53×33cm 重量 : 1.2kg
- (ピーチクリーン・ワイド) サイズ : 63×43cm 重量 : 1.9kg (ピーチクリーン・スリム) サイズ : 70×28cm 重量 : 1.2kg

### オプション

#### 外カバー単体

- 品番 MPHCMCVA(ピーチクリーン・ノーマル・外カバー)  
MPHCLCVA(ピーチクリーン・ラージ・外カバー)  
MPHCXCVA(ピーチクリーン・ワイド・外カバー)  
MPHCSLVA(ピーチクリーン・スリム・外カバー)

#### オプションカバー ※外カバーにかぶせる専用カバー

- 品番 MPHOPM(ピーチオプション・ノーマル用)  
MPHOPL(ピーチオプション・ラージ用)  
MPHOPX(ピーチオプション・ワイド用)  
MPHOPSL(ピーチオプション・スリム用)

- 素材 : ポリエステル65%・綿35%

### 開発・製造元

ISO9001 認証取得  
ISO13485 認証取得  
※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、  
製造および付帯サービスにて取得  
本製品の取扱説明書は下記QRコード  
からダウンロードいただけます。



取扱説明書

### 株式会社 モルテン

健康用品事業本部

www.molten.co.jp/health

東京 札幌 仙台 埼玉 名古屋 大阪 広島 福岡

〒733-0036 広島市西区観音新町四丁目10-97-21

TEL.082-578-9226

E-mail:health@molten.co.jp

〈電話による受付時間〉月曜日～金曜日 9:00～17:00

※祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休業日など弊社休業日を除く