

# ポジショニングピロー用 フラップ付きカバー

## 取扱説明書

### 注意事項

⚠ 注意：障害を負う可能性または物的損害を発生させる可能性がある場合を意味します。






#### 注意

- ① 火気・高温の近くで使用しないでください。 火災・変形の原因となります。
- ② 直射日光の当たる場所で保管しないでください。 変形・変色の原因となります。
- ③ 本来の目的以外に使用しないでください。




### 使用方法

#### 【使用例：食事時のポジショニング】

- ① フラップ付きカバーの袋部に「ピーチ」などのポジショニングピローを入れます。
- ② ベッドの屈曲点と身体の屈曲点を合わせます。ポジショニングピローが足底に密着するように設置します。下肢(ひざ)を持ち上げ、フラップ部を広げてしわを伸ばし、下肢(ひざ)を乗せます。
- ③ ベッドのひざを上げてから背を上げます。背上げ後の姿勢は苦しいので、圧抜きします。  
※ 圧抜き: マットレスから背中、腰、足を一時的に離すことで、すね力を開放し、体圧を低下させる手法。

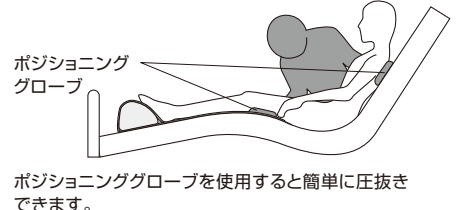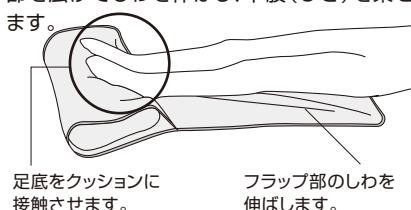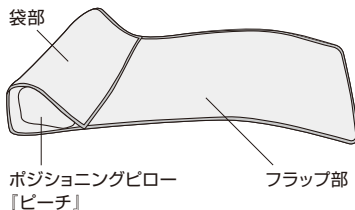

- ④ 下記のイラストの項目④、⑤、⑥の順に姿勢を整えます。楽かどうか利用者様に確認します。

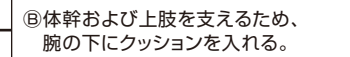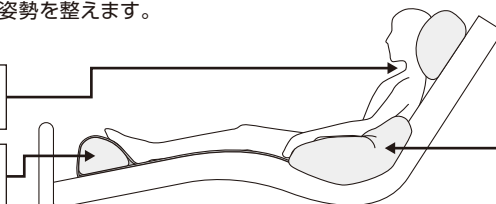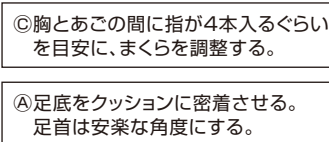

- ⑤ ベッドを仰臥位に戻すときは、まず、背を下げてからひざを下げます。背下げ時も身体とマットレスの間にすねが生じますので、圧抜きを行います。フラップ付きカバーは、設置したままで構いません。

### お手入れ方法

⚠：必ず実行していただく「強制」を意味します。

#### 洗浄

- 家庭用洗濯機による丸洗いが可能です。
- ⚠ 温水で洗浄する場合は《40℃以下》で行ってください。
- 乾燥機による乾燥が可能です。
- ⚠ 乾燥は、《80℃以下》で行ってください。

#### 消毒

- ① 消毒薬やアルコールを噴霧または布に染み込ませて拭き取ってください。
- ① 塩素系洗剤(次亜塩素酸ナトリウム)は使用方法、注意事項をよくお読みの上、常温でご使用ください。  
※ 高濃度や高温の塩素系洗剤を使用した場合、色落ちしたり、機能を損なうおそれがありますので必ずメーカー指定の希釈倍率および指定の温度をお守りください。
- ① 熱水消毒は、《80℃以下》で消毒してください。  
※ 80℃以上の熱水で行うと、機能を損なうおそれがありますので、必ず指定の温度をお守りください。
- ① オートクレープでの消毒はおやめください。

### 仕様

#### フラップ付きカバー

品番 MPHFLAP

- サイズ：幅65×長さ110cm
- 素材：ポリエステル/綿

#### 開発・製造元

株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部

[www.molten.co.jp/health](http://www.molten.co.jp/health)

東京 札幌 仙台 埼玉 名古屋 大阪 広島 福岡

製品他、各種お問い合わせは

〒739-1794 広島市安佐北区口田南2-18-12

TEL.082-842-9975

FAX ☎0120-769-123

E-mail:health@molten.co.jp

ISO9001 認証取得

ISO13485 認証取得

※ 床ずれ防止マットレス・体動センサーの設計、製造および付帯サービスにて取得