

取扱説明書

注意事項



- ①火気・高温の近くで使用しないでください。火災・変形の原因となります。
- ②使用後は床の上やベッドの上に放置しないでください。転落・転倒の原因となり、思わぬ事故を招きケガをするおそれがあります。
- ③直接日光の当たる場所では保管しないでください。
- ④裏返した状態で使用しないでください。滑りが悪くなり、圧を取り除きにくくなります。グローブの中にタグがある状態で使用してください。
- ⑤本来の目的以外に使用しないでください。

使用方法

【ポジショニンググローブ】は、腕につけて体の下へ差し込むだけで、誰でも簡単に体にかかる苦しい圧を取り除くことができる、「**安楽な姿勢**」作りのためのポジショニング専用グローブです。

※介護・看護者がグローブに腕を入れて使います。
外側は差し込みやすいように滑りやすい素材を使用しています。



ポジショニンググローブの活用例



【ベッド背上げ時】

ベッドの背上げ後(または背下げ後)に背中とマットレスの間にグローブをつけた腕を差し込むことで、背中にかかる苦しい圧(圧迫力やずれ力)を取り除くことができます。



【クッションを使ったポジショニング時】

ポジショニング後に、体とクッションの間にグローブをつけた腕を差し込み、体にかかる苦しい圧(圧迫力やずれ力)を取り除いたり、体位の微調整や衣服のシワ伸ばしが簡単にできます。



【体の移動や体位変換時】

グローブをつけた腕を体とマットレスの間に差し込んで体を滑らせるように移動させたり、体位を変えたりすることができます。

お手入れ方法

❗この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の意味です。

洗 浄

- ❗家庭用洗濯機による丸洗い洗浄が可能です。温水で洗浄する場合は《40℃以下》で行ってください。
- ❗乾燥機による乾燥が可能です。《80℃以下》で行ってください。
※洗濯および乾燥後に5%程度、生地が縮む場合がありますが、機能上問題ありません。

消 毒

- ❗消毒薬やアルコールを噴霧または布に染み込ませて拭き取ってください。
- ❗塩素系洗剤(次亜塩素酸ナトリウム)は使用方法、注意事項をよくお読みの上、常温で使用してください。
※高濃度や高温の塩素系洗剤を使用した場合は、色落ちしたり、機能を損なうおそれがありますので必ずメーカー指定の希釈倍率および指定の温度をお守りください。
- ❗熱水消毒は、《80℃以下》で消毒してください。
※80℃以上の熱水で行うと、機能を損なうおそれがありますので、必ず指定の温度をお守りください。
- ❗オートクレープでの消毒はおやめください。

仕 様

ポジショニンググローブ / 2枚入り

品番 MPG

- サイズ: 幅22×長さ55cm
- 素 材: ナイロン

開発・製造元

ISO9001 認証取得
ISO13485 認証取得
※床ずれ防止マットレス・体動センサーの設計、
製造および付帯サービスにて取得
本製品の取扱説明書は下記QRコード
からダウンロードいただけます。



取扱説明書

株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部

www.molten.co.jp/health

東京 札幌 仙台 埼玉 名古屋 大阪 広島 福岡
製品他、各種お問い合わせは

〒733-0036 広島市西区観音新町四丁目10-97-21

TEL.082-578-9226

E-mail:health@molten.co.jp

〈電話による受付時間〉月曜日～金曜日 / 9:00～17:00
※祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休業日など弊社休業日を除く