


## クロスバー取扱説明書

### 注意事項

- ① クロスバーを他社製品と組み合わせて使用しないでください。
- ② クロスバーが固定されているか十分に確認しないまま使用しないでください。  
固定ネジや跳ね上げ式のロックはしっかりと固定し、簡単にすれたり外れたりしないことを確認して使用してください。  
取り付けが不十分な場合は、使用中に外れ、転倒やケガをするおそれがあります。
- ③ クロスバーに全体重を加えたり、子供がぶら下がったりしないよう注意してください。  
製品が変形・破損したり不安定になり、ケガをするおそれがあります。
- ④ クロスバーを跳ね上げた状態で保持しないでください。  
手ずりが落下し、ケガをするおそれがあります。
- ⑤ クロスバーは下図イラストのように2本以上取り付けしないでください。  
クロスバーの間のすき間にはさみ込まれ、ケガをするおそれがあります。




警告

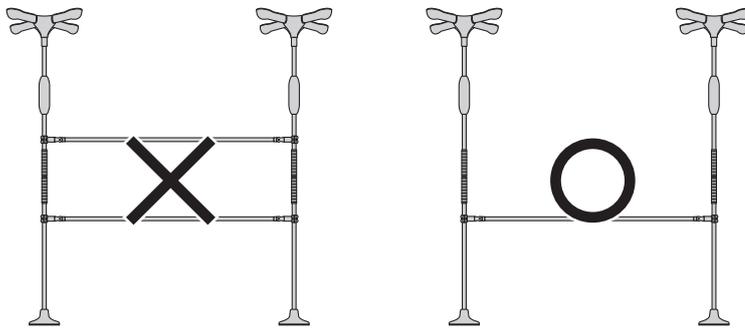


### 組み立て方法


① クロスバーを1本で使用する場合

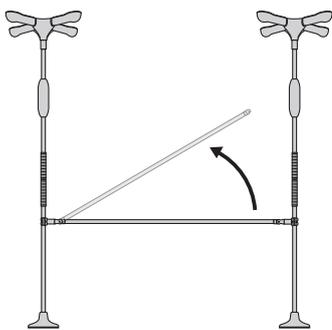


② クロスバーを2本以上連結する場合

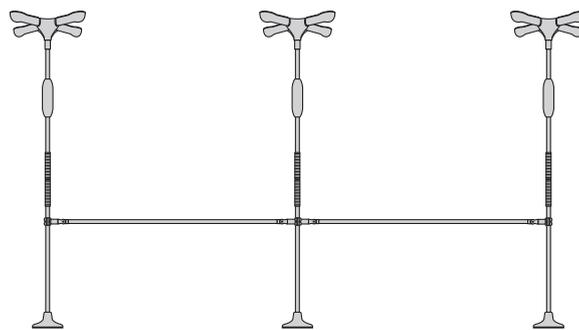


#### ① クロスバーを1本で使用する場合

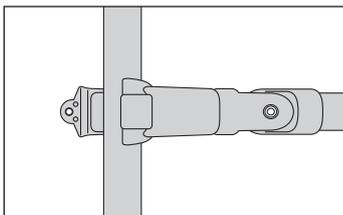

① クロスバーを取り付ける高さを決めます。

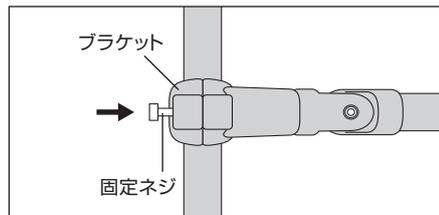

② 固定式の場合は、ブラケットを固定ネジでしっかりと固定します。反対側も同様に固定し、使用してください。

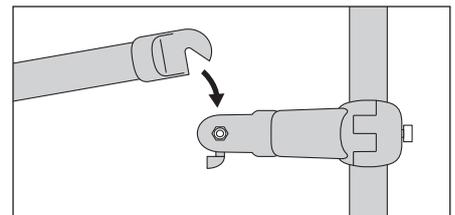


③ 跳ね上げ式の場合は、片方を跳ね上げ式用ブラケットにし、同様に固定します。

④ 取り付け後、クロスバーに体重をかけ、下がらないことを確認してください。



**注意** クロスバーが簡単に下がる場合は、固定ネジを増し締めしてください。

## 組み立て方法

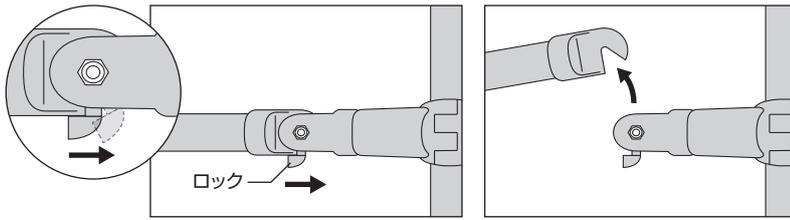


### 【クロスバーの跳ね上げ方】

クロスバー下のつまみを動かし、ロックを解除してから、クロスバーを跳ね上げます。




**注意** 跳ね上げ式を使用する場合は、ロックされていることを確認して使用してください。


### ②クロスバーを2本以上連結する場合

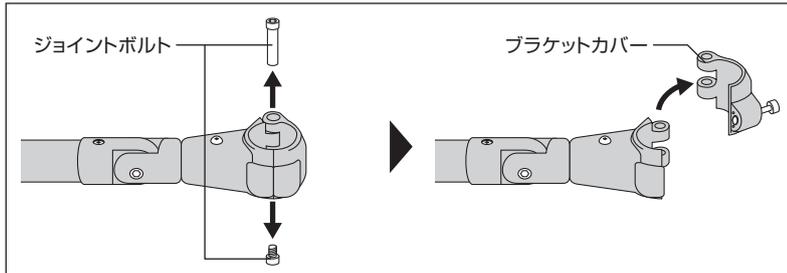

①クロスバーのジョイントボルトを、5mmの六角レンチ2本を使用してゆるめ、ブラケットカバーを取り外します。

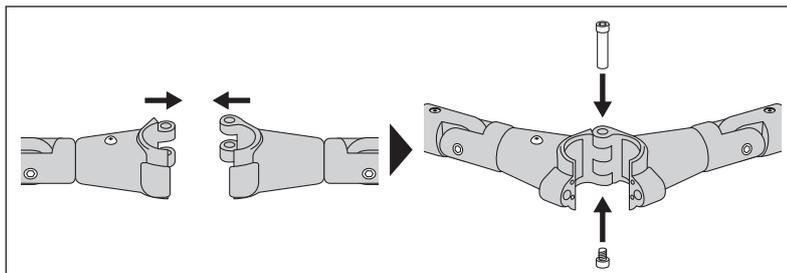

②もう一方のクロスバーも同様にブラケットカバーを外し、形状を合わせながら組み合わせ、ジョイントボルトを取り付けて5mmの六角レンチでしめます。

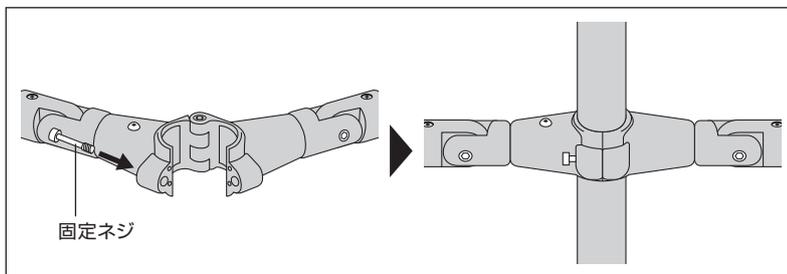

③ブラケットカバーについていた固定ネジを穴に通し、パディーにブラケットをはさみ、固定ネジをしめて取り付けます。

## 仕様

### クロスバー

幅	品番	
	固定式セット	跳ね上げ式セット
40cm	MNTCM03BE004	MNTCM02BE004
60cm	MNTCM03BE006	MNTCM02BE006
90cm	MNTCM03BE009	MNTCM02BE009
1.2m	MNTCM03BE012	MNTCM02BE012
1.6m	MNTCM03BE016	MNTCM02BE016
2.0m	MNTCM03BE020	MNTCM02BE020

- 素 材：主材=スチールパイプ、表面=木目調樹脂
- 直 径：3.5cm

### 開発・製造元

ISO9001 認証取得  
ISO13485 認証取得  
※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、製造および付帯サービスにて取得  
本製品の取扱説明書は下記QRコードからダウンロードいただけます。



取扱説明書

## 株式会社 モルテン

健康用品事業本部

[www.molten.co.jp/health](http://www.molten.co.jp/health)

東京 札幌 仙台 埼玉 名古屋 大阪 広島 福岡  
製品他、各種お問い合わせは

〒733-0036 広島市西区朝音新町四丁目10-97-21

TEL.082-578-9226

E-mail:health@molten.co.jp

〈電話による受付時間〉月曜日～金曜日/9:00～17:00  
※祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休業日など弊社休業日を除く