

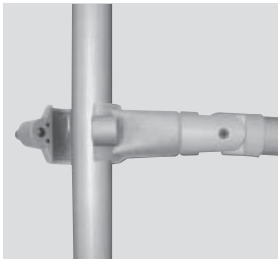


●クロスバーの取付け


《三本連結例》

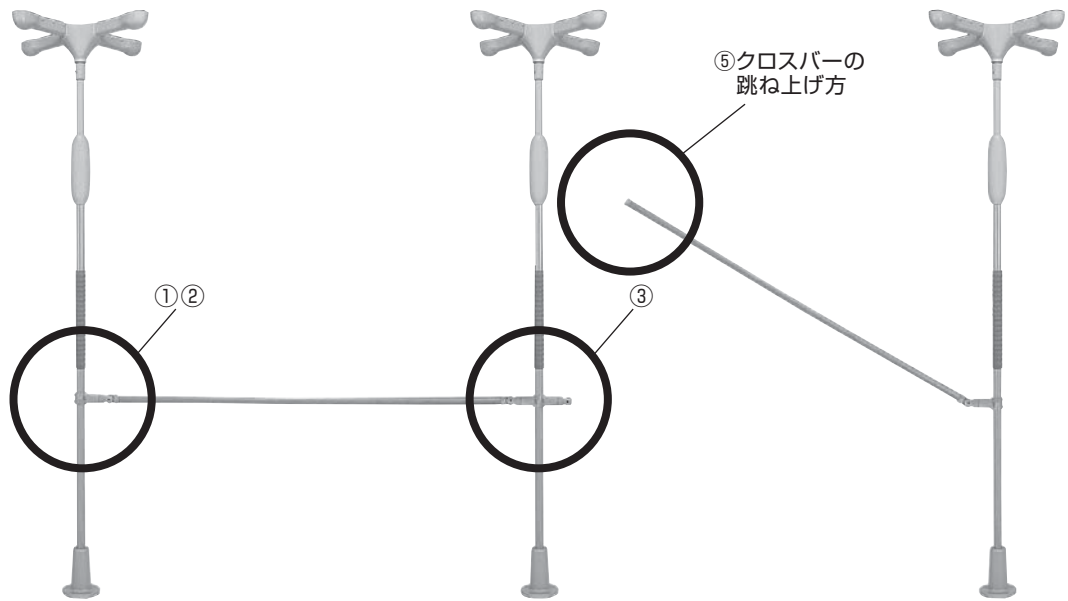

①クロスバーを取り付ける高さを決めます。

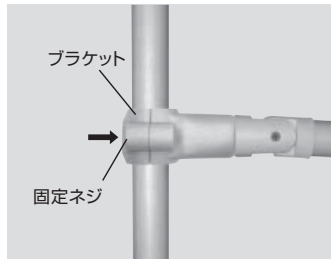

②ブラケットを閉じ、固定ネジでしっかりして固定します。


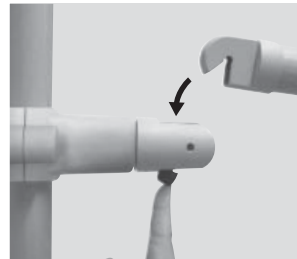


③反対側のブラケットも同様に取付け、クロスバーをはめ込みます。

※クロスバーが簡単に下がる場合は、固定ネジを増締めしてください。  
※クロスバーを1スペースに2本以上取り付けないでください。

④取り付け後、クロスバーに体重をかけ、下がらないことを確認してください。

クロスバーの跳ね上げ方

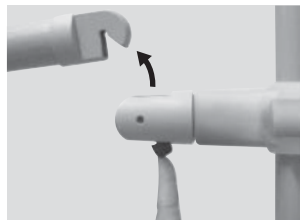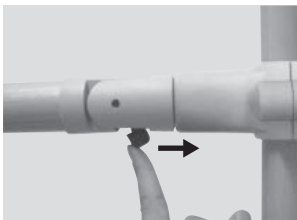

⑤クロスバー下のつまみを動かし、ロックを解除してから、クロスバーを跳ね上げます。

クロスバーを2本以上連結する場合


●2つのブラケットの接続方法



①クロスバーを2本揃えます。



②ヒンジ部のピンボルトを両側からM5の六角レンチで外し、ブラケットを分解します。

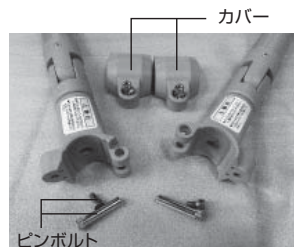

③2本とも分解します。




④クロスバー2本のヒンジ部を組み合わせ、ピンボルトを両側からセットします。

※ピンボルトは1セットのみ使用します。使用しないピンボルト・固定ネジ・カバーは大切に保管してください。




⑤両側からM5の六角レンチでしめます。

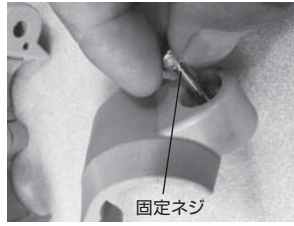


⑥②で取り外したカバーについている固定ネジをM5の六角レンチで取り外します。  
※取り外す固定ネジは1つのみ



⑦取り外した固定ネジをブラケットに取り付けます。  
※貫通してボルトが出るまでしめます。



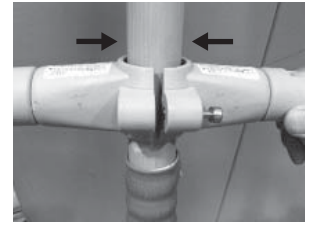


⑧バディーI本体をはさみ込むようにクロスバーを取り付けます。  
※グリップカバーをはさみ込まないでください。

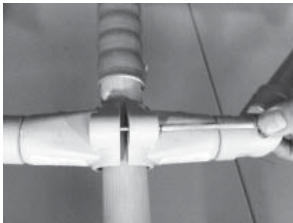


⑨M5の六角レンチで固定ネジをしめて固定します。 ※しめすぎないでください  
クロスバーに力を加え、上下にずれないか確認します。


●はね上げ式クロスバーを使用する場合の注意点

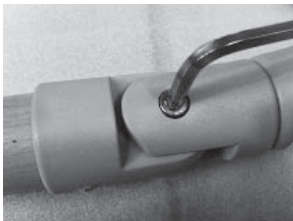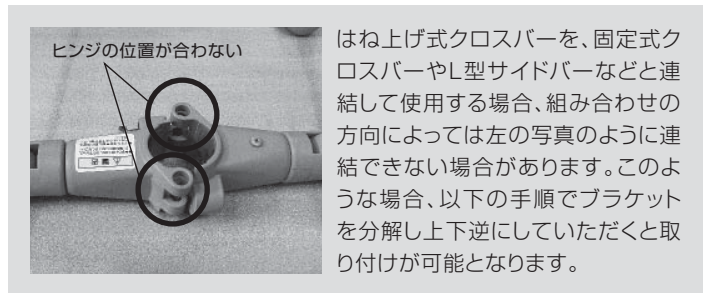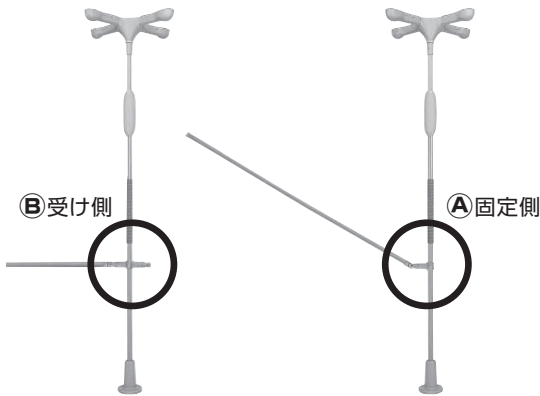


①はね上げ式クロスバーの④固定側のブラケットと手すり本体を固定しているピンボルトをM5の六角レンチで取り外します。

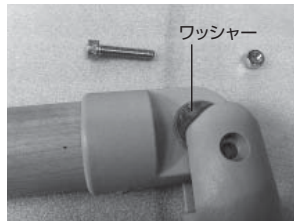

②間に入っている2個の特殊ワッシャーを無くさないように分解します。

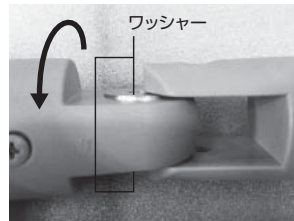


③はめ込むときに手すり本体を180度回転させてブラケットにはめ込み直します。ワッシャーを2個くぼみに合わせてずれないように組み合わせます。

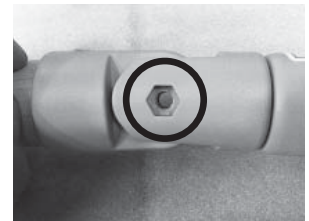


④ブラケットとワッシャーの穴が貫通しているか確認します。




⑤ボルトナットをM5六角レンチでしめます。  
※手すりをはねあげられる硬さにしめます。  
以上で④固定側の調整は完了です。

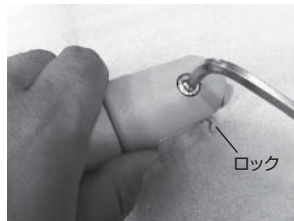

⑥次にはねあげ式クロスバーの③受け側(ロックのある方)のブラケットを固定しているボルトナットを取り外します。

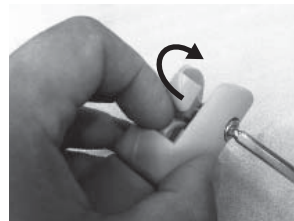

⑦ロック部分を上下逆にしてボルトナットを通し、M5の六角レンチで固定します。以上で③受け側の調整は完了です。

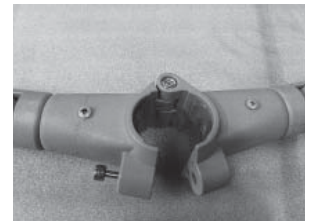

⑧2つのブラケットの向きが合いますので前項「●2つのブラケットの接続方法」の要領で組み合わせ、バディーI本体に取り付けます。