

バディー／ルーツ専用オプション
トレイ取扱説明書




- 品番 MNTCMM30(ホルダー)
MNTCMM31(トレイス)
MNTCMM32(トレイル)
MNTCMM33(フック)

注意事項



警告

- ①本製品はバディー／ルーツ専用オプションで、観葉植物を飾ったり小物を乗せることができる製品です。
上記以外の製品での使用や本来の目的以外に使用しないでください。思わぬ事故やケガにつながるおそれがあります。
- ②本製品に不安定なものを乗せないでください。また、植木鉢などを乗せる場合は、下記条件の耐荷重や鉢サイズ、鉢高さを守って使用してください。
不安定なものや、条件を超えて使用すると、本製品の破損や乗せたものが落下することでケガをするおそれがあります。
また、家財を破損させるおそれがあります。

	耐荷重 (水分含む) 	鉢のサイズ (鉢の直径) 	鉢の高さ 
トレイス	1.5kg	5号まで(最大15cm以内)	15cm以内
トレイル	3.0kg	5号まで(最大15cm以内)	15cm以内
フック*	3.0kg	5号まで(最大15cm以内)	制限なし

【鉢のサイズ目安】

鉢サイズ	鉢の直径
3号	9cm
4号	12cm
5号	15cm

※バディーのみ。ルーツには使用できません。

- ③本製品は手すりではありません。つかんで立ち上がったり、上や横から力を加えないでください。
手すり代わりに使用したり、力を加えることで製品が動いて転倒やケガをするおそれがあります。
- ④本製品の下(底部)から力を加えないでください。
力を加えることで取り付け部が外れ、乗せたものが落下することでケガをしたり、家財を破損させるおそれがあります。
- ⑤利用者様の動線や手すり本体の握る位置を十分に検討し、最適な位置(向き)に設置してください。
動線や握る位置を検討せずに設置した場合は、つまづきの原因となり、転倒のおそれがあります。
- ⑥火気を近づけたり、ストーブ、ファンヒーターのそばで使用しないでください。
火気やストーブ、ファンヒーターの熱などにより、製品が変形・破損し、火災や落下の原因となります。
- ⑦お客様による修理・改造は行わないでください。
変形・破損の原因となり、ケガをするおそれがあります。
- ⑧開き戸付近のトレイの設置は、扉と干渉しないよう注意してください。


バディーに使用する場合

- ①本製品を使用する前に、バディー本体が垂直に取り付けられていることの確認及び安全な設置強度を示す【設置警告ライン(黄色)】が隠れていることを確認してください。
使用中に手すりが外れて転倒し、ケガをするおそれがあります。
- ②バディーに取り付けできるトレイ・フックの最大個数は、4個です。
- ③ベッド付近に設置する場合は、十分なすき間を空けて設置してください。
ベッドとの挟み込みや背ボトムの動作に干渉し、落下や破損の原因となります。


注意事項

ルーツに使用する場合


- ①トレイはルーツ サイド／コーナータイプおよびルーツ エントランスのみ使用できます。
ルーツ センター／スモール／あがりかまちタイプには使用できません。
- ②ルーツに使用する場合は、フックの使用はできません。
- ③トレイは手すり部1台につき2個設置できます。2個設置する場合は、トレイSのみにしてください。

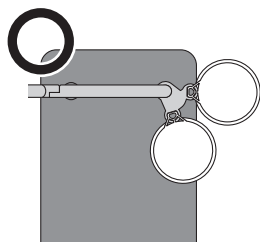

【S+S】

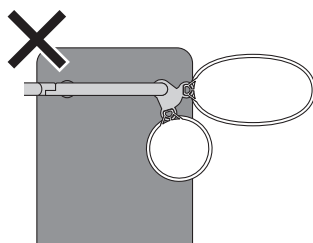

【S+L】

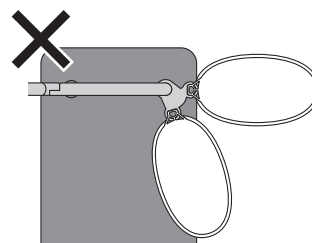

【L+L】


- ④トレイを設置する場合は、P4「設置方法」を参照しホルダーに差し込む位置を確認してください。
- ⑤ルーツにトレイで観葉植物を設置した場合は、手すりを少し動かしてみて、観葉植物が動いて不安定にならないか確認してください。
- ⑥屋外のルーツ エントランスにトレイを使用する場合は、トレイに水抜きがありませんので、適宜水を抜いて管理してください。

各部名称および梱包内容


梱包内容に間違いはないか、破損・変形などしていないかを確認してください。
万が一、部品の不足・破損があった場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。



トレイS：1台
【MNTCMM31】

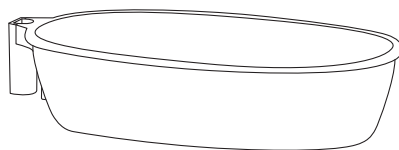


トレイL：1台
【MNTCMM32】

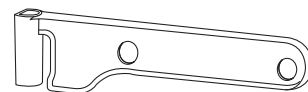


フック：1台
【MNTCMM33】

ホルダー【MNTCMM30】

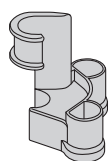

ホルダー本体
：1ヶ

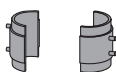

バディー用スペーサー
：2ヶ





ルーツ用スペーサー
：2ヶ

付属品



●取扱説明書


バディーに使用する場合

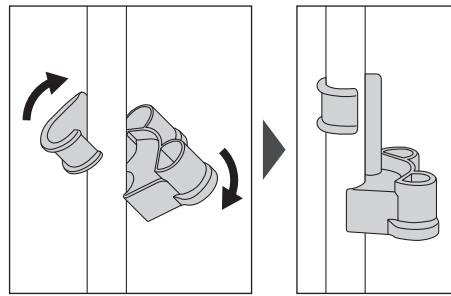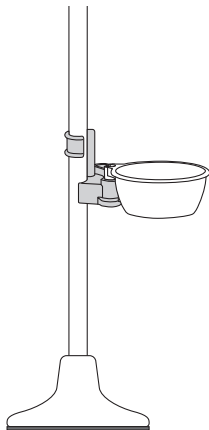

①ホルダーの取り付け


バディー本体にホルダーを傾けながら差し込み、起こして固定します。

※バディー上部の伸縮パイプに取り付ける場合は、事前にホルダーにバディー用スペーサーを取り付けます。バディー用スペーサー

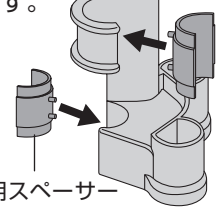

注意



利用者様の動線や手すり本体の握る位置を十分に検討し、最適な位置(向き)に設置してください。動線や握る位置を検討せずに設置した場合は、つまづきの原因になり、転倒のおそれがあります。

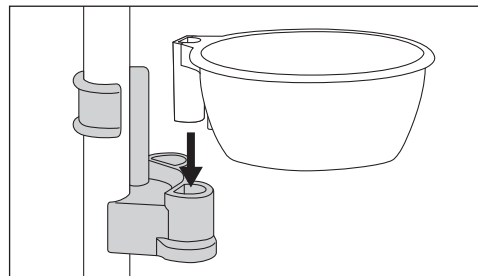

②取り付けしたホルダーに、フック・トレイを上から差し込みます。

※1つのホルダーでトレイやフックが2個取り付けできます。

ルーツに使用する場合

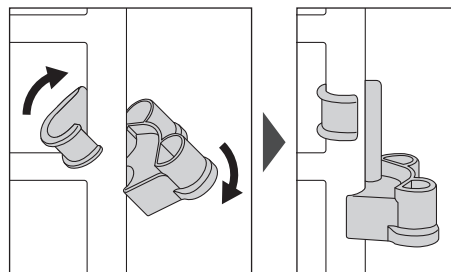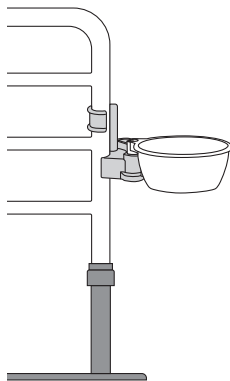


①ホルダーの取り付け

【ルーツ サイド/コーナータイプの場合】

手すり部のミドルグリップをはさむようにホルダーを傾けながら差し込み、起こして固定します。

※ルーツ用スペーサーを使用してください。ルーツ用スペーサー

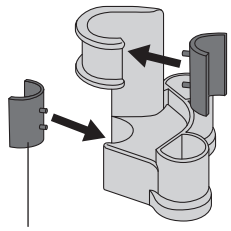

【ルーツ エントランスの場合】


手すり部のミドルグリップを1段目または2段目をはさむようにホルダーを傾けながら差し込み、起こして固定します。

※ルーツ用スペーサーおよびバディー用スペーサーは使用しません。



注意

利用者様の動線や手すり本体の握る位置を十分に検討し、最適な位置(向き)に設置してください。動線や握る位置を検討せずに設置した場合は、つまづきの原因になり、転倒のおそれがあります。

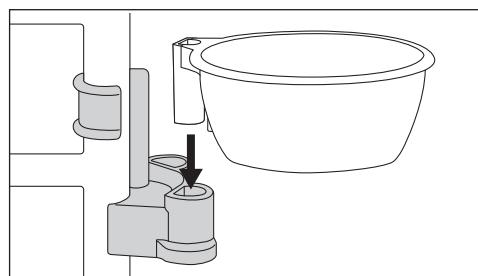

②取り付けしたホルダーの手すりに対して手前側に、トレイを上から差し込みます。

※手すりの奥側にトレイを設置すると、ベースプレートの重心が崩れるため、手すりが安全に使用できなくなります。


設置方法

バディーに使用する場合

ベッドや壁際から25～30cmの位置に設置したバディーに取り付けてください。

※高さや向きは、利用者様の歩行動線などのさまたげにならないよう調整してください。

【上から見た図】

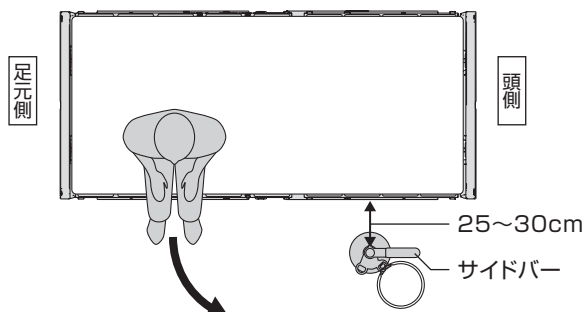


警告

- ①本製品を使用する前に、バディー本体が垂直に取り付けられていることの確認及び安全な設置強度を示す【設置警告ライン(黄色)】が隠れていることを確認してください。
使用中に手すりが外れて転倒し、ケガをするおそれがあります。
- ②バディーに取り付けできるトレイ・フックの最大個数は、4個です。

ルーツに使用する場合

トレイは手すりに対して手前側に設置してください。

※手すりの奥側にトレイを設置すると、ベースプレートの重心が崩れるため、手すりが安全に使用できなくなります。

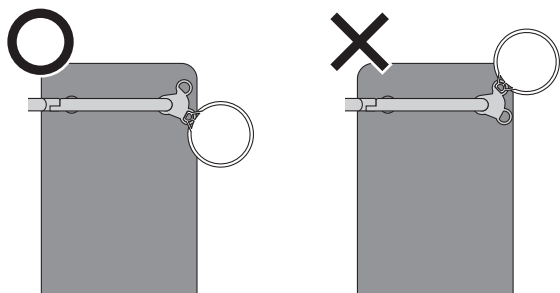

警告

- ①フックの使用はできません。
- ②トレイはルーツ サイド／コーナータイプおよびルーツ エントランスのみ使用できます。ルーツ センター／スモール／あがりかまちタイプには使用できません。
- ③トレイは手すり部1台につき2個設置できます。2個設置する場合は、トレイスのみにしてください。

仕様

ホルダー 品番 MNTCMM30

- 素 材：ABS樹脂
- 本体サイズ：幅13cm×長さ11cm×高さ14cm
- 重 量：0.17kg

トレイス 品番 MNTCMM31

- 素 材：ABS樹脂
- 本体サイズ：幅21×長さ23×高さ9cm
- トレイ深さ：8.0cm
- 設置後奥行き：27.5cm
- 重 量：0.26kg

トレイル 品番 MNTCMM32

- 素 材：ABS樹脂
- 本体サイズ：幅23×長さ40×高さ9cm
- トレイ深さ：8.0cm
- 設置後奥行き：44.4cm
- 重 量：0.46kg

フック 品番 MNTCMM33

- 素 材：ABS樹脂
- 本体サイズ：幅3×長さ31×高さ7cm
- 設置後奥行き：35.7cm
- 重 量：0.08kg

開発・製造元

ISO9001 認証取得
ISO13485 認証取得
※床ずれ防止マットレス・体動センサーの設計、
製造および付帯サービスにて取得
本製品の取扱説明書は下記QRコード
からダウンロードいただけます。



取扱説明書

株式会社 モルテン

健康用品事業本部

www.molten.co.jp/health

東京 札幌 仙台 埼玉 名古屋 大阪 広島 福岡
製品他、各種お問い合わせは

〒733-0036 広島市西区観音新町四丁目10-97-21

TEL.082-578-9226

E-mail:health@molten.co.jp

〈電話による受付時間〉月曜日～金曜日/9:00～17:00

※祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休業日など弊社休業日を除く