


ルーツ あがりかまちタイプ専用ステップ台 取扱説明書

ルーツあがりかまちタイプ専用のステップ台です。他の製品に取り付けて使用しないでください。
ルーツあがりかまちタイプの取扱説明書もお読みの上、使用してください。

取り付け方法

1 ステップ台下箱の取り付け

※L型にはステップ台は使用できません。


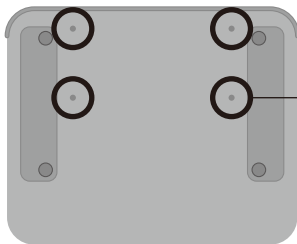


目隠しボルト

丸で囲んだ位置が
茶色の目隠しボルト



ノブナット

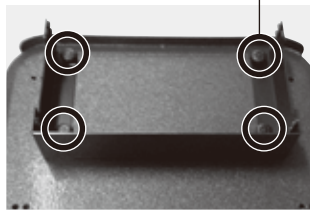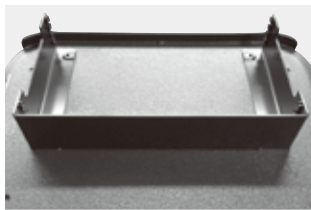

- ①ベースプレートにある茶色の目隠しボルトを取り外します。(4ヶ所)
- ②取り外した目隠しボルトはステップ台下箱のノブナットの使用しないネジ穴に内側から取り付けて保管してください。

- ③ステップ台下箱をベースプレートに設置します。ステップ台下箱はコの字の開いた方をあがりかまちに向けます。付属のノブナットで4ヶ所固定してください。





警告

- ①ステップ台下箱は必ずベースプレートに付属のノブナットで固定してください。
- ②付属品以外のノブナットやネジなどは使用しないでください。底面から飛び出して不安定になり、転倒のおそれや、床にキズが付いたり、穴があいたりするおそれがあります。

注意


- ①ステップ台を使用しない場合は、ベースプレートのネジ穴に必ず目隠しボルトを取り付けてください。小石やホコリが詰まり、ステップ台が設置できなくなるおそれがあります。
- ②目隠しボルトを紛失しないよう、必ずステップ台下箱のノブナットの使用しないネジ穴に内側から取り付けて保管してください。

2 ステップ台上箱の取り付け


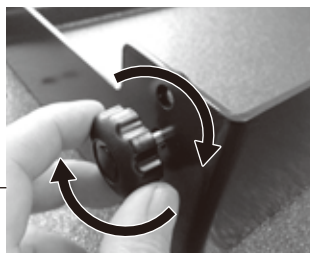
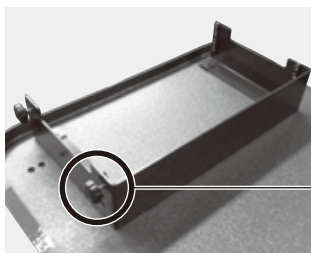


- ①ステップ台下箱の側面にあるネジ穴に、ステップ台上箱を取り付けるためのノブナットを取り付けます。(左右4ヶ所)

取り付け方法

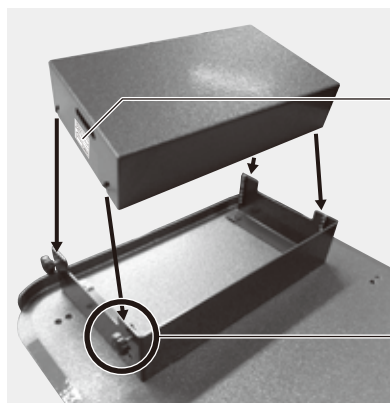

- ②ステップ台上箱にある矢印ステッカーがあがりかまちに対して左側にくるように取り付けてください。
ノブナットにステップ台上箱を溝に沿って取り付けます。

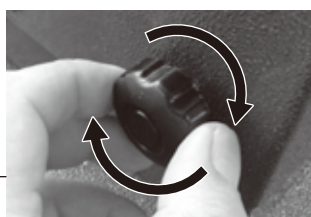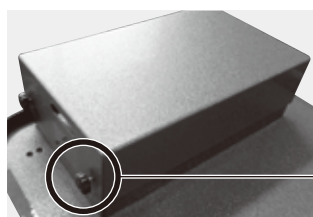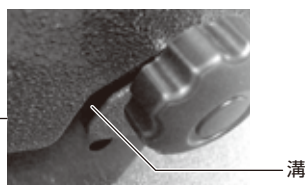


- ③左右4ヶ所のノブナットをしめて固定します。



警告

- ①ステップ台にガタつきがないことを確認し、使用してください。
②ルーツあがりかまちタイプの取扱説明書もお読みの上、使用してください。

取り外し方法

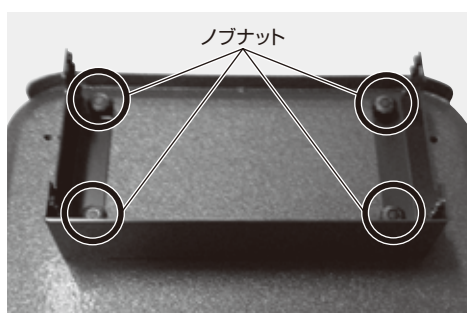

- ①ステップ台上箱を外します。
②ノブナットを外し、ステップ台下箱を取り外します。
③ノブナットはステップ台下箱のネジ穴の下側から二番目に内側から取り付けて保管してください。
(ノブナットの先が外側にとび出ないようにご注意ください。)
④ベースプレートのネジ穴に茶色の目隠しボルトを取り付けます。
(4ヶ所)(目隠しボルトは専用の物を使用してください。)

注意

ノブナットを紛失しないよう、必ず下箱の下側から二番目のネジ穴に内側から取り付けて保管してください。

仕様

ルーツ あがりかまちタイプ専用ステップ台

品番: MNTPKSBR

- 素 材: スチール
- サイズ: 幅50×奥行30×高さ12/14/16/18cm(4段階高さ調整)
- 重 量: 9.5kg

■適応機種=床置き型手すり ルーツ あがりかまちタイプ

開発・製造元

ISO9001 認証取得
ISO13485 認証取得
※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、製造および付帯サービスにて取得
本製品の取扱説明書は下記QRコードからダウンロードいただけます。



株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部

www.molten.co.jp/health

東京 札幌 仙台 埼玉 名古屋 大阪 広島 福岡
製品他、各種お問い合わせは

〒733-0036 広島市西区朝音新町四丁目10-97-21

TEL.082-578-9226

E-mail:health@molten.co.jp

〈電話による受付時間〉月曜日～金曜日/9:00～17:00

※祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休業日など弊社休業日を除く