

低段差スロープ インタースロープ取扱説明書

- 警告**：死亡または重傷などを負う可能性を意味します。
注意：障害を負うまたは物的損害を発生させる可能性を意味します。

注意事項


- 警告**
- ①本製品は小さな段差を解消し、安全な歩行をサポートするスロープです。本来の目的以外に使用しないでください。
思わぬ事故やケガにつながるおそれがあります。
 - ②土や砂、雪などが表面にある場合は、必ず清掃し使用してください。
滑って転倒するおそれがあります。
 - ③スロープが濡れている状態での使用は注意してください。
滑って転倒するおそれがあります。
 - ④浴室内では使用しないでください。
滑って転倒するおそれがあります。
 - ⑤利用者様の身体状態が安定しない場合は、介助者と一緒にご使用してください。
滑って転倒するおそれがあります。
 - ⑥電動車いすでは使用しないでください。
滑って転倒するおそれがあります。

- 注意**
- ①設置場所は平らな固い床面に設置してください。
 - ②段差を確認して高さに合うスロープを設置してください。
 - ③ガタつきが発生する場所では使用しないでください。
 - ④直射日光や熱をできるだけ避けて使用してください。
変色や変形、破損のおそれがあります。表面が白くなる場合がありますが、製品そのものに影響はありません。
 - ⑤床材の種類によっては跡が残る場合があります。
材質や長期間の使用によっては設置跡が残ったり、製品の色が付着する場合があります。
 - ⑥製品を折り曲げたり、強い衝撃を加えないでください。
連結部が破損するおそれがあります。

設置方法


段差のある場所に設置します。

リビング・和室から廊下や玄関など、段差のある場所に置きます。

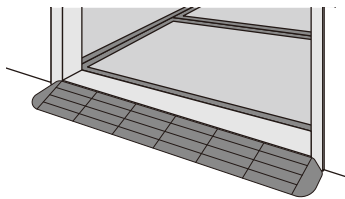

床に固定する場合。

- ①裏面に両面テープを貼り付けて固定してください。
 - ②裏側にビス用の目印がありますので、穴をあけて皿ビスで固定してください。
- ※両面テープおよび皿ビスは付属しておりませんので、ご用意ください。

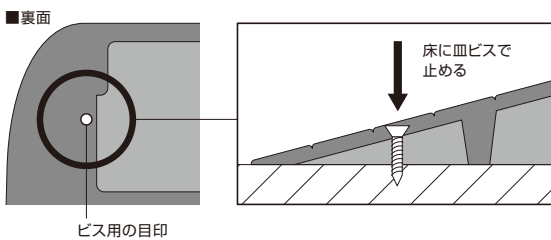

お手入れ方法

⊘：してはいけない「禁止」を意味します。

汚れの落とし方

- 消毒する場合は、アルコール消毒剤などを柔らかい布に吹き付けてから清拭してください。
- 清拭する場合は、中性洗剤を水で薄め、柔らかい布に浸し、よく絞ってから清拭してください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤で洗い流してください。
- 仕上げに乾いた布で拭き取ってください。
- ⊘ 次亜塩素酸を使用する場合は、6%水溶液を100～200倍に希釈して清拭し、仕上げに水拭きしてください。
 - ⊘ 有機溶剤（シンナーやベンジンなど）、強酸性洗剤は使用しないでください。
 - ⊘ 60℃以上の温度を加えないでください。
 - ⊘ 金属ブラシ、ナイロンたわしなどはキズをつけるため、使用しないでください。


保管方法

長期にわたり使用しないときには、下記の点に注意してください。

- ⊘ 他のものと重ねて置いたり、立て置き保管はしないでください。
変形の原因になる場合があります。
- ⊘ 材質や色が変わるおそれがあるので、直射日光に当たらない場所で保管してください。

仕様

インタースロープ

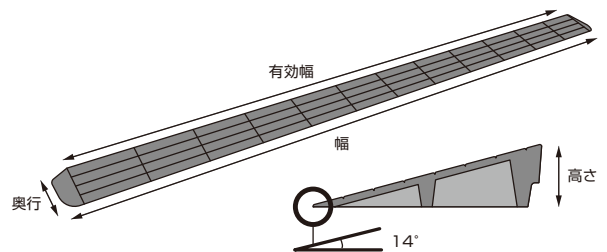

インタースロープ 76cm幅 有効幅：70cm

高さ (cm)	奥行 (cm)	角度	品番	重量 (kg)
1.0	3	14	MSRP1076	0.10
1.5	5		MSRP1576	0.25
2.0	7		MSRP2076	0.39
2.5	9		MSRP2576	0.56
3.0	11		MSRP3076	0.75
3.5	13		MSRP3576	1.00
4.0	15		MSRP4076	1.10
4.5	17		MSRP4576	2.10
5.0	19		MSRP5076	2.90
5.5	21		MSRP5576	2.60
6.0	23		MSRP6076	3.70
6.5	25	MSRP6576	4.70	

インタースロープ 111cm幅 有効幅：105cm

高さ (cm)	奥行 (cm)	角度	品番	重量 (kg)
1.0	3	14	MSRP10111	0.20
1.5	5		MSRP15111	0.50
2.0	7		MSRP20111	0.80
2.5	9		MSRP25111	1.00
3.0	11		MSRP30111	1.70
3.5	13		MSRP35111	2.50
4.0	15		MSRP40111	2.10
4.5	17		MSRP45111	3.20
5.0	19		MSRP50111	4.40
5.5	21		MSRP55111	3.90
6.0	23		MSRP60111	5.50

- 素材：特殊エラストマー ● 耐荷重：120kg
- 1年保証：破損・変色を保証（小さなキズ、床面の凹凸による変形は除く）
※本体裏面にあるロット番号で製品出荷年月が確認できます。

開発・製造元

ISO9001 認証取得
ISO13485 認証取得
※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、製造および付帯サービスにて取得

本製品の取扱説明書は下記QRコードからダウンロードいただけます。



取扱説明書

株式会社 モルテン

健康用品事業本部

www.molten.co.jp/health

東京 札幌 仙台 埼玉 名古屋 大阪 広島 福岡

製品他、各種お問い合わせは
〒733-0036 広島市西区観音新町四丁目10-97-21

TEL.082-578-9226

E-mail:health@molten.co.jp

（電話による受付時間）月曜日～金曜日 / 9:00～17:00
※祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休業日など弊社休業日を除く