



注意事項



警告

- ①本製品はモーニングライトの高さ調整を電動で行うための部品セットです。
本来の目的以外に使用しないでください。
- ②モーニングライトおよび専用オプションは正しく組み立て、ご使用ください。
本来の目的以外に使用しないでください。破損、異常がある場合はご使用をお控えください。



注意

- ①強いショックを与えたり、落としたりしないでください。
モーターが破損するおそれがあります。
- ②可動部分に手や指を挟まないようにしてください。
ケガをするおそれがあります。
- ③2モーターオプション仕様時は高さ調整固定ノブ(2モーター用)に交換してください。
高さ調整をガスシリンダーで行う1モーター仕様時は、高さ調整後は必ずノブを締めて使用してください。(本体取扱説明書P18)

※特に記載の無い事項については、モーニングライト本体の取扱説明書に準じてください。

梱包内容


以下の部品が全て揃っているか、破損、変形などがないかを確認してください。



- | | | | |
|--------------------|-------|--------------------|-------|
| ① 高さ調整用モーター | … 1 個 | ② ロングピン | … 2 本 |
| ② ロングピン | … 2 本 | ③ ロングスリムピン | … 3 本 |
| ③ ロングスリムピン | … 3 本 | ④ 割ピン | … 5 個 |
| ④ 割ピン | … 5 個 | ⑤ モーター取付用ブラケットA | … 1 個 |
| ⑤ モーター取付用ブラケットA | … 1 個 | ⑥ モーター取付用ブラケットB | … 1 個 |
| ⑥ モーター取付用ブラケットB | … 1 個 | ⑦ リモコン (2モーター用) | … 1 個 |
| ⑦ リモコン (2モーター用) | … 1 個 | ⑧ 注意シール | … 2 枚 |
| ⑧ 注意シール | … 2 枚 | ⑨ 高さ調整固定ノブ (2モーター) | … 2 個 |
| ⑨ 高さ調整固定ノブ (2モーター) | … 2 個 | | |
- ②ロングピン ④割ピンは本体側の部品と共通です。
③ロングスリムピンは本体側のスリムピンの長さ違いです。
⑨高さ調整固定ノブ(2モーター)はノブ頭は白シールです。1モーター仕様とは異なります。


組付け方法

① 高さ調整シリンダーの取り外し

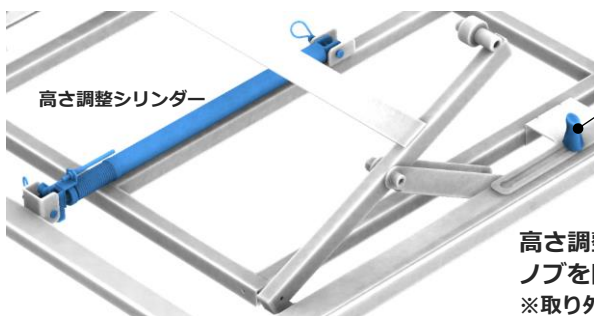

高さ調整シリンダー

高さ調整固定ノブ(左右)を取り外します。
※既存の固定ノブは使用しません。

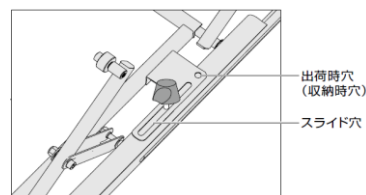

出荷時穴 (収納時穴)
スライド穴

高さ調整固定ノブ(2モーター)をスライド穴にしっかりと固定します。
ノブを固定した状態で高さ調整時はスライドします。確認してください。
※取り外した高さ調整固定ノブは紛失しないよう保管してください。
高さ調整シリンダーの割ピン、ロングピンを外し高さ調整シリンダーを外します。
※取り外した調整シリンダー、割ピン、ロングピンは紛失しないよう保管してください。


ベッド設置済の状態から作業を行う場合




ヘッド・フットボードとフットボトムを外した状態(左図)でも組み付けることができます。
ピンが抜けにくい、挿しにくい、穴位置が合わない場合は、片手でフレームを持ち上げながら作業を行うとピンの抜き挿しが可能です。

組付け方法


② モーター取付用ブラケットの組付け

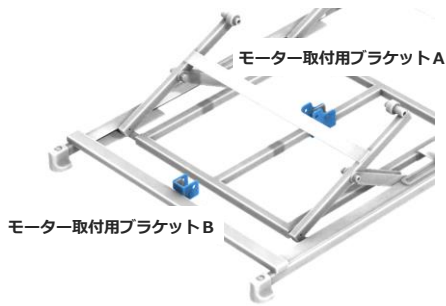

モーター取付用ブラケットB

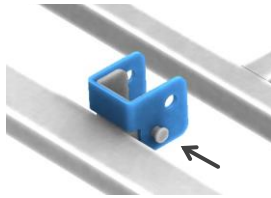


モーター取付用ブラケットA

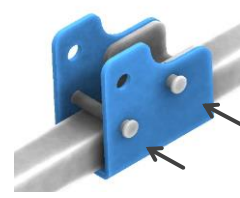

モーター取付用ブラケットをそれぞれロングスリムピンと割りピンで組付けてください。

③ 高さ調整用モーターの組付け

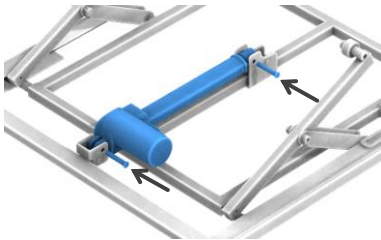


高さ調整用モーターをロングピンと割りピンで組付けてください。

④ フレーム・ヘッドボトム・背上げモーターの組付け





本体取説の各項を参照し、ヘッド・センター・フットフレームとヘッドボトム、背上げモーターを取付けてください。


⑤ 高さ調整用モーターのコード接続

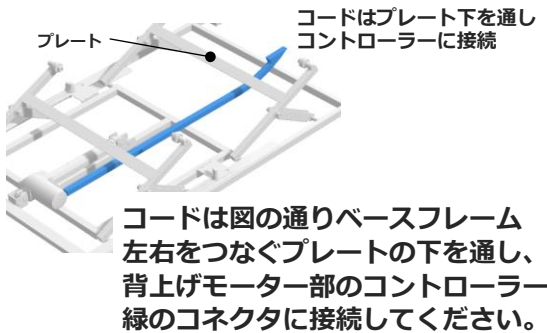

背上げモーター部のコントローラー

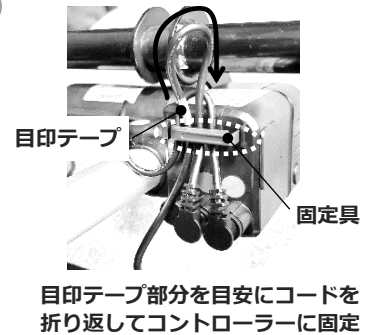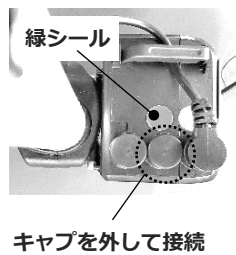


⑥ リモコン操作確認

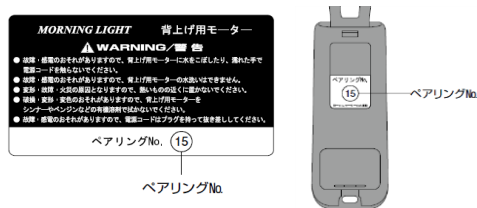

モーターとリモコンのペアリングNo.が一致していることを確認し、背上げ用モーターの電源コードをコンセントに接続し、2モーター用リモコンで背上げ用モーターと高さ調整用モーターが作動することを確認してください。

※ペアリングが一致しない場合は別紙設定一覧を参照し再設定してください。

⑦ 注意シールの貼り付け

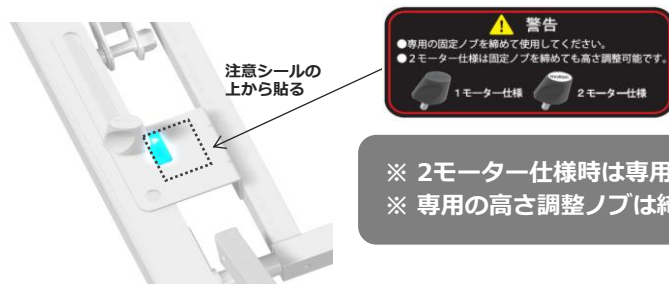

高さ調整固定ノブ部分の注意シールの上から付属の注意シールを貼ってください。(左右)

※ 2モーター仕様時は専用の高さ調整固定ノブ (2モーター) を締めて使用してください。
※ 専用の高さ調整ノブは締付けても高さ調整可能です。

仕様

バージョンアップセット

- 品番 MMLTHLA
 - 使用者最大体重 : 100kg
 - 高さ連続操作可能時間 : 約2分
 - 高さ調整用モーター : AC100V 50/60Hz 85W
- ※連続で操作を行う場合、18分の休止時間が必要です。

開発・製造元	株式会社 モルテン
ISO9001認証取得	健康用品事業本部 www.molten.co.jp/health
ISO13485認証取得	東京 札幌 仙台 埼玉 名古屋 大阪 広島 福岡 〒739-1794 広島市安佐北区口田南2-18-12 TEL.082-842-9975 E-mail:health@molten.co.jp
<small>(電話による受付時間) 月曜日～金曜日 / 9:00～17:00 ※祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休業日など弊社休業日を除く</small>	